

PILOTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO RÁPIDO DA AIDS AVANÇADA

CD4 VISITECT - OMEGA® (SANGUE) ETAPAS



- 1 LIMPAR O DEDO DO PACIENTE E DEIXAR O ÁLCOOL SECAR COMPLETAMENTE; REALIZAR PUNÇÃO DIGITAL COM A LANCETA E DESCARTAR A PRIMEIRA GOTA DE SANGUE (LIMPAR COM GAZE)
- 2 COLETAR A AMOSTRA DE SANGUE UTILIZANDO A PIPETA FORNECIDA NO KIT
- 3 COLOCAR O SANGUE COLETADO NO CENTRO DO POÇO A DO DISPOSITIVO DO TESTE
- 4 INCUBAR POR 3 MINUTOS
- 5 ADICIONAR 1 GOTA DO TAMPÃO NO POÇO A
- 6 INCUBAR POR 17 MINUTOS
- 7 ADICIONAR 3 GOTAS DO TAMPÃO NO POÇO B
- 8 AGUARDAR POR 20 MINUTOS
- 9 REALIZAR A LEITURA EM NO MÁXIMO 5 MINUTOS



CrAg Lateral Flow Assay - IMMY® (SANGUE) ETAPAS




- 1 ADICIONAR 1 GOTA DE DILUENTE DE AMOSTRA NO TUBO
- 2 ADICIONAR 40 MICROLITROS DE SANGUE TOTAL (PUNÇÃO DIGITAL OU COLETA VENOSA EM TUBO EDTA) NO TUBO E HOMOGENEIZAR
- 3 INSERIR A TIRA TESTE NO TUBO (ATENÇÃO PARA A POSIÇÃO DA FITA)
- 4 AGUARDAR POR 10 MINUTOS
- 5 REALIZAR A LEITURA ENTRE 10 MINUTOS E ATÉ 2 HORAS APÓS TER INSERIDO A TIRA



DETERMINE TB LAM Ag - Abbott® (URINA) ETAPAS



- 1 HOMOGENEIZAR A AMOSTRA DE URINA
- 2 COLOCAR 60 MICROLITROS DE AMOSTRA DE URINA NO LOCAL APROPRIADO DA TIRA TESTE
- 3 AGUARDAR POR 25 MINUTOS
- 4 REALIZAR A LEITURA EM 35 MINUTOS

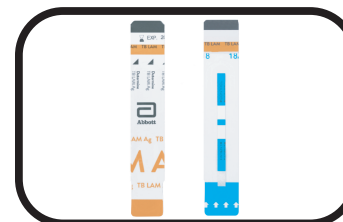

HISTOPLASMA Ag LFA - Miravista® (URINA) ETAPAS





- 1 ADICIONAR 25 MICROLITROS DO DILUENTE DE AMOSTRA NO TUBO
- 2 HOMOGENEIZAR A AMOSTRA DE URINA
- 3 ADICIONAR 100 MICROLITROS DE AMOSTRA DE URINA NO TUBO COM DILUENTE E HOMOGENEIZA
- 4 COLOCAR 100 MICROLITROS DO VOLUME PREPARADO NO DISPOSITIVO DE TESTE
- 5 AGUARDAR POR 40 MINUTOS
- 6 REALIZAR A LEITURA




CD4 VISITECT - OMEGA® (SANGUE)


**RESULTADO IGUAL OU ABAIXO
DA REFERÊNCIA** = contagem de
linfócitos T CD4+ ≤ 200 células/ μ L.

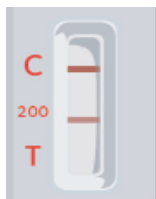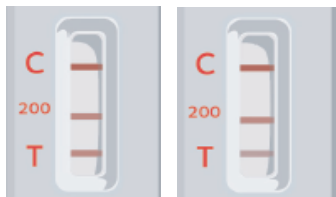

**RESULTADO ACIMA DA
REFERÊNCIA** = contagem de
linfócitos T CD4+ > 200 células/ μ L.

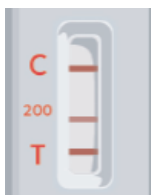

TESTE INVÁLIDO = não considerar
o resultado, repetir o teste.

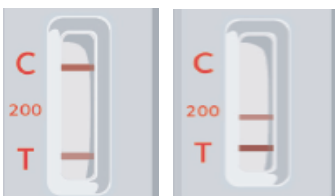


CrAg Lateral Flow Assay - IMMY® (SANGUE)

**RESULTADO NÃO REAGENTE
(NEGATIVO)** = ausência de
antígeno de criptocócico.



**RESULTADO REAGENTE
(POSITIVO)** = presença de
antígeno criptocócico.

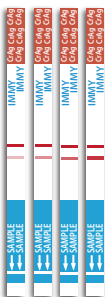


TESTE INVÁLIDO = não considerar o
resultado, repetir o teste.



DETERMINE TB LAM Ag - Abbott® (URINA)


**RESULTADO NÃO REAGENTE
(NEGATIVO)** = ausência do antígeno
lipoarabinomanano (LAM)

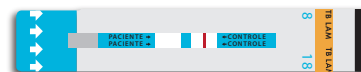

**RESULTADO REAGENTE
(POSITIVO)** = presença do antígeno
lipoarabinomanano (LAM)




TESTE INVÁLIDO = não considerar
o resultado, repetir o teste.

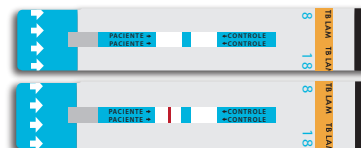


HISTOPLASMA Ag LFA - Miravista® (URINA)

**RESULTADO NÃO REAGENTE
(NEGATIVO)** = ausência de antígeno
de *Histoplasma capsulatum*

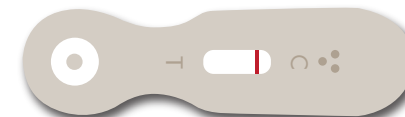

**RESULTADO REAGENTE
(POSITIVO)** = presença de antígeno
de *Histoplasma capsulatum*

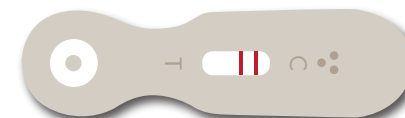

TESTE INVÁLIDO = não considerar
o resultado, repetir o teste.

