

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------|---------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | POP.UDI.007 – Página 1/2 | |
| Título do Documento | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE VESTIMENTAS DE CHUMBO | Emissão: 28/03/2022 | Próxima revisão: |
| | | Versão: 1 | 28/03/2024 |

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo geral

Padronizar a limpeza e desinfecção de equipamentos de proteção individual do tipo vestimentas de chumbo para uso na Unidade de Diagnóstico por Imagem.

1.2. Objetivo específico

Remover as sujidades e materiais orgânicos evitando ou diminuindo o risco de contaminação cruzada de pacientes ou contaminação da própria equipe assistencial e médica.

2. MATERIAL

- ✓ Luvas para limpeza de superfícies (ou multiuso), máscara, óculos de proteção, gorro, avental;
- ✓ Sabão neutro;
- ✓ Álcool 70%;
- ✓ Material desinfetante (desde que não seja abrasivo);
- ✓ Pano limpo.

OBS.: Seguir recomendações descritas no manual do fabricante da vestimenta de chumbo.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- ✓ Higienizar as mãos;
- ✓ Colocar os equipamentos de proteção (luvas para limpeza de superfícies (ou multiuso), máscara, óculos de proteção, gorro, avental);
- ✓ Retirar (com cuidado) as vestimentas de proteção (aventais e protetores de tireoide) e óculos plumbíferos (se aplicável);
- ✓ Com sabão líquido e água, umedecer o pano limpo e friccionar as superfícies das vestimentas de modo a cobrir toda a sua superfície;
- ✓ Para a remoção das sujidades e dos resíduos do sabão, enxaguar com pano limpo umedecido com água;
- ✓ Com um pano limpo e seco, secar completamente a superfície das vestimentas;
- ✓ Borrifar com solução desinfetante ou com álcool 70% toda a superfície das vestimentas;
- ✓ Friccionar com pano limpo e seco para a ação da solução ou do álcool;
- ✓ Lavar e secar as luvas multiuso e em seguida higienizar (de forma apropriada) as mãos;
- ✓ Posicionar (com cuidado) as vestimentas de proteção em seu devido lugar.

Cuidados adicionais com:

- Remoção deficiente dos resíduos de matéria orgânica e/o inorgânica resultando em dificuldade da ação do agente desinfetante;

| | | | |
|---------------------|---|--------------------------|---------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | POP.UDI.007 – Página 2/2 | |
| Título do Documento | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE VESTIMENTAS DE CHUMBO | Emissão: 28/03/2022 | Próxima revisão: |
| | | Versão: 1 | 28/03/2024 |

- Fratura da borracha plumbífera das vestimentas de proteção.

4. REFERÊNCIAS

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Norma CNEN-NE – 3.01: Diretrizes básicas de radioproteção. Rio de Janeiro, 2011;

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Resolução da Diretoria Colegiada nº 330. Brasília, Diário Oficial da União de 26 de dezembro de 2019 (RDC DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 330).

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
|--------|------------|-------------------------|
| 01 | 10/01/2022 | Elaboração do documento |

| | |
|--|-------------------------|
| Elaboração Jamerson Silva de Albuquerque Junior - Físico Médico – Radiodiagnóstico Marcela Paulino Moreira da Silva Queiroz – Enfermeira – Cardiologia - Hemodinâmica | Data: 10/01/2022 |
| Análise Xênia Sheila Barbosa Aguiar Queiroz (Técnica em enfermagem do SVSSP) | Data: 21/01/2022 |
| Validação Andréia Oliveira Barros Sousa (Chefe do SVSSP) | Data: 01/02/2022 |
| Aprovação Ana Maria Cabral Barbosa - Enfermeira, chefe da Unidade de diagnóstico por Imagem | Data: 10/01/2022 |