

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.DENF.060– Página 1/3	
Título do Documento	<b>LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE LARINGOSCÓPIO</b>	Emissão: 30/06/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 30/06/2027

## 1. OBJETIVOS

- Remover a sujidade e reduzir a carga microbiana presente na superfície dos artigos, para possibilitar a reutilização;
- Garantir o manuseio e utilização segura do material para assistência à saúde, diminuindo os riscos de infecção.

## 2. MATERIAL

- Equipamentos de Proteção Individual – EPI (luvas de procedimento, máscara cirúrgica e óculos de proteção);
- Bandeja
- Laringoscópio (cabo e lâmina) contaminado;
- Compressas limpas ou gazes não estéreis;
- Água;
- Sabão líquido;
- Álcool a 70%.

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 1º Higienizar as mãos (*PRT.CCIRAS.001*);
- 2º Reunir o material necessário;
- 3º Dispor os materiais sobre uma bancada limpa (sala de desinfecção de material);
- 4º Colocar os EPIs;
- 5º Retirar as pilhas do cabo do laringoscópio e reservá-las em um local limpo;
- 6º Desconectar as partes do laringoscópio: lâmina, cabo e lâmpada.

### 3.1. Cabo

- 1º Friccionar a parte externa do cabo com compressa úmida ensaboadada, até a remoção de toda a sujidade;
- 2º Remover o sabão com compressa úmida (apenas água);
- 3º Secar com uma compressa limpa;
- 4º Friccionar com álcool a 70% em toda a extensão por 30 segundos, o que se obtém com 3 aplicações sucessivas após a evaporação.

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.DENF.060– Página 2/3	
Título do Documento	<b>LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE LARINGOSCÓPIO</b>	Emissão: 30/06/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 30/06/2027

5º Repor as pilhas.

### 3.2. Lâmina

- 1º Retirar a lâmpada e limpar com uma compressa umedecida com solução à base de biguanida;
- 2º Friccionar todas as reentrâncias do equipamento com compressa úmida ensaboada, até a remoção de toda a sujidade;
- 3º Lavar com água corrente;
- 4º Secar com uma compressa limpa;
- 5º Friccionar com álcool a 70% em toda a extensão por 30 segundos, o que se obtém com 3 aplicações sucessivas após a evaporação.
- 6º Recolocar a lâmpada;
- 7º Retirar os EPIs e higienizar as mãos (*PRT.CCIRAS.001*);
- 8º Montar o laringoscópio e testar a funcionalidade do equipamento;
- 9º Armazenar as peças desmontadas em um local limpo
- 10º Higienizar as mãos (*PRT.CCIRAS.001*).

#### OBSERVAÇÕES:

- Conservar os laringoscópios limpos em caixas/recipientes com tampa, sobre o carro de emergência, para facilitar a conferência do seu funcionamento.
- Realizar a testagem de funcionamento e a desinfecção com álcool 70% dos laringoscópios limpos, concomitantemente, a cada plantão de trabalho. Registrar o teste de funcionamento, a desinfecção e, se for o caso, os problemas encontrados, em impresso próprio, com carimbo e assinatura do profissional.
- Sempre que houver manuseio do material (para checagem de funcionamento, por exemplo) com retirada da embalagem protetora, realizar desinfecção do conjunto (lâmina e cabo) com álcool a 70%.

## 4. REFERÊNCIAS

HU-UFGD. Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. Unidade de Vigilância em Saúde. Comissão de Controle de Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde. **PRT nº 01 Higiene das Mãos**. 11ª edição. Publicado no Boletim de Serviço nº 366 de 23/06/2023, Portaria nº 104 de 29/06/2023. Dourados, 2023. Disponível em: <<<https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hu-ufgd/aceso-a-informacao/pops-protocolos-e-processos/gad/prt-cciras-001-higiene-de-maos.pdf>>>. Acesso em: 03 de junho de 2025.



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.DENF.060– Página 3/3	
Título do Documento	<b>LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE LARINGOSCÓPIO</b>	Emissão: 30/06/2025	Próxima revisão: 30/06/2027
		Versão: 03	

HU-UFGD/EBSERH. Hospital Universitário - Universidade Federal da Grande Dourados/ Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Unidade de Vigilância em Saúde. Comissão de Controle de Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde. **Protocolo Limpeza e Desinfecção de Superfícies**. PRT.CCIRAS.014. Dourados: HU-UFGD/EBSERH, 2022.

Disponível em: < <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hu-ufgd/aceso-a-informacao/pops-protocolos-e-processos/gad/prt-cciras-014-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf>>. Acesso em: 03 de junho de 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE TOCANTINS – HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS /EBSERH. / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Divisão de Enfermagem.

**ROTINA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO LARINGOSCÓPIO**. POP. 018. Tocantins-2024. Disponível em: < <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-norte/hdt-uft/aceso-a-informacao/gestao-documental/pop-procedimento-operacional-padrao/divisao-de-enfermagem-1/pop-018-denf-rotina-de-limpeza-e-desinfeccao-do-laringoscopio.pdf/@@download/file/1000>>. Acesso em: 03 de junho de 2025.

## 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	07/10/2020	Elaboração do Procedimento/Rotina
02	15/08/2023	Revisão e atualização
03	04/06/2025	Revisão e atualização

<b>Elaboração</b> Stéphane Durand Santos	Data: 07/10/2020
<b>Revisão</b> Ely Bueno da Silva Bispo Shislene Espíndola Lopes	Data: 15/08/2023 Data: 04/06/2025
<b>Validação</b> Fuad Fayez Mahmoud - STGQ	Data: 26/06/2025
<b>Aprovação</b> Rodrigo Alexandre Teixeira – Chefe da DENF Tiago Amador Correia – Gerente de Atenção à Saúde	Data: 13/06/2025 Data: 30/06/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.008385/2025-66