

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACAP.096 – Página 1/4	
Título do Documento	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES PELO SISTEMA PARATEST	Emissão: 04/08/2026	Próxima revisão: 04/08/2028
		Versão: 01	

1. OBJETIVO(S)

- Padronizar os procedimentos de execução do exame parasitológico de fezes (EPF) pelo sistema parasitológico PARATEST.

2. MATERIAL

- Pedido médico;
- Amostras de fezes acondicionadas em frasco limpo, seco e sem adição de conservante;
- Luvas de procedimento;
- Frasco de PARATEST;
- Pá coletora;
- Microscópio;
- Lâmina;
- Lamínula de vidro;
- Lugol fraco;

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1. Orientações de coleta paciente ambulatorial ou posto de saúde

- 1º Orientar o paciente a higienizar as mãos com água e sabão e proceder a secagem antes de realizar a coleta da amostra. Indicar um local privado (banheiro) onde ele poderá coletar a amostra ou orientá-lo a colher em casa e entregar posteriormente;
- 2º Coletar a amostra em frasco de amostra limpo, seco e de boca larga;
- 3º Coletar uma única amostra no frasco ou três amostras de evacuações diferentes em dias seguidos (conservar de 5 a 10 ° C) em frascos distintos, conforme solicitação médica;
- 4º Encaminhar ao laboratório em até uma hora, podendo conservar em geladeira a 5 ° C, por um período de 24 horas;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACAP.096 – Página 2/4	
Título do Documento	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES PELO SISTEMA PARATEST	Emissão: 04/08/2026	Próxima revisão:
		Versão: 01	04/08/2028

- 5º Para criança que usa fralda, as fezes devem ser colhidas em saquinho coletor de urina, para evitar a absorção do material pela fralda, podendo ser mantidas e entregues no próprio saquinho;
- 6º Entregar para profissional do laboratório ou do posto de saúde a(s) amostra(s), que irão identificar o frasco com nome do paciente, data de nascimento e horário da coleta.

3.2. Orientação de coleta paciente internado

As orientações de coleta estão descritas no POP de Coleta de fezes para exames laboratoriais (POP.n^o 072 da DE).

3.3. Critérios de rejeição

- Amostra sem identificação ou identificação incorreta;
- Amostra sem solicitação médica;
- Amostra em coletor inadequado;
- Amostra mal conservada, não respeitando o prazo de entrega ou refrigeração (descrito na orientação de coleta);
- Amostra contaminada com urina, água do vaso sanitário ou com substâncias estranhas, como óleos.

3.4. Processamento da amostra

3.4.1. Sistema parasitológico PARATEST

- 1º Receber a amostra após coleta e conferir nome e dados do paciente com o pedido médico;
- 2º Cadastrar no sistema e encaminhar a amostra etiquetada e com a ordem de serviço ou lista de pendência do exame ao setor de parasitologia;
- 3º Abrir a embalagem do PARATEST, retirar o frasco e a pá coletora;
- 4º Identificar o frasco de PARATEST com o número do cadastro do SIL;
- 5º Abrir a tampa do frasco com cuidado para não derramar o líquido conservante;
- 6º Coletar a amostra (fezes) utilizando a pá coletora. Para amostras firmes, coletar duas (2) porções com o lado do cone. Em caso de diarreia, coletar seis (6) porções com o lado da colher;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACAP.096 – Página 3/4	
Título do Documento	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES PELO SISTEMA PARATEST	Emissão: 04/08/2026	Próxima revisão:
		Versão: 01	04/08/2028

- 7º Colocar a pá coletora com as fezes dentro do frasco e liberar as mesmas com o auxílio do pino extrator presente no fundo do frasco;
- 8º Descartar a pá coletora em lixo comum, depois da utilização;
- 9º Após colocar a quantidade indicada de fezes fechar o frasco girando a tampa com cuidado;
- 10º Com o frasco fechado, agitá-lo até homogeneizar as fezes com o líquido conservante;
- 11º Colocar o frasco na posição invertida em uma grade ou suporte para sedimentação, deixar sedimentar pelo tempo mínimo de 30 minutos;
- 12º A partir de 30 minutos gotejar uma gota do sedimento sobre a lâmina, acrescentar uma gota de Lugol e dispor uma lamínula por cima;
- 13º Levar as lâminas prontas ao setor de leitura junto com a lista ou ordem de serviço do paciente;
- 14º Realizar a leitura das lâminas no microscópio nos aumentos de 100x e 400x (analista clínico).

3.5. Resultados e Laudos

- O resultado pode ser negativo caso não seja encontrado ovos ou larvas de helmintos, cistos e trofozoítos de protozoários. Se o resultado for positivo, o laudo deve conter o nome do parasita e a forma encontrada (ovo, cisto, trofozoíto);
- Anotar o resultado na ordem de serviço ou lista de pacientes e entregar no setor de digitação, para que insiram os resultados no sistema do laboratório;
- Conferir se os resultados inseridos no sistema estão de acordo com o anotado e liberar o resultado (analista clínico).

3. REFERÊNCIAS

COREN-DF. Técnica de coleta de fezes para exames. Brasília: Coren-DF, 2012. Disponível em: <https://coren-df.gov.br/site/wp-content/uploads/2012/03/manuaisesdf.pdf>.

NEVES, D.P.; A. L; LINARDI, P.M; VITOR, A. R Parasitologia Humana. 11ª ed. São Paulo – SP: Atheneu, 2005.

DK DIAGNOSTICS. **Instruções de uso – Família Paratest®**. 2025. Disponível em: <https://dkdiagnostics.com/wp-content/uploads/2025/09/instrucoes-de-uso-familia-paratest-AE0rRJ7WB7iak8e5.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2026.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACAP.096 – Página 4/4	
Título do Documento	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES PELO SISTEMA PARATEST	Emissão: 04/08/2026	Próxima revisão: 04/08/2028
		Versão: 01	

4. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	21/07/2026	Elaboração do POP

Elaboração Evellyn Keury Gonzales Maldonado Sibin Wellington Sordi	Data: 21/07/2026
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 04/08/2026
Aprovação Viviane Regina Noro – Chefe da UACAP Tiago Amador Correia – Gerente de Atenção à Saúde	Data: 27/07/2026 Data: 04/08/2026

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.011454/2026-08