

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UCM.049 – Página 1/2	
Título do Documento	LIMPEZA EXTERNA DA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE	Emissão: 07/10/2024 Versão: 03	Próxima revisão: 07/10/2026

1. OBJETIVO

- Padronizar a limpeza externa da máquina após término da hemodiálise.

2. MATERIAIS

- Equipamentos de Proteção Individual (Máscara, Luvas e Óculos);
- Sabão;
- Água;
- 02 Compressas;
- 01 frasco de Biguanida.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 1º. Higienizar as mãos conforme PRT. CCIRAS. 001;
- 2º. Reunir todo o material necessário;
- 3º. Calçar luvas, colocar óculos de proteção e máscara;
- 4º. Realizar a limpeza das superfícies com movimento único;
- 5º. Seguir a limpeza do local mais limpo para o mais sujo;
- 6º. Limpar com uma compressa umedecida com água e sabão, removendo a sujidade;
- 7º. Limpar toda a superfície das máquinas e osmose com uma compressa umedecida com desinfetante biguanida;
- 8º. Registrar o procedimento no AGHU.

4. REFERÊNCIAS

APECIH – Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar. Monografia: **Limpeza, Desinfecção de Artigos e Áreas Hospitalares e Anti-sepsia**. São Paulo, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 40 de 05 de junho de 2008. Aprova o **Regulamento técnico para Produtos de Limpeza e Afins harmonizado no âmbito do Mercosul através da Resolução GMC nº 47/07**. Diário Oficial da União [da União da República Federativa do Brasil], Brasília, 06 jun. 2008.

TORRES, S.; LISBOA, T. **Gestão dos Serviços de Limpeza, Higiene e Lavanderia em Estabelecimentos de Saúde**. São Paulo: Sarvier, 3 ed., 2008.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UCM.049 – Página 2/2	
Título do Documento	LIMPEZA EXTERNA DA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE	Emissão: 07/10/2024 Versão: 03	Próxima revisão: 07/10/2026

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	05/05/2016	Elaboração do documento
02	18/06/2021	Revisão do POP. Alteração do Layout.
03	28/06/2024	Revisão do POP.

Elaboração Giselia Paula de Araujo Raimundo – Enfermeira	Data: 05/05/2016
Revisão Fatima Aparecida Balbino e Rafaele Carla Pivetta de Araujo – 2ª versão Giselia Paula de Araujo Raimundo – Enfermeira Nefrologista – 3ª versão	Data: 06/07/2021 Data: 28/06/2024
Validação Graciela Mendonça dos Santos Bet – Chefe do STGQ em exercício	Data: 07/10/2024
Aprovação Rafael Souza Ferreira – Chefe Substituto da UCM Tiago Amador Correia – Gerente de Atenção à Saúde	Data: 23/09/2024 Data: 07/10/2024

Assinado Eletronicamente no Processo SEI nº 23529.015625/2021-55.