

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UDE.004 – Página 1/3	
Título do Documento	REGISTRO DE AMOSTRAS DE PACIENTES EM PLANILHA	Emissão: 09/07/2026	Próxima revisão: 09/07/2028
		Versão: 02	

1. OBJETIVO

Estabelecer padronização para os registros de amostras dos pacientes na planilha de registro de amostra da agência transfusional (AT).

2. MATERIAL

- Computador com acesso à internet;
- Planilha da AT;
- Caneta esferográfica azul;
- Caneta para retroprojeto;

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Registrar a amostra do paciente no Registro de Amostra de Pacientes na planilha da Agência Transfusional, seguindo a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016.

3.1 Dados do registro obrigatório da amostra

- Número da amostra: A numeração será referente ao local de armazenamento na estante de tubo;
- Data e horário da coleta da amostra;
- Responsável pela coleta;
- Validade da amostra: Segundo Portaria Nº 158 Art. 175, de 4 de fevereiro de 2016, as amostras para exames pré-transfusionais terão validade de 72 horas;
- Prontuário do paciente;
- Nome do paciente: Deve conter o nome completo do paciente, sem abreviações;
- ABO/RhD – Prova Direta e Prova Reversa: Para os testes com reações positivas usar a titulação por cruzeiros (1+, 2+, 3+, 4+) de acordo com o grau de reatividade ou em caso de dupla população (DP), quando o paciente fez uso de CH diferente do seu grupo ABO.
- ABO/RhD: Resultado da classificação do paciente. Os resultados devem seguir o padrão estabelecido na tabela abaixo:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UDE.004 – Página 2/3	
Título do Documento	REGISTRO DE AMOSTRAS DE PACIENTES EM PLANILHA	Emissão: 09/07/2026	Próxima revisão: 09/07/2028
		Versão: 02	

Tabela 1 - Padrão para liberação da classificação ABO/RhD.

A Positivo	A Positivo
A Negativo	A Negativo
B Positivo	B Positivo
B Negativo	B Negativo
AB Positivo	AB Positivo
AB Negativo	AB Negativo
O Positivo	O Positivo
O Negativo	O Negativo
ABO Indeterminado	ABO Indeterminado
RH Indeterminado	RH Indeterminado

Fonte: próprio autor.

- D Fraco: Deverá ser feito o teste de D Fraco em todo pacientes com Rh Negativo; para os testes com reações positivas usar a titulação por traços ou cruces (Traços, 1+, 2+, 3+, 4+) de acordo com o grau de reatividade e para testes negativos (Negativo);
- Pesquisa de Identificação de Anticorpos Irregulares (PAI I, PAI II E Di^a): Para os testes com reações positivas usar a titulação por traços ou cruces (Traços, 1+, 2+, 3+, 4+) de acordo com o grau de reatividade e para testes negativos (Negativo);
- Teste da Antiglobulina Direto (TAD): Deverá ser feito o TAD em menores de 4 meses, em reações trasfusionais e em casos de incompatibilidades entre doador e receptor; para os testes com reações positivas usar a titulação por traços ou cruces (Traços, 1+, 2+, 3+, 4+) de acordo com o grau de reatividade e para testes negativos (Negativo);
- Autocontrole (AC): Deverá ser feito em casos de reações trasfusionais e em incompatibilidade entre doador e receptor; para os testes com reações positivas usar a titulação por traços ou cruces (Traços, 1+, 2+, 3+, 4+) de acordo com o grau de reatividade e para testes negativos (Negativo);
- Responsável pelo exame;
- Responsável técnico.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UDE.004 – Página 3/3	
Título do Documento	REGISTRO DE AMOSTRAS DE PACIENTES EM PLANILHA	Emissão: 09/07/2026	Próxima revisão: 09/07/2028
		Versão: 02	

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação nº5**, de 28 de setembro de 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **RDC nº 34**, de 11 de junho de 2014.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	02/10/2023	Elaboração do documento.
02	19/04/2026	Revisão do documento.

Elaboração: Janaína Carlem Amorim Mário Murackami Junior	Data: 02/10/2023
Revisão: Geovan Narciso Mendes	Data: 19/04/2026
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 08/07/2026
Aprovação Leonora Correa da Costa de Marchi – Chefe da UDE Tiago Amador Correia – Gerente de Atenção à Saúde	Data: 29/06/2026 Data: 09/07/2026

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.000425/2024-41