

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UDE.018 – Página 1/2	
Título do Documento	HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS TÉRMICAS DE COLETA E TRANSPORTE	Emissão: 09/07/2026	Próxima revisão: 09/07/2028
		Versão: 02	

1. OBJETIVO

- Padronizar a limpeza das caixas térmicas de coleta e transporte.

2. RESPONSABILIDADES

- Técnico de laboratório, biomédico e farmacêutico.

3. MATERIAL

- Sabão neutro
- Esponja
- Álcool 70%
- Papel Toalha
- Hipoclorito 2%

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Calçar as luvas;
- Ensaboar com água corrente e sabão comum toda a superfície interna da caixa, utilizando uma esponja exclusiva para este fim;
- Ensaboar a superfície externa da caixa;
- Enxaguar bem em água corrente as paredes internas e externas;
- Secar com pano limpo e seco;
- Passar pela 1ª vez álcool a 70% no interior da caixa e esperar secar;
- Repetir a operação do item anterior por mais 2 vezes;
- Na presença de material orgânico (sangue) proceder da seguinte forma:
 - ✓ Retirar excesso com papel toalha;
 - ✓ Lavar com água e sabão neutro;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UDE.018 – Página 2/2	
Título do Documento	HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS TÉRMICAS DE COLETA E TRANSPORTE	Emissão: 09/07/2026	Próxima revisão: 09/07/2028
		Versão: 02	

- ✓ Colocar solução de hipoclorito 2%;
- ✓ Remover hipoclorito com água corrente;
- ✓ Secar com pano limpo e seco;
- Registrar em planilha específica do serviço;
- A limpeza deverá ser realizada mensalmente conforme escala estabelecida;
- A desinfecção da caixa térmica deverá ser feita diariamente, após o uso, com álcool 70%.

5. REFERÊNCIAS

HIRATA, M. H.; MANCINI FILHO, J. Manual de Biossegurança. **Ed. Manole**: 2002;

SANTORO, M. I. R. M. **Manual de Segurança**. Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, 1985.

Handbook of Laboratory Safety – CRC Press, Boca Raton, 1971, 2a ed. **Manual de Biossegurança da USP**.

6. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	01/11/2023	Elaboração do documento.
02	19/04/2026	Revisão do documento.

Elaboração: Mario Murackami Jr Tabata Branquinho de Albuquerque	Data: 12/10/2023
Revisão: Geovan Narciso Mendes	Data: 19/04/2026
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 08/07/2026
Aprovação Leonora Correa da Costa de Marchi – Chefe da UDE Tiago Amador Correia – Gerente de Atenção à Saúde	Data: 29/06/2026 Data: 09/07/2026

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.000425/2024-41