



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UDE.019 – Página 1/2	
Título do Documento	HIGIENIZAÇÃO DO BANHO-MARIA NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	Emissão: 24/01/2024	Próxima revisão: 24/01/2026
		Versão: 01	

1. OBJETIVO

Padronizar a limpeza do banho-maria.

2. RESPONSABILIDADES

Técnico de laboratório, biomédico e farmacêutico.

3. MATERIAL

- Água;
- Água deionizada;
- Sabão neutro ;
- Álcool 70%;
- Papel toalha.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Calçar as luvas;
- Retirar a água;
- Realizar a limpeza com água e sabão neutro;
- Passar álcool a 70% dentro da superfície do banho-maria e deixar em contato por 15 minutos;
- Secar com papel toalha;
- Preencher o banho-maria com água deionizada;
- Registrar a limpeza na ata;
- A limpeza deverá ser realizada semanalmente.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UDE.019 – Página 2/2	
Título do Documento	HIGIENIZAÇÃO DO BANHO-MARIA NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	Emissão: 24/01/2024	Próxima revisão: 24/01/2026
		Versão: 01	

5. REFERÊNCIAS

HIRATA, M. H.; MANCINI FILHO, J. Manual de Biossegurança. **Ed. Manole**: 2002;

SANTORO, M. I. R. M. **Manual de Segurança**. Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, 1985.

Handbook of Laboratory Safety – CRC Press, Boca Raton, 1971, 2a ed. **Manual de Biossegurança da USP**.

6. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	01/11/2023	Elaboração de documentação

Elaboração : Mario Murackami Jr Janaina Carlem Amorim	Data: 12/10/2023
Análise Leonora Correa da Costa De Marchi – UDE Daniel Salas Steinbaum – RT da Agência Transfusional e chefe da DCDT	Data: 07/12/2023 Data: 11/01/2024
Validação: Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 22/01/2024
Aprovação: Thiago Gonçalves Coura – Chefe da UDE (substituto) Jean Wilson Mota – Chefe do STDT Tiago Amador Correia – Gerente de Atenção à Saúde	Data: 11/01/2024 Data: 22/01/2024 Data: 24/01/2024

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.000425/2024-41