

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| | | | |
|---------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | POP.UHH.025 –Página 1 de 2 | |
| Título do Documento | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA VESTIMENTA PLUMBÍFERA | Emissão: 09/04/2020 | Próxima revisão: 09/04/2020 |
| | | Versão: 1 | |

OBJETIVO(S)

1. Remover as sujidades e resíduos de matéria orgânica para prevenção e controle de infecção cruzada ao paciente, ou profissionais.

MATERIAL

1. Detergente Neutro;
2. Panos de limpeza (tipo perfex);
3. Desinfetante de superfícies (Surfanios);
4. EPI necessários:
 - 4.1 Luvas látex AMARELA
 - 4.2 Máscara descartável
 - 4.3 Óculos;
 - 4.4 Touca descartável.

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
Diariamente ao final de cada turno

1. Higienizar as mãos.
2. Utilizar EPI.
3. Borrifar solução diluída de Desinfetante de superfícies (Surfanios) em pano limpo e aplicar em sentido único em toda a superfície da vestimenta plumbífera (frente e verso).
4. Aguardar 15 min para efeito de ação do desinfetante de superfície;
5. Lavar e secar as luvas utilizadas para a realização da limpeza e desinfecção e posterior remoção das mesmas.
6. Realizar a higienização das mãos.

Semanalmente durante a limpeza terminal da Unidade, ou após uso por paciente de isolamento

1. Higienizar as mãos.
2. Utilizar EPI.
3. Retirar do suporte as vestimentas plumbíferas: avental plumbífero e protetor de tireoides, colocar sobre a mesa de apoio.
4. Friccionar as superfícies das vestimentas plumbíferas (frente e verso) com pano limpo umedecido com solução de detergente neutro.
5. Enxaguar com pano limpo umedecido com água para remoção de sujidades e resíduos de detergente neutro.
6. Secar completamente toda a superfície com pano limpo e seco.
7. Borrifar solução diluída de Desinfetante de superfícies (Surfanios) em pano limpo e aplicar em sentido único em toda a superfície da vestimenta plumbífera (frente e verso).
8. Aguardar 15 min para efeito de ação do desinfetante de superfície;
9. Fazer a desinfecção do suporte;
10. Lavar e secar as luvas utilizadas para a realização da limpeza e desinfecção e posterior remoção das mesmas.
11. Realizar a higienização das mãos.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| | | | |
|---------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | POP.UHH.025 –Página 2 de 2 | |
| Título do Documento | LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA VESTIMENTA PLUMBÍFERA | Emissão: 09/04/2020 | Próxima revisão: 09/04/2020 |
| | | Versão: 1 | |

12. Posicionar verticalmente a vestimenta plumbífera no suporte sem dobrar;

13. Realizar desinfecção da mesa de apoio.

CUIDADOS ESPECIAIS

1. Não dobrar a vestimenta plumbífera durante a limpeza.
2. Em caso de alguma não conformidade comunicar a supervisão do serviço de limpeza e higienização e a funcionária dos serviços gerais deverá utilizar luvas e aventais descartáveis.

REFERÊNCIAS

Manual de limpeza e desinfecção de superfícies – ANVISA;

HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
|---------|------|------------------------|
| 01/2020 | | |

| | |
|---|------------|
| <p>Elaboração:</p> <p>Denise Maria dos Santos Teodoro - Chefe da Unidade de Hotelaria Hospitalar do HUWC</p> <p>Geovania Maciel de Souza - Enfermeira</p> <p>Luciana Vlândia Carvalhêdo Fragoso – Enfermeira</p> <p>Germana Perdigão Amaral – Enfermeira</p> <p>Nirlanda de Oliveira Viana - Assistente Administrativo</p> <p>Hélcio Fonteles Tavares Da Silveira - Chefe da Unidade de Diagnóstico por Imagem</p> | 15/04/2020 |
| <p>Análise:</p> <p>Paula Manuela Rodrigues Pinheiro Bertocini, coordenadora Serviço de Avaliação e Monitoramento da Qualidade.</p> | 15/04/2020 |
| <p>Aprovação:</p> <p>Claudia Sebastiana da Silva -Chefe do Setor de Hotelaria Hospitalar do HUWC/MEAC</p> | 15/04/2020 |
| <p>Validação:</p> <p>Setor de Controle de Infecção Hospitalar</p> | 15/04/2020 |