



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE			
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		POP.ENF-CME.019 – Página 1/2
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PROTETOR FACIAL E/OU ÓCULOS DE PROTEÇÃO - COVID-19		Emissão: 12/05/2020
Executante:	Auxiliares e/ou Técnicos de enfermagem		Próxima revisão: 12/05/2022
Frequência:	Sob demanda		
			Versão: 1

1. OBJETIVO(S)

- ✓ Realizar limpeza e desinfecção de material não crítico e reutilizáveis (protetor facial e/ou óculos de proteção);

2. MATERIAL

- Água e sabão / Preparação alcoólica a 70%;
- Detergente enzimático;
- Compressa não estéril;
- Desinfetante - Surfianos[®] (cloreto de didecildimetilamônio e cloridrato de polihexametileno biguanida);
- Esponja (não abrasiva);
- Saco plástico (embalagem);
- Etiquetas adesivas (identificação);
- Caneta;
- Lixeira com trampa acionada por pedal.

Equipamento de proteção individual - EPI

- Sapato fechado impermeável;
- Avental de manga longa impermeável e descartável;
- Máscara N95 ou PFF2;
- Protetor facial ou óculos de proteção;
- Gorro;
- Luva nitrílica de cano longo;

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:

- 3.1. Higienizar as mãos, conforme POP.SCIH.001 – HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS;
- 3.2. Reunir o material necessário;
- 3.3. Higienizar as mãos, conforme POP.SCIH.003 - FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA;
- 3.4. Paramentar-se com EPI (aventil impermeável, máscara N95 ou PFF2, protetor facial ou óculos de proteção, gorro, e luva nitrílica de cano longo);
- 3.5. Imergir protetores faciais e/ou óculos de proteção em solução de detergente enzimático durante 5 minutos;
- 3.6. Enxaguar protetores faciais e/ou óculos de proteção com água abundante;
- 3.7. Lavar protetores faciais e/ou óculos de proteção com detergente enzimático, utilizando a esponja (não abrasiva);
- 3.8. Enxaguar protetores faciais e/ou óculos de proteção com água abundante;
- 3.9. Secar protetores faciais e/ou óculos de proteção com compressa não estéril (retirando o excesso de água);
- 3.10. Borrifar todas as superfícies dos protetores faciais e/ou óculos de proteção com solução de Surfianos[®] e deixar a solução agir por 10 minutos;

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.ENF-CME.019 – Página 2/2	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PROTETOR FACIAL E/OU ÓCULOS DE PROTEÇÃO - COVID-19	Emissão: 12/05/2020	Próxima revisão: 12/05/2022
Executante:	Auxiliares e/ou Técnicos de enfermagem		
Frequência:	Sob demanda	Versão: 1	

- 3.11. Secar totalmente os protetores faciais e/ou óculos de proteção com compressa não estéril;
- 3.12. Acondicionar os protetores faciais e/ou óculos de proteção em saco plástico (embalagem);
- 3.13. Identificar o pacote de protetores faciais e/ou óculos de proteção, com etiquetas adesivas (identificação) com: identificação do material, setor de origem, data, nome e carimbo do profissional da CME;
- 3.14. Encaminhar o pacote de protetores faciais e/ou óculos de proteção para o Arsenal;
- 3.15. Retirar EPI (avental impermeável, luva nitrílica, máscara N95 ou PFF2, protetor facial ou óculos de proteção e gorro);
- 3.16. Higienizar as mãos, conforme POP.SCIH.003 - FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA;
- 3.17. Registrar o procedimento em planilha de produção de limpeza/desinfecção de termossensíveis;
- 3.18. Descartar o material em local adequado;
- 3.19. Manter setor limpo e organizado;
- 3.20. Higienizar as mãos.

4. CUIDADOS ESPECIAIS

- Não utilizar a face áspera da esponja para lavagem do protetor facial e óculos de proteção;
- Atentar para limpeza e secagem das articulações de protetor facial e/ou óculos de proteção;
- Comunicar ao enfermeiro (a) da CME, nos casos de recebimento de protetores faciais e/ou óculos de proteção danificados, sem identificação do setor de origem e demais intercorrências.

5. REFERÊNCIAS

1. Recomendações relacionadas ao fluxo de atendimento para pacientes com suspeita ou infecção pelo COVID- 19 em procedimentos cirúrgicos e endoscópicos – SOBECC. São Paulo, 2020.
2. MIRANDA, Ana Maria Ferreira de; QUINTINO, Ana Paula Neves; CALICCHIO, Ligia Garrido; MARTINS, Luciana; SILVA, Maria Virginia Godoy da; BANDEIRA, Ornilda Bezerra; SANTOS, Rosa Regina dos. NOTA técnica coronavírus e CME: emissão inicial 28 de março de 2020. São Paulo: NASCE/CME, 2020. 43p. Disponível em: <http://nascecme.com.br/2014/wp-content/uploads/2020/03/NotaT%C3%A9cnica-Anexos-28-03-2020-17h45.pdf>.

6. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO