

# POP

HUAB - UFRN/EBSERH

## PREPARO DE CAIXA PARA DISSECÇÃO VENOSA

Versão: 03 | 2024

## 1 OBJETIVO

Preparo e esterilização seguindo racionalidade, padronização, padrão das necessidades técnicas, controle e revisão de instrumentos, identificação do profissional que preparou e esterilizou, com respectivas datas.

## 2 MATERIAL

- 01 Folha de SMS medindo 1,00m x 1,00m para embalar tipo pacote;
- 01 Folha de SMS medindo 1,0m x 1,0m, para envelopar;
- Caixa cirúrgica perfurada com tampa – cesto quadrado;
- 01 indicador químico grau V ou VI;
- Fita branca;
- Fita teste;
- Caneta piloto de cor azul ou preta;
- Etiqueta;
- Carimbo;
- Grau Cirúrgico;
- Seladora.

### Instrumentais:

- 01 cabo de bisturi nº 03;
- 01 cuba redonda;
- 02 afastadores Farabeuf baby – 10cm;
- 01 porta-agulha Mayo-Hegar – pequeno – 12cm;
- 01 pinça Adson com dente;
- 01 pinça Adson sem dente;
- 01 pinça micro relojoeiro curva – 10cm;
- 03 pinças Kelly curvas mosquito – 10cm;
- 02 pinças Kelly retas mosquito – 10cm;
- 02 pinças Allis pequenas – 12cm;
- 01 pinça Collin-coração;
- 01 tesoura de Mayo reta pequena – 14cm;

- 01 tesoura de Metzenbaum curva pequena – 14cm;
- 01 tesoura de Íris reta;
- 01 tesoura de Íris curva.

**TOTAL: 20 instrumentais.**

### 3 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Conferir os instrumentais quanto à limpeza e revisão de pinças danificadas, testando para ver necessidade de substituição e envio para manutenção;
- Montar a caixa com as pinças abertas;
- Colocar o indicador químico, identificado com o nome da caixa;
- Envolver a caixa com 02 folhas, sendo a interna dobrada com a técnica de pacote (conforme o POP nº 044) e a externo em TNT, dobrado com a técnica de envelope, conforme o POP nº 007;
- Fechar o pacote com fita branca, envolvendo todo o pacote, até ultrapassar no mínimo 3cm do encontro da fita, vendo a necessidade de repetir este processo para garantir o fechamento;
- Repetir o processo com a fita teste, no sentido perpendicular à fita branca;
- Cortar grau cirúrgico com tamanho suficiente para possibilitar sua abertura de forma asséptica, selando uma das extremidades;
- Acondicionar, a caixa no grau cirúrgico e fechar com seladora;
- Etiquetar a embalagem do artigo com as seguintes informações: nome do produto, assinatura do preparador;
- Quando for esterilizar, completar os dados com nº de lote, data de esterilização e data de validade (carimbo).

### 4 REFERÊNCIAS

SOBECC. **Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Central de Material e Esterilização**; 6ed. São Paulo: Manole, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). **Diretrizes de Práticas em Enfermagem Cirúrgica e Processamento de produtos para a Saúde**. 7 Ed. São Paulo, 2017.

## 5 HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
01	22/04/2017	Versão inicial.
02	19/07/2019	Revisão do POP
03	16/07/2024	Atualização de Bibliografia - Revisão

## 6 RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

<p><b>Elaboração</b></p> <p>Marcelo de Medeiros Lucena, Enfermeiro Assistencial – UBCME</p> <p>Maria das Vitorias do Nascimento Lima, Técnico de Enfermagem - UBCME</p> <p>Suécia dos Santos Maia, Técnico de Enfermagem - UBCME</p> <p>Maria da Conceição dos Santos, Técnico de Enfermagem - UBCME</p>	Data: 22/04/2017
<p><b>Análise</b></p> <p>Lidianny Michelle da Silva Pontes, Enfermeiro Assistencial - UMUL</p>	Data: 19/07/2019
<p>Marcelo de Medeiros Lucena, Enfermeiro Assistencial – UBCME</p> <p>Marcio Adriano da Motta, Enfermeiro Assistencial - UBCME</p> <p>Maria das Vitorias do Nascimento Lima, Técnico de Enfermagem - UBCME</p> <p>Suécia dos Santos Maia, Técnico de Enfermagem - UBCME</p> <p>Maria da Conceição dos Santos, Técnico de Enfermagem - UBCME</p>	Data: 16/07/2024
<p><b>Validação técnica</b></p> <p>Vanessa Freire Maia, STGQ/SUP</p> <p>Setor de Gestão da Qualidade</p>	Data: 28/11/2024
<p><b>Aprovação</b></p> <p>Rita Berenice da Silva Costa, UBCME/GAS</p> <p>Chefe da Unidade de Bloco Cirúrgico e Material Esterilizado</p>	Data: 28/11/2024



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
Praça Tequinha Farias, nº 13 - Bairro Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000  
- <http://huab-ufrn.ebserh.gov.br>

### Certidão

Processo nº 23527.006694/2024-31

Interessado: @interessados\_virgula\_espaco@

<p><b>Elaboração</b></p> <p>Marcelo de Medeiros Lucena, Enfermeiro Assistencial – UBCME</p> <p>Maria das Vitórias do Nascimento Lima, Técnico de Enfermagem - UBCME</p> <p>Suécia dos Santos Maia, Técnico de Enfermagem - UBCME</p> <p>Maria da Conceição dos Santos, Técnico de Enfermagem - UBCME</p>	Data: 22/04/2017
<p><b>Análise</b></p> <p>Lidianny Michelle da Silva Pontes, Enfermeiro Assistencial - UMUL</p>	Data: 19/07/2019
<p>Marcelo de Medeiros Lucena, Enfermeiro Assistencial – UBCME</p> <p>Marcio Adriano da Motta, Enfermeiro Assistencial - UBCME</p> <p>Maria das Vitórias do Nascimento Lima, Técnico de Enfermagem - UBCME</p> <p>Suécia dos Santos Maia, Técnico de Enfermagem - UBCME</p> <p>Maria da Conceição dos Santos, Técnico de Enfermagem - UBCME</p>	Data: 16/07/2024
<p><b>Validação técnica</b></p> <p>Vanessa Freire Maia, STGQ/SUP</p> <p>Setor de Gestão da Qualidade</p>	Data: 28/11/2024
<p><b>Aprovação</b></p> <p>Rita Berenice da Silva Costa, UBCME/GAS</p> <p>Chefe da Unidade de Bloco Cirúrgico e Material Esterilizado</p>	Data: 28/11/2024



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Adriano da Motta, Enfermeiro(a)**, em 28/11/2024, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria das Vitórias do Nascimento Lima, Técnico(a) em Enfermagem**, em 11/12/2024, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Suécia dos Santos Maia, Técnico(a) em Enfermagem**, em 14/12/2024, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Medeiros Lucena, Enfermeiro(a)**, em 08/01/2025, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Da Conceicao Dos Santos, Técnico(a) em Enfermagem**, em 22/01/2025, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Rita Berenice da Silva Costa, Chefe de Unidade**, em 01/04/2025, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Lidianny Michelle da Silva Pontes, Enfermeiro(a)**, em 09/07/2025, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Franciane Carla de Souza Bento, Assistente Administrativo**, em 10/07/2025, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **44673749** e o código CRC **2F748229**.

---