

POP

HUAB - UFRN/EBSERH

PREPARO DE CAIXA DE PERINEOPLASTIA

Versão: 03 | 2024

1 OBJETIVO

Preparo seguindo racionalidade, padronização, unificação das necessidades técnicas, controle e revisão de instrumentos, incluindo identificação.

2 MATERIAL

- 01 Campo de algodão simples medindo 1,50x 1,50m ou 01 folha de SMS gramatura pesada medindo 1,50 x 1,50m, para empacotar tipo pacote;
- 01 folha de TNT gramatura pesada medindo 1,50 x 1,50m, para envelopar;
- Caixa cirúrgica perfurada com tampa – grande;
- 01 indicador químico grau IV ou V;
- Fita branca;
- Fita teste;
- Caneta de cor azul ou preta;
- Etiqueta;
- Carimbo.

Instrumentais:

- 01 cabo de bisturi nº 04;
- 01 cuba redonda;
- 02 afastadores Farabeuf;
- 02 porta-agulhas Mayo-Hegar – médio;
- 04 pinças de campo;
- 01 pinça de dissecação com dente;
- 01 pinça de dissecação sem dente;
- 08 pinças Allis do mesmo tamanho;
- 03 pinças Kelly curvas;
- 02 pinças Kelly retas;
- 01 pinça Cheron;
- 01 pinça Pozzi;
- 01 pinça Collin coração;
- 01 tesoura de Mayo reta;
- 01 tesoura de Metzenbaun curva.

TOTAL: no mínimo 30 instrumentais.

Materiais opcionais:

- 01 Válvula de Doyan;
- 02 Agulhas Sling.

3 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Paramentar-se de acordo com o indicado no POP nº 046;
- Conferir os instrumentais quanto à limpeza e revisão de pinças danificadas, testando para ver necessidade de substituição e envio para manutenção;
- Montar a caixa com as pinças abertas, exceto as pinças de campo e pozzi;
- Colocar a gaze na cuba, se a instituição não utilizar pacote estéril;
- Colocar o indicador químico, identificado com o nome da caixa;
- Envolver a caixa com 02 campos, sendo o interno em algodão dobrado com a técnica de pacote (conforme o POP nº 044) e o externo em TNT, dobrado com a técnica de envelope, conforme o POP nº 007;
- Fechar o pacote com fita branca, envolvendo todo o pacote, até ultrapassar no mínimo 3cm do encontro da fita, vendo a necessidade de repetir este processo para garantir o fechamento;
- Repetir o processo com a fita teste, no sentido perpendicular à fita branca;
- Etiquetar a embalagem do artigo com as seguintes informações: nome do produto, assinatura do preparador;
- Identificar com nome da caixa, assinatura, nº de lote, data de esterilização e data de validade ao esterilizar o produto.

4 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). **Diretrizes de Práticas em Enfermagem Cirúrgica e Processamento de produtos para a Saúde**. 7 Ed. São Paulo, 2017, 2017.

SOBECC. **Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Central de Material e Esterilização**; 6ed. São Paulo: Manole, 2013.

5 HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
01	22/04/2017	Versão inicial.
02	28/03/2019	Revisão do POP
03	18/07/2024	Atualização de Bibliografia - Revisão

6 RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração Maria das Vitórias do Nascimento Lima - UBCME/GAS Lidianny Michelle da Silva Pontes - UMUL/GAS Marcelo de Medeiros Lucena - UBCME/GAS Marcio Adriano da Motta - UBCME/GAS Suécia dos Santos Maia – UBCME/GAS	Data: 18/07/2024
Análise Marcio Adriano da Motta - UBCME/GAS	Data: 18/07/2024
Validação Wilton Nogueira de Abreu – STGQ/SUP Franciane Carla de Souza Bento – STGQ/SUP	Data: 24/04/2025
Aprovação Rita Berenice da Silva Costa - UBCME/GAS	Data: 18/07/2024

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins lucrativos. © Ano 2024, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados www.ebserh.gov.br



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Praça Tequinha Farias, nº 13 - Bairro Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
- <http://huab-ufrn.ebserh.gov.br>

Certidão

Processo nº 23527.006694/2024-31

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Elaboração Maria das Vitórias do Nascimento Lima - UBCME/GAS Lidianny Michelle da Silva Pontes - UMUL/GAS Marcelo de Medeiros Lucena - UBCME/GAS Marcio Adriano da Motta - UBCME/GAS Suécia dos Santos Maia – UBCME/GAS	Data: 18/07/2024
Análise Marcio Adriano da Motta - UBCME/GAS	Data: 18/07/2024
Validação Wilton Nogueira de Abreu – STGQ/SUP Franciane Carla de Souza Bento – STGQ/SUP	Data: 24/04/2025
Aprovação Rita Berenice da Silva Costa - UBCME/GAS	Data: 18/07/2024



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Adriano da Motta, Enfermeiro(a)**, em 15/07/2025, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Suécia dos Santos Maia, Técnico(a) em Enfermagem**, em 15/07/2025, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Medeiros Lucena, Enfermeiro(a)**, em 15/07/2025, às 13:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lidianny Michelle da Silva Pontes, Enfermeiro(a)**, em 21/07/2025, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rita Berenice da Silva Costa, Chefe de Unidade**, em 25/07/2025, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria das Vitórias do Nascimento Lima, Técnico(a) em Enfermagem**, em 09/09/2025, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Franciane Carla de Souza Bento, Assistente Administrativo**, em 10/09/2025, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **51343559** e o código CRC **48963ACA**.