

POP

HUAB - UFRN/EBSERH

PREPARO DE CAIXA CIRÚRGICA SIMPLES DE MAMA

Versão: 03 | 2024

1 OBJETIVO

Preparo e esterilização seguindo racionalidade, padronização, padrão das necessidades técnicas, controle e revisão, identificação do profissional que preparou, com datas de esterilização e de validade.

2 MATERIAL

- 01 Campo de algodão simples medindo 1,50x 1,50m ou 01 folha de SMS gramatura pesada medindo 1,50 x 1,50m, para empacotar tipo pacote;
- 01 folha de SMS gramatura pesada medindo 1,50 x 1,50m, para envelopar;
- Caixa cirúrgica perfurada com tampa – grande;
- 01 indicador químico grau V ou VI;
- Fita branca;
- Fita teste;
- Etiqueta.

Instrumentais:

- 02 pinças Kelly Curva 14cm;
- 01 cabo de bisturi nº 03;
- 01 porta-agulha Mayo-Hegar;
- 01 pinça Adson com dente;
- 01 pinça Adson sem dente;
- 02 pinça backaus;
- 02 pinças Allis pequena;
- 01 pinça Babcock – 15cm;
- 01 tesoura de Mayo reta 14cm;
- 01 tesoura Metzenbaum reta;
- 01 pinça Cheron
- 01 par de farabeuf delicado;
- **01 par Afastador Farabeuf 27 cm x 16 cm;**
- **01 par de Gancho de Guilles;**
- 01 cuba redonda.

TOTAL: no mínimo 22 instrumentais.

3 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Conferir os instrumentais quanto à limpeza e revisão de pinças danificadas, testando para ver necessidade de substituição e envio para manutenção;
- Montar a caixa com as pinças abertas, exceto as pinças de campo;
- Colocar o indicador químico, identificado com o nome da caixa;
- Envolver a caixa com 02 campos, sendo o interno em algodão ou SMS dobrado com a técnica de pacote (conforme o POP nº 044) e o externo em SMS, dobrado com a técnica de envelope, conforme o POP nº 007;
- Fechar o pacote com fita branca, envolvendo todo o pacote, até ultrapassar no mínimo 3cm do encontro da fita, vendo a necessidade de repetir este processo para garantir o fechamento;
- Repetir o processo com a fita teste, no sentido perpendicular à fita branca;
- Etiquetar a embalagem do artigo com as seguintes informações: nome do produto, assinatura do preparador;
- Quando for esterilizar, completar os dados com nº de lote, data de esterilização e data de validade.

4 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). **Diretrizes de Práticas em Enfermagem Cirúrgica e Processamento de produtos para a Saúde**. 7 Ed. São Paulo, 2017

SOBECC. **Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Central de Material e Esterilização**; 6ed. São Paulo: Manole, 2013.

5 HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
01	21/04/2017	Versão inicial.
02	13/08/2019	Revisão do POP
03	05/08/2024	Atualização de Bibliografia - Revisão

6 RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração Maria das Vitorias do Nascimento Lima – UBCME/GAS Marcio Adriano da Motta – UBCME/GAS Suécia dos Santos Maia – UBCME/GAS Marcelo de Medeiros Lucena – UBCME/GAS Maria da Conceição dos Santos – UBCME/GAS	Data: 05/08/2024
Análise Lidianny Michelle da Silva Pontes – UMUL/GAS Natália Filgueira da Silva – UBCME/GAS	Data: 05/08/2024
Validação Vanessa Freires Maia – STGQ/SUP	Data: 16/01/2024
Aprovação Rita Berenice Da Silva Costa – UBCME/GAS	Data: 16/01/2024



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Praça Tequinha Farias, nº 13 - Bairro Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
- <http://huab-ufrn.ebserh.gov.br>

Certidão

Processo nº 23527.006694/2024-31

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Elaboração Maria das Vitorias do Nascimento Lima – UBCME/GAS Marcio Adriano da Motta – UBCME/GAS Suécia dos Santos Maia – UBCME/GAS Marcelo de Medeiros Lucena – UBCME/GAS Maria da Conceição dos Santos – UBCME/GAS	Data: 05/08/2024
Análise Lidianny Michelle da Silva Pontes – UMUL/GAS Natália Filgueira da Silva – UBCME/GAS	Data: 05/08/2024
Validação Vanessa Freires Maia – STGQ/SUP	Data: 16/01/2024
Aprovação Rita Berenice Da Silva Costa – UBCME/GAS	Data: 16/01/2024



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Adriano da Motta, Enfermeiro(a)**, em 20/01/2025, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Natália Filgueira da Silva, Enfermeiro(a)**, em 21/01/2025, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Suécia dos Santos Maia, Técnico(a) em Enfermagem**, em 22/01/2025, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo de Medeiros Lucena, Enfermeiro(a)**, em 22/01/2025, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria das Vitórias do Nascimento Lima, Técnico(a) em Enfermagem**, em 22/01/2025, às 19:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rita Berenice da Silva Costa, Chefe de Unidade**, em 01/04/2025, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lidianny Michelle da Silva Pontes, Enfermeiro(a)**, em 09/07/2025, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maysa Máglá Medeiros Nóbrega, Enfermeiro(a)**, em 12/07/2025, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Franciane Carla de Souza Bento, Assistente Administrativo**, em 23/07/2025, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46132843** e o código CRC **2181B0EA**.
