

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA		POP. UPS.015 - Página 1/2	
Título do Documento	LAVAGEM, ESTERILIZAÇÃO ODONTOLÓGICOS	ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS	E	Emissão: MARÇO 2019 Versão: 02
				Próxima revisão: MARÇO 2021

1. OBJETIVO(S):

- a. Normatizar a desinfecção e esterilização de materiais no Hospital Universitário Ana Bezerra.

2. MATERIAIS:

- a. Detergente, recipiente vazado, papel crepado e autoclave.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- a. Fazer a pré-lavagem dos instrumentos com água quente ou fria e, posteriormente, a imersão completa dos artigos em cesto vazado de recipiente com tampa, com solução desincrustante química ou enzimática. Após o tempo e imersão recomendado pelo fabricante, procede-se a fricção manual com escova de cerdas de nylon macias;
- b. Posteriormente retira-se o cesto vazado com os instrumentos que devem ser levados para a lavagem em água corrente e para a remoção total do detergente utilizado;
- c. Os instrumentos devem ser secos com jato de ar comprimido em grande fluxo e volume. O jato de ar oferece a vantagem de secar as articulações e as áreas inacessíveis às toalhas absorventes;
- d. Embalar em papel crepado mantendo o instrumento estéril até que seja desempacotado para o uso;
- e. Após todos os procedimentos executados pelo esquema geral de esterilização, o material estará preparado para ser introduzido na autoclave para a esterilização propriamente dita. O tempo varia de acordo com o tipo de embalagem e da natureza do material que se deseja esterilizar. O tempo máximo, quando do uso de uma embalagem mais volumosa, será de 30 minutos.

4. REFERÊNCIAS

- LIMA, Sérgio N. M. Caderno científico: esquema geral de esterilização. Central de recirculação de material. ribeirão preto, dabi atlante, 2001;
- BRASIL, Ministério da saúde. Agência nacional de vigilância sanitária. Consulta pública n.º 64, de 20 de dezembro de 2011. Brasília, 2011.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA		POP. UPS.015 - Página 2/2	
Título do Documento	LAVAGEM, ESTERILIZAÇÃO ODONTOLÓGICOS	ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS	Emissão: MARÇO 2019	Próxima revisão: MARÇO 2021
			Versão: 02	

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	15.03.19	Adaptação às normas atualizadas da EBSERH

ELABORAÇÃO	REVISÃO
Dentista Iran Siqueira Pereira Dentista Osvaldo Marques Bezerra Júnior Dentista Raissa Afonso da Costa Dentista Viviane Fernandes de Medeiros TSB Monica Sueli de Lima TSB Renata de Souza Medeiros Data: 20/03/2019	
VALIDAÇÃO	ASSINATURA
Maria Diane Braga Dantas Monteiro Enfermeira – SGQVS Data: 16/12/2019 João Maria Rego Mendes Enfermeiro-SGQVS 25/06/2020	<i>João Maria Rego Mendes</i>
APROVAÇÃO	ASSINATURA
Rita Berenice da Silva Costa Chefe Substituta da Unidade de Pronto Socorro e Pronto Atendimento Data: 16/12/2019	Rita Berenice da Silva Costa COREN-RN 111.079-ENF <i>Rita Berenice da Silva Costa</i>