

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP. UPS.021 – Página 1/4	
Título do Documento	<b>EXECUÇÃO DO TESTE RÁPIDO DE HIV</b>	Emissão: 06/02/2020	Próx. ma revisão: 06/02/2022
		Versão: 1	

### 1. OBJETIVO(S)

- Favorecer a amamentação o mais precoce possível;
- Garantir a segurança da equipe na assistência materno-fetal.

### 2. MATERIAL

- Algodão;
- Álcool;
- Caneta;
- Lanceta;
- Luvas de procedimento;
- Pipeta ou capilar;
- Plataforma de coleta de sangue(teste rápido);
- Reagente HIV;
- Termo de consentimento Livre e Esclarecido.

### 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Explicar a gestante o que é Teste rápido HIV, sua importância e o procedimento de coleta;
- Apresentar o Termo de consentimento Livre e Esclarecido a Gestante, e posterior assinatura. Em caso da mesma ser menor de idade, pedi para o seu responsável assinar;
- Abrir o kit de Teste rápido Bioeasy alere, MedTest HIV ou AÇON . Certificar-se da sua validade e coloração da sílica que vem em cada kit. Descartar o teste caso observe mudança na coloração da sílica de amarelo para verde;
- Calçar luvas de procedimento;
- Limpar a área a ser lancetada utilizando algodão embebido com álcool 70%;
- Aguardar secar o álcool;
- Pegar a lanceta girar e puxar a tampa para abrir;

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UPS.021 – Página 2/4	
Título do Documento	<b>EXECUÇÃO DO TESTE RÁPIDO DE HIV</b>	Emissão: 06/02/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 06/02/2022

- Aperte a extremidade final do dedo;
- Encostar a lanceta no dedo de escolha da paciente e apertar o botão para disparar a agulha, a mesma realizará um furo no dedo que aonde será coletado o sangue;
- Pegar a pipeta encostar-se ao sangue e coletar a amostra de sangue até a marca preta sinalizada na pipeta. Caso a coleta seja feita com o capilar, deve-se preencher todo o capilar com a amostra de sangue;
- Colocar imediatamente a amostra no poço do dispositivo de teste e acionar 4 gotas do diluente para HIV (Para o teste rápido da marca Bioeasy alere). Caso a marca do teste seja, MedTest HIV, colocar 2 gotas do diluente. Caso a marca do teste seja, ABON, colocar 2 gotas do diluente. O Teste ABON tem em cada KIT um diluente de uso individual e único;
- Após colocar o diluente na amostra de sangue no dispositivo de teste, identifique a plataforma de coleta com as iniciais da gestante e com o horário de interpretação do resultado;
- Pegue um algodão seco e faça uma leve compressão sobre o dedo lancetado da gestante;
- Descarte o material de coleta no recipiente apropriado.

### 3.1 Interpretação dos resultados:

- Interpretar o resultado entre 10 a 20 minutos. Não interpretar antes de 10 minutos ou após 20 minutos.
- Uma linha colorida aparecerá do lado esquerdo da janela de resultados indicando que o teste está funcionando corretamente. Esta linha é a Linha Controle (C). Esta linha deve aparecer em todos os testes. Caso não apareça, o teste é considerado INVÁLIDO.
- Resultado Não reagente: Quando aparecer somente uma linha colorida na janela de resultados, a Linha Controle "C".
- Resultado Reagente para HIV 1 : Presença de duas linhas coloridas na janela de resultados, Linha Controle "C" e Linha Teste "T1", independente de qual linha aparecer primeiro.
- Resultado Reagente para HIV 2 : Presença de duas linhas coloridas na janela de resultados, Linha Controle "C" e Linha Teste "T2", independente de qual linha aparecer primeiro.
- Resultado Reagente para HIV 1 e HIV2 : Presença de três linhas coloridas na janela de resultados, Linha Controle "C" e Linha Teste "T1" e Teste "T2", independente de qual linha aparecer primeiro.

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP. UPS.021 – Página 3/4	
Título do Documento	<b>EXECUÇÃO DO TESTE RÁPIDO DE HIV</b>	Emissão: 06/02/2020	Próxima revisão: 06/02/2022
		Versão: 1	

- Em caso de resultado reagente para HIV, comunicar o laboratório, para realização do Teste Rápido 2 para HIV: Chamar a paciente em lugar privativo, informar o resultado e entregar uma cópia do exame. Se necessário conduzir a gestante ao laboratório para realização do Teste Rápido 2 para HIV.
- Anexar a cópia original do resultado do teste rápido HIV ao prontuário.

### 3.2 Ações em caso de não conformidade e observações importantes:

- Não utilizar após a data de validade (o prazo de validade do kit é indicado na parte externa de sua embalagem).
- Manter no envelope lacrado até a utilização.
- Conservar o kit armazenado em temperatura de 2°C a 30°C.
- Para assegurar que a reação ocorra corretamente, é fundamental não mexer no dispositivo de teste antes do término da reação.
- A leitura desse dispositivo após o tempo recomendado de 20 minutos trará um resultado errôneo e por isso após o tempo determinado o dispositivo de teste deverá ser descartado.

## 4. REFERÊNCIAS

Kit de testes rápidos HIV: MedTest HIV [bula de medicamentos] Responsável técnico Glauco Araújo carlos. Serre: Med Levensoh; 2019.

## 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

ELABORAÇÃO	REVISÃO
Luisiane Almeida de Araújo Lopes Enfermeira Heloísa Cristina Ferreira de Lima Enfermeira Rosiane de Lima Macêdo Pires Tec. Enfermagem Data: 06/02/2020	Luisiane Almeida de Araújo Lopes Enfermeira Heloísa Cristina Ferreira de Lima Enfermeira Rosiane de Lima Macêdo Pires Tec. Enfermagem Data: 06/02/2020

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UPS.021 – Página 4/4	
Título do Documento	<b>EXECUÇÃO DO TESTE RÁPIDO DE HIV</b>	Emissão: 06/02/2020	Próxima revisão: 06/02/2022
		Versão: 1	

VALIDAÇÃO	ASSINATURA
<p>Maria Diane Braga Dantas Monteiro Enfermeira – SGQVS Data: 01/03/2020 João Maria Rego Mendes Enfermeiro-SGQVS 22/06/2020</p>	<p><i>João Maria Rego Mendes</i></p>
APROVAÇÃO	ASSINATURA
<p>Rita Berenice da Silva Costa Enfermeira Chefe substituto da Unidade de Pronto Socorro e Atendimento Data:09/06/2020</p>	<p>Rita Berenice da Silva Costa COREN-RN 111.079-ENF <i>Rita Berenice da S. Costa</i></p>