

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO / ROTINA | POP.ULACC.005 - Página 1/3 | |
| Título do Documento | IMUNOHEMATOLOGIA - TESTE DE HCV | Emissão: 21/05/2020 Versão: 2 | Próxima revisão:21/05/22 |

1. OBJETIVO(S)

Estabelecer procedimentos realizados para o processamento das amostras biológicas através do teste imunocromatográfico rápido para determinação qualitativa de anticorpos específicos anti-HCV em soro e plasma.

2. MATERIAL

- Amostra soro/plasma recente límpido;
- Cassete (conservar entre 2°C a 30°C);
- Pipeta automática para 10 µl;
- Diluente de Ensaio.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

1. Todas as amostras devem estar à temperatura ambiente (20°C a 25°C), antes de realizar o teste;
2. Retirar o cassete (dispositivo de teste) da embalagem protetora, colocá-la sobre uma superfície limpa e nivelada, e identificá-la de forma adequada (iniciais do nome ou número de cadastro do paciente);
3. Transferir 10 µl de soro ou plasma para dentro do poço da amostra;
4. Segure verticalmente o frasco do diluente de ensaio e adicione quatro gotas no poço da amostra;
5. Aguardar a formação das linhas;
6. Interpretar os resultados entre 5 a 20min. Não interpretar após 20min. **Leituras tardias podem induzir resultados falsos.**

4. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1. Teste Reagente:

Formação de 2 linhas vermelhas, uma na região controle (C) e uma na região teste (T) após 5 minutos. Não interpretar após 20 minutos.

4.2. Teste Não Reagente:

Formação de 1 linha vermelha, na região controle (C) e ausência completa de linha na região teste (T) após 5 minutos. Não interpretar após 20 minutos.

HUAB / EBSERH / UFRN
Cópia Controlada
SGQVS
Santa Cruz
Em, 23/12/2020

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO / ROTINA | POP.ULACC.005 - Página 2/3 | |
| Título do Documento | IMUNOHEMATOLOGIA - TESTE DE HCV | Emissão: 21/05/2020 | Próxima revisão:21/05/22 |
| | | Versão: 2 | |

4.3. Teste Inválido:

A ausência de formação de linha vermelha na região controle (C) indica erro no procedimento ou deterioração do cassete. Neste caso, repetir o teste utilizando novo cassete.

5. MANUAL TÉCNICO PARA O DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELO HCV:

O teste de HCV é destinado para uso profissional, somente para teste de triagem inicial e as amostras reativas devem ser confirmadas por um ensaio suplementar tal como ELISA.

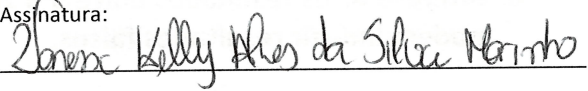
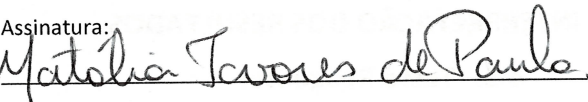
6. REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatites B e Coinfecções/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

Manual de Teste de HCV. ALERE, 2017.

7. HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
|--------|------|------------------------|
| | | |

| | |
|---|---|
| Elaboração Nome: Vanessa Kelly Alves da Silva Marinho Siape: 2167501 Função: Farmacêutica Bioquímica Nome: Natália Tavares de Paula Siape: 2994115 Função: Bióloga | Data: 21/05/2020 Assinatura:  |
| | Assinatura:  |
| Revisão Nome: SIAPE: | Data: ___/___/____ Assinatura: _____ |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO / ROTINA | POP.ULACC.005 - Página 3/3 | |
| Título do Documento | IMUNOHEMATOLOGIA - TESTE DE HCV | Emissão: 21/05/2020 | Próxima revisão: 21/05/22 |
| | | Versão: 2 | |

| | |
|--|--|
| Função: | |
| Validação Nome: Cilene A. D. Petronio Setor de Vigilância em Saúde HUAB/EBSERH Mat. 2158164 Função: Membro do SGQVS | Data: <u>23/12/2020</u> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Carlla Cilene A. D. Petronio Chefe do Setor de Vigilância em Saúde HUAB/EBSERH Mat. 2158164 |
| Aprovação Nome: Maria das Graças M. Carlos SIAPE: 2169683 Função: Chefe do Setor de Diagnóstico e Imagem | Data: <u>23/12/2020</u> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Maria das Graças M. Carlos Chefe do Setor de Diagnóstico e Imagem HUAB-UFFR/EBSERH SIAPE: 2169683 |

