

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.022.001 - Página 1/3	
Título do Documento	COLETA DE SWAB PARA SUSPEITA DE COVID-19 OU H1N1	Emissão: 27/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 27/04/2022

1. OBJETIVO(S)

Coleta da amostra de swab de naso e orofaringe e envio ao laboratório LACEN/RN.

2. EXECUTANTE

Técnico de Laboratório do ULAC HUAB.

3. Paramentação do coletador:

- a) Máscara N95 ou FFP2;
- b) Capote descartável Impermeável ;
- c) Luvas;
- d) Óculos de proteção;
- e) Face shield;
- f) Touca.

4. Material de coleta:

- a) 3 (três) unidades de Swab de Rayon;
- b) 1 (um) Tubo cônico descartável de plástico transparente, volume de 15ml, com tampa de rosca, estéreis, contendo o meio de transporte viral (Solução de HANKS).
- c) Caixa isotérmica ou isopor com gelo reciclável para transporte do meio viral (que deverá ser mantido congelado até o momento da coleta do material).

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- a) Após o preenchimento da fixa de notificações pela equipe médica e de enfermagem, conforme fluxo no Link: <http://portalcovid19.huab.ebserh.net/notificacao-covid-19/> na Intranet HUAB;
- b) Retirar o meio de transporte do congelador e aguardar, pelo menos, cinco minutos para o descongelamento do meio e rotular a amostra no tubo de transporte (solução de hanks).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.022.001 - Página 1/3	
Título do Documento		COLETA DE SWAB PARA SUSPEITA DE COVID-19 OU H1N1	Emissão: 27/04/2020 Versão: 1
			Próxima revisão: 27/04/2022

- c) Deverão ser colhidos 3 (três) swabs de rayon sendo 1 nasofaringe direito, 1 nasofaringe esquerdo e 1 orofaringe;
- d) Introduzir o swab de rayon em cada cavidade nasal (cerca de 5 cm), direcionando para cima (direção dos olhos), com uma angulação de 30 a 45° em relação ao lábio superior. Após a introdução, esfregar o swab com movimentos circulares delicados, pressionando-o contra a parede lateral do nariz (em direção a orelha do paciente);
- e) Remover o swab do nariz do paciente e introduzi-lo imediatamente no meio de transporte (Solução de Hanks);
- f) Colher o terceiro swab na área posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar na língua.
- g) Após a coleta, inserir os três swabs em um **MESMO FRASCO** contendo o meio de transporte viral.

Obs: Em virtude do desabastecimento no mercado de swabs Rayon, a coleta deverá ser realizada utilizando apenas 2 SWABS, 1 para nasofaringe (colher em sequência das duas narinas) e 1 Swab para orofaringe.

- h) Fazer cadastro no GAL contendo nome do paciente, data e hora de coleta (caso suspeito do nCov2019, deverá ser cadastrado Influenza e Vírus respiratórios e na observação descrever **CASO SUSPEITO**);
- i) Enviar para laboratório LACEN/RN o material coletado em temperatura adequada de refrigeração (4°C a 8°C), preferencialmente no mesmo dia e, excepcionalmente, por um período **não superior a 48 horas**;
- j) As amostras devem ser acompanhadas de notificação <http://bit.ly/notificaCOVID19> e com a solicitação médica.

6. REFERÊNCIAS

ANVISA, Guia de Vigilância Epidemiológica para Infecção Humana pela COVID-19, COE/SVS/MS Abr. 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.022.001 - Página 1/3	
Título do Documento	COLETA DE SWAB PARA SUSPEITA DE COVID-19 OU H1N1	Emissão: 27/04/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 27/04/2022

1. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

<p>Elaboração: Vanessa Kelly Alves da Silva Marinho (Matrícula: 2167501 - Farmacêutica). Natália Tavares de Paula (Matrícula: 2994115 – Bióloga).</p>	<p>Data: 27/04/2020. <i>Vanessa Kelly Alves da Silva Marinho</i> CRF: 2678 MAT. 2167501 <i>Natália Tavares de Paula</i> Natalia Tavares de Paula CRBio 99.914/05 - D HUAB / UFRN / EBSERH SIARE 2994115</p>
<p>Validação: Carlla Cilene Alves Dantas Petronio</p>	<p>Data: 08/06/2020 <i>Carlla</i> Carlla Cilene A. D. Petronio Chefe do Setor de Vigilância em Saúde HUAB/EBSEH Mat. 2158184</p>
<p>Aprovação: Lana Rose Cortez de Farias</p>	<p>Data: 08/06/2020 <i>Lana Rose</i> Lana Rose Cortez de Farias Enfermeira COREN - RN 97.482</p>