



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.STHH.034 - Página 1/3	
Título do Documento	HIGIENIZAÇÃO DO FREEZER DE LEITE MATERNO PASTEURIZADO	Emissão: 27/03/2024 Versão: 02	Próxima revisão: 27/03/2026

1. OBJETIVO(S)

- Manter o controle de qualidade do freezer de Leite Materno Pasteurizado (LMP)

2. QUEM

- Lactarista

3. MATERIAL

- Esponja de limpeza
- Detergente líquido neutro
- Pano de limpeza multiuso descartável (pano de limpeza)
- Álcool a 70º GL
- Tabela de Controle de Temperaturas durante o processo de Higienização do Freezer de LMP

LMP

- Tabela de Registro dos Frascos de LMP

4. FREQUÊNCIA

- Quinzenalmente (a cada 15 dias)

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Desligar o freezer de LMP;
- Transferir imediatamente todos os frascos de LMP para a parte do freezer da geladeira de apoio, organizando-os conforme os volumes indicados;
- Retirar as gavetas do freezer e transferi-las para Área de Higienização do lactário, mantendo o guichê FECHADO;
- Deixar a porta do freezer aberta;
- Esperar o degelo de possíveis resíduos no freezer (intervalo de tempo de 1 hora);
- Lavar cada gaveta com água e detergente líquido neutro na área de higienização;
- Secar cada gaveta com pano de limpeza multiuso descartável (pano de limpeza);
- Após o degelo do freezer, realizar sua higienização com água e detergente líquido neutro;
- Retirar o excesso de detergente com pano de limpeza multiuso descartável (pano de limpeza), umedecido com água;
- Secar o freezer com pano de limpeza multiuso descartável (pano de limpeza) limpo;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.STHH.034 - Página 1/3	
Título do Documento	HIGIENIZAÇÃO DO FREEZER DE LEITE MATERNO PASTEURIZADO	Emissão: 27/03/2024 Versão: 02	Próxima revisão: 27/03/2026

- Transferir as gavetas do freezer para Área de Preparo do lactário, manter o guichê FECHADO;
- Finalizar o processo com a desinfecção utilizando pano de limpeza multiuso descartável (pano de limpeza) limpo e álcool a 70º GL na parte interna do freezer e gavetas;
- Organizar todas as gavetas no freezer;
- Fechar a porta do freezer;
- Solicitar à equipe de ASG do plantão a higienização geral da Área de Preparo do lactário;
- Ligar o freezer na tomada, somente APÓS a higienização da Área de Preparo do lactário;
- Esperar a temperatura interna no freezer indicar valor NEGATIVO, registrando na **Tabela de controle de temperaturas** a hora e a temperatura indicadas;
- Observar e registrar na **Tabela de controle de temperaturas** a hora e temperatura FINAL indicadas no freezer da geladeira de apoio;
- Transferir imediatamente todos os frascos de LMP para o freezer higienizado, organizando-os conforme os volumes indicados;
- Conferir simultaneamente os códigos e volumes dos frascos de LMP durante o armazenamento para atualização do saldo de frascos de LMP no lactário, conforme a **Tabela de registro dos frascos de LMP (fornecida pela nutricionista)**;
- Solicitar avaliação e assinatura do nutricionista do plantão ao finalizar o processo de higienização do freezer de LMP.

6. REFERÊNCIAS

- Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Higiene e Conduta: Ambiente. Adaptado. BLH-IFT/NT – 14.04 fevereiro: 200

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.STHH.034 - Página 1/3	
Título do Documento	HIGIENIZAÇÃO DO FREEZER DE LEITE MATERNO PASTEURIZADO	Emissão: 27/03/2024 Versão: 02	Próxima revisão: 27/03/2026

7. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	27/05/23	Implantação do POP de Higienização do freezer de LMP
02	27/03/24	Alteração na descrição dos procedimentos do POP de higienização do freezer de LMP

<p>Elaboração</p> <p>Kalogênia Niedja Lopes Almeida Nutricionista Responsável Técnica pelo Lactário SIAPE: 3091011</p> <p>Soraya Helena Penha do Nascimento Função: Nutricionista SIAPE: 1283282</p>	Assinatura eletrônica via SEI
<p>Revisão</p> <p>Kalogênia Niedja Lopes Almeida Nutricionista Responsável Técnica pelo Lactário SIAPE: 3091011</p>	Assinatura eletrônica via SEI
<p>Validação</p> <p>Vanessa Freires Maia Setor de Gestão da Qualidade</p>	Assinatura eletrônica via SEI
<p>Aprovação</p> <p>Amanda Umbelino Trigueiro Bezerra Chefe do Setor de Hotelaria Hospitalar</p>	Assinatura eletrônica via SEI

Certidão

Processo nº 23527.006822/2024-46

Interessado: Setor de Gestão da Qualidade

Certidão de assinaturas eletrônicas correspondente ao documento POP.STHH.034

POP HIGIENIZAÇÃO DO FREEZER DE LEITE MATERNO PASTEURIZADO

<p>Elaboração</p> <p>Nome: Kalogênia Niedja Lopes Almeida Função: Nutricionista Responsável Técnica pelo Lactário SIAPE: 3091011</p> <p>Nome: Soraya Helena Penha do Nascimento Função: Nutricionista SIAPE: 1283282</p>	<p>ELETRÔNICA VIA SEI</p>
<p>Revisão</p> <p>Nome: Kalogênia Niedja Lopes Almeida Função: Nutricionista Responsável Técnica pelo Lactário SIAPE: 3091011</p>	<p>ELETRÔNICA VIA SEI</p>
<p>Validação</p> <p>Vanessa Freires Maia Setor de Gestão da Qualidade</p>	<p>ELETRÔNICA VIA SEI</p>
<p>Aprovação</p> <p>Amanda Umbelino Trigueiro Bezerra Chefe do Setor de Hotelaria Hospitalar</p>	<p>ELETRÔNICA VIA SEI</p>



Documento assinado eletronicamente por **Amanda Umbelino Trigueiro Bezerra, Chefe de Setor**, em 24/09/2024, às 08:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Freires Maia, Enfermeiro(a)**, em 26/09/2024, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42600747** e o código CRC **EABE0ADA**.