

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UBCME.031 - Página 1/4	
Título do Documento	<b>PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE FRESA RÍGIDA</b>	Emissão: 20/05/2025 Versão: 02	Próxima revisão: 20/05/2027

## 1. OBJETIVOS

- Padronizar condutas relacionadas ao uso do indicador de limpeza em termodesinfectora;
- Realizar o monitoramento do processo de limpeza da termodesinfectora;
- Detectar falhas no processo de limpeza como ação mecânica insuficiente, carga inadequada, tempo/temperatura insuficientes, detergente mal dosado ou ineficaz, má qualidade de água;
- Garantir a limpeza adequada dos materiais em termodesinfectora.

## 2. MATERIAL

- Roupa privativa;
- Luvas de procedimento;
- Avental impermeável manga longa;
- Óculos de proteção ou Face shield;
- Máscara cirúrgica;
- Gorro/Touca;
- Sapato impermeável fechado;
- Teste de limpeza;
- Suporte específico para o teste de limpeza;
- Termodesinfectora;
- Cola/fita desiva;
- Livro de registro das cargas.

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Lavar/higienizar as mãos antes e após as atividades conforme PRT.SCIRAS.001 de 2024;
- Paramentar-se utilizando os equipamentos de proteção individual – EPI (POP.UBCME.001);



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UBCME.031 - Página 2/4	
Título do Documento	<b>PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE FRESA RÍGIDA</b>	Emissão: 20/05/2025 Versão: 02	Próxima revisão: 20/05/2027

- Realizar pré limpeza, utilizando água sob pressão na superfície da fresa elúmen, retirando o excesso de sujidade, se existir (POP.UBCME.018);
- Realizar flush (jato com pressão) da solução de detergente enzimático, utilizando a seringa, permitindo, assim, a ação detergente sobre a parede do lúmen, (POP.UBCME.013);
- Realizar imersão da fresa na solução de detergente enzimático, observar se o lúmen foi totalmente preenchido e aguardar o tempo de contato preconizado pelo fabricante do detergente;
- Realizar fricção com escovas apropriadas (cerdas macias, porém firmes) para cada fresa do sentido proximal (porca) para o distal, tanto na superfície como no lúmen (sentido vaie vem) até que visivelmente não evidencie a presença de resíduo;
- Realizar o enxágue com jato de água sob pressão;

### 3.2 Lavadora Ultrassônica

- Realizar pré limpeza, utilizando água sob pressão na superfície da fresa e lúmen, retirando o excesso de sujidade, se existir (POP.UBCME.018);
- Acoplar a fresa no luer lock da lavadora ultrassônica;
- Iniciar o ciclo limpeza para materiais canulados;
- Realizar enxague abundante da fresa flexível com água corrente após otérmino do ciclo;
- Realizar inspeção rigorosa da limpeza e na presença de sujidade realizar fricção com escovas apropriadas e proceder com enxague;
- Encaminhar a fresa para área de secagem.

## 4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012 . **Dispõe sobre requisitos de boas praticas para o processamento de produtos para a saúde e da outras providências.** Diário oficial da união, Brasília, DF, 2012.

MEDEIROS, M.J. L., DANTAS, V.P. C. **Protocolo Higienização das Mãos.** PTR.SCIRAS.001. EBSERH/ HULW, 2024.

CHAVES, B.J.P. et al. **POP.UBCME.013: Limpeza Manual de Material Canulado.** EBSERH/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2025.

CHAVES, B.J.P. et al. **POP.UBCME.018: Pré lavagem de instrumentais.** EBSERH/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2022.



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UBCME.031 - Página 3/4	
Título do Documento	<b>PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE FRESA RÍGIDA</b>	Emissão: 20/05/2025 Versão: 02	Próxima revisão: 20/05/2027


CHAVES, B.J.P. et al. **POP.UBCME.001: Paramentação e desparamentação no exurgo da CME.** EBSERH/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2022.

## 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	16/05/2022	Elaboração do Documento.
2	20/05/2025	Revisão do documento.



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UBCME.031 - Página 4/4	
Título do Documento	<b>PROCEDIMENTO DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE FRESA RÍGIDA</b>	Emissão: 20/05/2025 Versão: 02	Próxima revisão: 20/05/2027

<b>Elaboração</b> Carlos Cesar Silva Alves Bruna Raquel R. Araújo Bruna Ferreira Dos Santos Diana Nunes Da Silva Jacqueline Maria B. Pereira Izaura Cleone F Dos Santos Cadete Emanuella A. Da Silva Carvalho Bárbara Jeane P. Chaves Suzanna Valéria O. De Sousa Vanessa Carreiro Paulino Valéria Patrícia De Souza e Silva Queiroz Adriando De Lima Furtado	Data: 20 / 05 / 2025
<b>Revisão</b> Vanessa Carreiro Paulino	Data: 18 / 06 / 2025
<b>Validação</b> Alecsandro da Rocha – Enfermeiro Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente  <b>ALECSANDRO DA ROCHA:02035089476</b> Assinado de forma digital por ALECSANDRO DA ROCHA:02035089476 Dados: 2025.07.24 18:39:03 -03'00'	Data: 25/06/2025
<b>Aprovação</b>  Documento assinado digitalmente <b>FERNANDA RAQUEL ALVES DE LIMA FERREIRA</b> Data: 31/07/2025 12:33:48-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	Data:

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte