



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.AT.015 - Página 1/3	
Título do Documento	CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO (TESTE DE PROFICIÊNCIA)	Emissão: 02/09/2019 Versão: 3	Próxima revisão: 02/09/2021

1. OBJETIVO

Contribuir para a garantia da qualidade dos resultados dos testes imunohematológicos obtidos na rotina da Agência Transfusional e, conseqüentemente, aumento da segurança transfusional.

2. MATERIAL

- Planilha de Controle de Qualidade Externo enviado pelo HEMOPE;
- Caneta piloto;
- Caneta;
- Tubos de acrílico transparentes;
- Pipetas automáticas 50mL e 100mL;
- soro fisiológico 0,9% (salina);
- Reagentes anti-A, anti-B, anti-D;
- Controle Rh;
- Reagentes Revercerll A1 e B;
- Reagentes Triacell I e II;
- Coombs Poliespecífico;
- Albumina bovina a 22%.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1. CQE – Classificação Sanguínea – Prova Direta

Seguir POP/AT/007/2019 – Testes Pré-Transfusionalis - Classificação Sanguínea (Prova Direta) para as amostras 1, 2, 3 e 4 preenchendo a ficha enviada pelo órgão do Controle de Qualidade Externo.

3.2. CQE – Classificação Sanguínea - Prova Reversa

Seguir POP/AT/007/2019 – Testes Pré-Transfusionalis - Classificação Sanguínea (Prova



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.AT.015 - Página 2/3	
Título do Documento	CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO (TESTE DE PROFICIÊNCIA)	Emissão: 02/09/2019 Versão: 3	Próxima revisão: 02/09/2021

Reversa) para as amostras 1, 2, 3 e 4 preenchendo a ficha enviada pelo órgão do Controle de Qualidade Externo.

3.3. CQE – Pesquisa de Anticorpos Irregulares (PAI)

Seguir POP/AT/007/2019 – Testes Pré-Transfusionais - Pesquisa de Anticorpos Irregulares (PAI) para as amostras 1, 2, 3 e 4 preenchendo a ficha enviada pelo órgão do Controle de Qualidade Externo.

Observação:

- Toda equipe técnica da bancada realiza os testes com as amostras enviadas;
- Quando recebemos o resultado fazemos um gerenciamento da atividade comparando as respostas de cada colaborador.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Portaria de Consolidação nº5 de 28/09/2017 (Origem PRT MS/GM 158/2016);

BRASIL. Resolução RDC N° 34, de 11 de Junho de 2014. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/0fae1580484d56a5a53aa5bdc15bfe28/RDC_34_11_06_2014.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 03 de março de 2016.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
25/08/2017	1	Criação de Documentação
31/08/2018	2	Não realizada alteração.
02/09/2019	3	Foram atualizadas as referências. Alterado o modelo de formatação do POP conforme a Norma Operacional de Elaboração e Controle de Documentos Institucionais (NO.SGQVS.001).



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.AT.015 - Página 3/3	
Título do Documento	CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO (TESTE DE PROFICIÊNCIA)	Emissão: 02/09/2019	Próxima revisão: 02/09/2021
		Versão: 3	

Elaboração Germana de Fátima Paiva de Arruda Antônia Rosângela Soares Penha Aline Lira Xavier	Data: 02/09/2019
Revisão Nathalia Costa Gonzaga Saraiva Maria de Lourdes Vieira Sá Alves	Data: 03/09/2019
Validação Alecsandro da Rocha	Data: <u>02 / 07 / 2020</u>
Aprovação Maria Angelina Cartaxo F. Fernandes Médico Hematologista Chefe da Unidade de Hematologia e Oncologia do HULW	Data: 02/07/2020 Maria Angelina Cartaxo F. Fernandes Chefe do S. de Hematologia - HULW CRM 5289 Matrícula 2189402

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte