



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.CME.002 - Página 1/3	
Título do Documento	LIMPEZA DA SECADORA	Emissão: 27/10/2020 Versão: 01	Próxima revisão: 27/10/2022

1. OBJETIVO(S)

Manter o equipamento limpo para receber o material que será secado para garantir condições adequadas de funcionamento, deixando-o livre de substâncias que possam interferir no processo.

2. MATERIAL

- Equipamentos de proteção individual-EPI (gorro, máscara, óculos de proteção, avental, luva de borracha e botas);
- Água;
- Detergente neutro;
- Pano macio ou esponja.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Verificar se o equipamento está frio e desligado;
- Higienizar as mãos, conforme protocolo institucional;
- Utilizar os EPI;
- Calçar as luvas de borracha;
- Embeber a esponja com água e detergente neutro (1ml de detergente enzimático em 1L e água);
- Passar a esponja em movimento unidirecional, de dentro para fora, nas paredes internas da secadora, sem esfregar;
- Envolver um pano umedecido com água e repetir a descrição anterior
- Secar com um pano macio;
- Lavar o visor e partes externas com movimento unidirecional, de cima para baixo, com sabão neutro e água e secar com um pano macio;
- Higienizar as mãos após o procedimento.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.CME.002 - Página 2/3	
Título do Documento	LIMPEZA DA SECADORA	Emissão: 27/10/2020 Versão: 01	Próxima revisão: 27/10/2022

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário oficial da união, Brasília, DF, 2012.

EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas: Centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização, 7 ed. São Paulo: SOBECC; 2017.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	27/10/2020	Elaboração do Documento.

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.CME.002 - Página 3/3	
Título do Documento	LIMPEZA DA SECADORA	Emissão: 27/10/2020	Próxima revisão: 27/10/2022
		Versão: 01	

Elaboração Bárbara Jeane P. Chaves - Enfermeira Bruna Raquel R. Araújo – Enfermeira Bruna Ferreira dos Santos – Enfermeira Carlos Cesar Silva Alves – Enfermeiro Diana Nunes da Silva – Enfermeira Emanuella A. da Silva Carvalho – Enfermeira Guedijany Henrique Pereira – Enfermeira Izaura Cleone F. dos Santos Cadete - Enfermeira Jacqueline Maria B. Pereira – Enfermeira Suzana Cristina Andrade Bezerra – Enfermeira Suzanna Valéria Oliveira de Souza – Enfermeira Vanessa Carreiro Paulino – Enfermeira Sandra Martins de França – Enfermeira Jefferson Macedo de Souza – Técnico de Enfermagem	Data: <u>27/10/2020</u>
Revisão Izaura Cleone Ferreira dos Santos Cadete - Enfermeira	Data: <u>30/10/2020</u>
Validação Isabel Gomes Nogueira Vieira - Médica	Data: <u>08/12/2020</u>
Aprovação Sandra Martins de França – Chefe da Unidade Cirurgia/RPA e CME Sandra Martins de França Enfermeira COREN - PB 399.1664 	Data: 10/12/2020