

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.CME.004 - Página 1/5	
Título do Documento	<b>RECEBIMENTO/LIMPEZA NO EXPURGO DO MATERIAL ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL</b>	Emissão: 26/10/2020 Versão: 01	Próxima revisão: 26/10/2022

## 1. OBJETIVO(S)

Padronizar e Implantar a rotina de recebimento e limpeza dos materiais consignados da Bucomaxilofacial/ Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) contaminados no expurgo no Centro de Material e Esterilização (CME) do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), para minimizar a ocorrência de danos aos materiais e garantir a limpeza adequada tornando mais eficiente e eficaz o processo de trabalho, com base em critérios técnicos e legislação pertinente.

## 2. MATERIAL

- 01 Par de luva de borracha cano longo;
- 01 Par de protetor auricular;
- 01 Óculos de proteção;
- 01 face shield;
- 01 Máscara (N95);
- 01 Gorro/Touca;
- Sapatos fechados;
- 01 Avental impermeável de manga longa;
- Formulário de controle padronizado (check list)
- Livro específico
- Caneta para anotações;
- Caixa para perfurocortante;
- Recipiente para lixo comum e infectante;
- Hamper para invólucros de tecido.
- Recipiente para imersão dos materiais;
- Solução diluída do detergente enzimático;
- Escovas de cerdas macias;
- Esponjas não abrasivas;
- Gaze;
- Seringa;
- Água e pistola de água sob pressão.

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.CME.004 - Página 2/5	
Título do Documento	<b>RECEBIMENTO/LIMPEZA NO EXPURGO DO MATERIAL ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL</b>	Emissão: 26/10/2020 Versão: 01	Próxima revisão: 26/10/2022

### 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Solicitar a presença do enfermeiro responsável pelo expurgo no momento do recebimento de materiais classificados como OPME;
- Lavar as mãos;
- Paramentar-se com os equipamentos de proteção individual (luva de borracha cano longo, protetor auricular, óculos de proteção ou face shield, máscara N95, touca/gorro, sapatos fechados, avental impermeável manga longa);
- Conferir o material recebido na frente do entregador (residente da Bucomaxilofacial) e registrar no livro de entrada de material no expurgo, descrevendo quantidade e detalhes que possam elucidar possíveis dúvidas posteriores;
  - Identificar e notificar a existência de material danificado ou incompleto;
  - Devolver os materiais que se encontrem danificados ou incompletos;
  - Notificar materiais com presença de sujidade ressecada;
  - Advertir a vinda de perfurocortantes e lixos junto ao material;
  - Solicitar assinatura do entregador no livro;
  - Desprezar material comum, orgânico ou perfurocortante nos locais adequados;
- Colocar invólucros de tecido no hamper;
- Encaminhar o material para lavagem.

#### 3.1. Lavagem do Drill/cabo do Drill

- A lavagem deve ser manual;
- Umedecer a gaze em solução contendo detergente enzimático;
- Passar a gaze por toda a extensão do drill e cabo do drill (repetir o procedimento 3 vezes);
- Para o enxágue, pegar gaze umedecida em água (repetir 3 vezes);
- Não imergir em solução.

#### 3.2. Lavagem da caixa de fixação (parafusos e placas)

- Imergir, com a caixa fechada, completamente na solução diluída do detergente enzimático;
  - Aguardar o tempo de contato de 05 minutos e após, realizar a lavagem da parte exterior da caixa utilizando esponja não abrasiva;
  - Retirar a caixa contendo as placas e parafusos e submergir em recipiente com água;



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.CME.004 - Página 3/5	
Título do Documento	<b>RECEBIMENTO/LIMPEZA NO EXPURGO DO MATERIAL ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL</b>	Emissão: 26/10/2020 Versão: 01	Próxima revisão: 26/10/2022

- Fazer o enxágue final com água purificada;
- Encaminhar para a secagem.

### 3.3. Lavagem dos instrumentais

- Realizar a lavagem do instrumental peça a peça submerso em água para evitar a formação de aerossóis, utilizando escovas de cerdas macias, atentando para reentrâncias e articulações;
- Realizar a fricção por, no mínimo 05 vezes, seguindo a direção das ranhuras;
- Enxaguar sob água corrente a peça e devolver para o lugar de origem;
- Para canulados, o lúmen deve ser preenchido, utilizando seringa, com solução de detergente enzimático;
- Enxaguar materiais com lúmen conectando o bico da pistola com água sob pressão ou uma seringa a uma das extremidades;
- Encaminhar para secagem.



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.CME.004 - Página 4/5	
Título do Documento	<b>RECEBIMENTO/LIMPEZA NO EXPURGO DO MATERIAL ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL</b>	Emissão: 26/10/2020 Versão: 01	Próxima revisão: 26/10/2022

#### 4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário oficial da união, Brasília, DF, 2012.

EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.

GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas: Centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização, 7 ed. São Paulo: SOBECC; 2017.


#### 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	26/10/2020	Elaboração de Documento.

*Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte*



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.CME.004 - Página 5/5	
Título do Documento	<b>RECEBIMENTO/LIMPEZA NO EXPURGO DO MATERIAL ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL</b>	Emissão: 26/10/2020 Versão: 01	Próxima revisão: 26/10/2022

<b>Elaboração</b> Bárbara Jeane P. Chaves - Enfermeira Bruna Raquel R. Araújo – Enfermeira Bruna Ferreira dos Santos – Enfermeira Carlos Cesar Silva Alves – Enfermeiro Diana Nunes da Silva – Enfermeira Emanuella A. da Silva Carvalho – Enfermeira Guedijany Henrique Pereira – Enfermeira Izaura Cleone F. dos Santos Cadete - Enfermeira Jacqueline Maria B. Pereira – Enfermeira Suzana Cristina Andrade Bezerra – Enfermeira Suzanna Valéria Oliveira de Souza – Enfermeira Vanessa Carreiro Paulino – Enfermeira Sandra Martins de França – Enfermeira Valéria Patrícia de S. S. Queiroz – Técnico de Enfermagem Josivânia Alves Dias – Técnico de Enfermagem	Data: <u>26/10/2020</u>
<b>Revisão</b> Izaura Cleone Ferreira dos Santos Cadete - Enfermeira	Data: <u>30/10/2020</u>
<b>Validação</b> Isabel Gomes Nogueira Vieira - Médica	Data: <u>08/12/2020</u>
<b>Aprovação</b> Sandra Martins de França – Chefe da Unidade de Cirurgia/RPA e CME  Sandra Martins de França Enfermeira COREN - PB 399.1664 	Data:  <u>10/12/2020</u>