

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.CME.008 - Página 1/3	
Título do Documento	<b>LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAPNÓGRAFO PRETO COM ÁLCOOL A 70%</b>	Emissão: 26/10/2010 Versão: 01	Próxima revisão: 26/10/2022

### 1. OBJETIVO(S)

- Destruir a maioria dos microorganismos patogênicos, exceto esporos bacterianos;
- Padronizar condutas relacionadas a limpeza e desinfecção do capnógrafo preto;
- Relacionar os procedimentos necessários para a limpeza e desinfecção do capnógrafo preto;
- Preservar o material.

### 2. MATERIAL

- 01 par de luva de borracha de cano longo;
- 01 par de luva de procedimento;
- 01 par de protetor auricular;
- 01 face shield;
- 01 máscara N95;
- 01 gorro/touca;
- 01 avental impermeável de manga longa;
- Água corrente
- Esponja não abrasiva;
- Detergente neutro;
- Álcool 70%;
- Campos de algodão estéril ou compressa.

### 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Lavar as mãos;
- Paramentar-se com os equipamentos de proteção individual(luva de borracha de cano longo, face shield, máscara N95, gorro/touca, avental impermeável de manga longa);
- Realizar lavagem manual com esponja não abrasiva e detergente neutro;
- Enxaguar com água corrente;
- Encaminhar para secagem;
- Na secagem, utilizar luva de procedimento e secar com campo de algodão estéril ou compressa;
- Friccionar com álcool a 70% , com gaze ou compressa estéril, em toda a extensão por 30 segundos, o que se obtém com 3 aplicações sucessivas após a evaporação;



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.CME.008 - Página 2/3	
Título do Documento	<b>LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAPNÓGRAFO PRETO COM ÁLCOOL A 70%</b>	Emissão: 26/10/2010 Versão: 01	Próxima revisão: 26/10/2022

- Armazenar em sacos plásticos ou grau cirúrgico estéril ou embalagem para material termodesinfetados;
- Colocar data, identificar setor e assinar.

#### 4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário oficial da união, Brasília, DF, 2012.

EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.

GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.

FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas: Centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização, 7 ed. São Paulo: SOBECC; 2017.

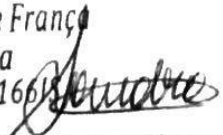
#### 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	26/10/2020	Elaboração de Documento.

*Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte*



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.CME.008 - Página 3/3	
Título do Documento	<b>LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAPNÓGRAFO PRETO COM ÁLCOOL A 70%</b>	Emissão: 26/10/2010 Versão: 01	Próxima revisão: 26/10/2022

<b>Elaboração</b> Barbara Jeane P. Chaves - Enfermeira Bruna Raquel R. Araújo – Enfermeira Bruna Ferreira dos Santos – Enfermeira Carlos Cesar Silva Alves – Enfermeiro Diana Nunes da Silva – Enfermeira Emanuella A. da Silva Carvalho – Enfermeira Guedijany Henrique Pereira – Enfermeira Izaura Cleone F. dos Santos Cadete - Enfermeira Jacqueline Maria B. Pereira – Enfermeira Suzana Cristina Andrade Bezerra – Enfermeira Suzanna Valéria Oliveira de Souza – Enfermeira Vanessa Carreiro Paulino – Enfermeira Sandra Martins de França – Enfermeira Joelma Dias Alves de Araújo – Técnico de Enfermagem	Data: <u>26/10/2020</u>
<b>Revisão</b> Izaura Cleone Ferreira dos Santos Cadete - Enfermeira	Data: <u>/30/10/2020</u>
<b>Validação</b> Isabel Gomes Nogueira Vieira	Data: <u>08/12/2020</u>
<b>Aprovação</b> Sandra Martins de França – Chefe da Unidade de Cirurgia/RPA e CME  Sandra Martins de França Enfermeira COREN - PB 399.166/15 	Data:  <u>10/12/2020</u>