

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.CME.011 - Página 1/3	
Título do Documento	<b>TESTE DE SELAGEM</b>	Emissão: 26/10/2020	Próxima revisão: 26/10/2022
		Versão: 01	

## 1. OBJETIVO(S)

- Padronizar condutas relacionadas à realização do teste de selagem;
- Relacionar os procedimentos necessários para a testagem da selagem;
- Identificar anormalidades no funcionamento da seladora;
- Assegurar uma selagem segura das embalagens de papel grau cirúrgico e Tyvec;
- Diminuir a perda de embalagens pela selagem ineficiente.

## 2. MATERIAL

- 01 Máscara cirúrgica;
- 01 Gorro/Touca;
- Caneta;
- 02 Folhas de testes para seladora;
- 01 Embalagem de papel grau cirúrgico;
- 01 Embalagem de Tyvec;
- 01 Seladora de papel grau cirúrgico;
- 01 Seladora de Tyvec;
- Pasta para recolhimento dos testes.

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Realizar o teste na primeira selagem do dia, diariamente;
- Realizar apenas uma selagem em cada folha de teste;
- Higienizar as mãos;
- Paramentar-se com os Equipamentos de proteção individual (máscara cirúrgica, gorro/touca);
  - Ligar o motor da seladora;
  - Aguardar o alcance da temperatura programada;
  - Preencher a folha de teste com os seguintes dados: número da seladora, data, nome do operador, assinatura do operador;
    - Colocar a folha de teste no interior da embalagem, entre o filme plástico e o papel, de forma que a tira de teste fique voltada para a parte plástica da embalagem;
    - Realizar a termosselagem, alcançando horizontalmente toda a tira de teste;
    - Verificar no teste se a selagem foi efetiva, observando seu aspecto. Se a selagem foi íntegra, sem fissuras, rugas, bolhas e queima do papel, a selagem estará APROVADA. Se



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.CME.011 - Página 2/3	
Título do Documento	<b>TESTE DE SELAGEM</b>	Emissão: 26/10/2020	Próxima revisão: 26/10/2022
		Versão: 01	

a selagem contiver rasgos, fissuras, rugas, bolhas ou presença de queima do papel, a selagem estará REPROVADA;

- Registrar o resultado de aprovado ou reprovado na folha de teste;
- Repetir o teste de selagem, caso o primeiro registre selagem REPROVADA;
- Prosseguir com o procedimento de selagem caso a mesma seja APROVADA;
- Arquivar o teste em pasta própria;
- Liberar para uso após resultado satisfatório do teste;
- Informar ao setor competente, a necessidade de avaliação e/ou conserto da seladora, caso a selagem seja reprovada.

#### 4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário oficial da união, Brasília, DF, 2012.

CHAVES, B. J. P. et al. Procedimento Operacional Padrão no Centro de Material e Esterilização. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. João Pessoa: 2018.

EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.

FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.

GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas: Centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização, 7 ed. São Paulo: SOBECC; 2017.




Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.CME.011 - Página 3/3	
Título do Documento	<b>TESTE DE SELAGEM</b>	Emissão: 26/10/2020	Próxima revisão: 26/10/2022
		Versão: 01	

## 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	26/10/2020	Elaboração de Documento.

*Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte*

<p><b>Elaboração</b>            Bárbara Jeane P. Chaves - Enfermeira            Bruna Raquel R. Araújo – Enfermeira            Bruna Ferreira dos Santos – Enfermeira            Carlos Cesar Silva Alves – Enfermeiro            Diana Nunes da Silva – Enfermeira            Emanuella A. da Silva Carvalho – Enfermeira            Guedijany Henrique Pereira – Enfermeira            Izaura Cleone F. dos Santos Cadete - Enfermeira            Jacqueline Maria B. Pereira – Enfermeira            Suzana Cristina Andrade Bezerra – Enfermeira            Suzanna Valéria Oliveira de Souza – Enfermeira            Vanessa Carreiro Paulino – Enfermeira            Sandra Martins de França – Enfermeira            Maria Quinou da Conceição – Técnico de Enfermagem            Veridiana Alves de Lima Torres – Técnico de Enfermagem</p>	Data: <u>26/10/2020</u>
<p><b>Revisão</b>            Izaura Cleone Ferreira dos Santos Cadete - Enfermeira</p>	Data: <u>30/10/2020</u>
<p><b>Validação</b>            Isabel Gomes Nogueira Vieira - Médica</p>	Data: <u>08/12/2020</u>
<p><b>Aprovação</b>            Sandra Martins de França – Chefe da Unidade de            Cirurgia/RPA e CME</p> <p>Sandra Martins de França            Enfermeira            COREN - PB 399.166</p> 	Data:  