

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.CME.014 - Página 1/3	
Título do Documento	LIMPEZA E CONTROLE DE ESCOVAS E ESPONJAS	Emissão: 26/10/2020	Próxima revisão: 26/10/2022
		Versão: 1	

1. OBJETIVO(S)

Proporcionar efetiva ação mecânica no processo de limpeza manual.

2. MATERIAL

- Escova;
- Esponja;
- Reservatório para manter as esponjas e escovas;
- Equipamentos de proteção individual (Luvas, touca, máscara, capote, óculos de proteção, bota);
- Detergente neutro;
- Água.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Paramentar-se devidamente utilizando os equipamentos de proteção individual necessário para o desenvolvimento seguro desta atividade;
- Inspeccionar as escovas e esponjas diariamente substituindo-as quando perderem suas características necessárias para a ação limpadora (atrimento para a remoção da sujidade);
- Realizar ao final de cada plantão a termodesinfecção ou a esterilização de escovas termorresistentes;
- Limpar e secar as esponjas e escovas a cada uso para manter as condições higiênicas;
- Trocar as esponjas a cada plantão de 24 horas e as escovas a cada 15 dias ou quando perderem sua ação limpadora;
- Registrar em mapa específico cada troca de escova.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.CME.014 - Página 2/3	
Título do Documento	LIMPEZA E CONTROLE DE ESCOVAS E ESPONJAS	Emissão: 26/10/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 26/10/2022

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário oficial da união, Brasília, DF, 2012.

EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.

GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.

FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC) Práticas Recomendadas: Centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização, 7 ed. São Paulo: SOBECC; 2017.


5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	26/10/2020	Elaboração de Documento.

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.CME.014 - Página 3/3	
Título do Documento	LIMPEZA E CONTROLE DE ESCOVAS E ESPONJAS	Emissão: 26/10/2020	Próxima revisão: 26/10/2022
		Versão: 1	

Elaboração Bárbara Jeane P. Chaves - Enfermeira Bruna Raquel R. Araújo – Enfermeira Bruna Ferreira dos Santos – Enfermeira Carlos Cesar Silva Alves – Enfermeiro Diana Nunes da Silva – Enfermeira Emanuella A. da Silva Carvalho – Enfermeira Guedijany Henrique Pereira – Enfermeira Izaura Cleone F. dos Santos Cadete - Enfermeira Jacqueline Maria B. Pereira – Enfermeira Suzana Cristina Andrade Bezerra – Enfermeira Suzanna Valéria Oliveira de Souza – Enfermeira Vanessa Carreiro Paulino – Enfermeira Sandra Martins de França – Enfermeira Creuza Ferreira da Silva – Técnico de Enfermagem Fabrícia Gomes de Araújo – Técnico de Enfermagem	Data: <u>26/10/2020</u>
Revisão Izaura Cleone Ferreira dos Santos Cadete - Enfermeira	Data: <u>30/10/2020</u>
Validação Isabel Gomes Nogueira Vieira	Data: <u>08/12/2020</u>
Aprovação Sandra Martins de França – Chefe da Unidade de Cirurgia/RPA e CME Sandra Martins de França Enfermeira COREN - PB 399.16648 	Data: 10/12/2020