

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO / ROTINA | POP.CME.016 - Página 1/3 | |
| Título do Documento | LIMPEZA SEMANAL DAS AUTOCLAVES | Emissão: 26/10/2020 | Próxima revisão: 26/10/2022 |
| | | Versão: 1 | |

1. OBJETIVO(S)

- Padronizar a técnica da limpeza das autoclaves.
- Manter o bom desempenho do equipamento.

2. MATERIAL

- Compressas;
- Água;
- Solução de água e detergente neutro;
- Máscara descartável;
- Luva de procedimento;
- Rodo com cabo longo de uso exclusivo.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Higienizar as mãos;
- Certificar que a autoclave está desligada e as paredes internas resfriadas;
- Paramentar-se com os equipamentos de proteção individual (máscara descartável, luva de procedimento);
- Borrifar a solução de água e detergente neutro nas paredes internas da autoclave;
- Esfregar com auxílio do rodo (evitando debruçar-se dentro da câmara) todas as partes internas, inclusive a parte interna das portas;
- Enxaguar com compressa limpa embebida em água;
- Secar totalmente a câmara interna com outra compressa limpa e seca;
- Repetir o mesmo procedimento na parte externa da máquina, inclusive no visor;
- Recolher material;
- Deixar ambiente limpo e organizado;
- Retirar as luvas;
- Higienizar as mãos.



| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO / ROTINA | POP.CME.016 - Página 2/3 | |
| Título do Documento | LIMPEZA SEMANAL DAS AUTOCLAVES | Emissão: 26/10/2020 Versão: 1 | Próxima revisão: 26/10/2022 |

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário oficial da união, Brasília, DF, 2012.

EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.

GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas: Centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização, 7 ed. São Paulo: SOBECC; 2017.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
|--------|------------|--------------------------|
| 1 | 26/10/2020 | Elaboração de Documento. |

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte



| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO / ROTINA | POP.CME.016 - Página 3/3 | |
| Título do Documento | LIMPEZA SEMANAL DAS AUTOCLAVES | Emissão: 26/10/2020 | Próxima revisão: 26/10/2022 |
| | | Versão: 1 | |

| | |
|---|--------------------------------|
| <p>Elaboração Bárbara Jeane P. Chaves - Enfermeira Bruna Raquel R. Araujo – Enfermeira Bruna Ferreira dos Santos – Enfermeira Carlos Cesar Silva Alves – Enfermeiro Diana Nunes da Silva – Enfermeira Emanuella A. da Silva Carvalho – Enfermeira Guedijany Henrique Pereira – Enfermeira Izaura Cleone F. dos Santos Cadete - Enfermeira Jacqueline Maria B. Pereira – Enfermeira Suzana Cristina Andrade Bezerra – Enfermeira Suzanna Valéria Oliveira de Souza – Enfermeira Vanessa Carreiro Paulino – Enfermeira Sandra Martins de França – Enfermeira Ana Paula Luz – Técnico de Enfermagem Aline de Brito Torres- Técnico de Enfermagem</p> | Data: <u>26/10/2020</u> |
| <p>Revisão Izaura Cleone Ferreira dos Santos Cadete - Enfermeira</p> | Data: <u>30/10/2020</u> |
| <p>Validação Isabel Gomes Nogueira Vieira</p> | Data: <u>08/12/2020</u> |
| <p>Aprovação Sandra Martins de França – Chefe da Unidade de Cirurgia/RPA e CME <i>Sandra Martins de França</i> Enfermeira COREN - PB 399.16618 <i>Sandra</i></p> | Data: <i>10/12/2020</i> |