



| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO / ROTINA | POP.CME.017 - Página 1/3 | |
| Título do Documento | INTEGRADOR QUÍMICO OU EMULADOR | Emissão: 26/10/2020 | Próxima revisão: 26/10/2022 |
| | | Versão: 1 | |

1. OBJETIVO

Efetuar a monitorização das condições da esterilização a vapor no interior das embalagens e sendo capaz de reagir a todos os parâmetros críticos da esterilização a vapor saturado sob pressão.

2. MATERIAL

- Fitas (Integrador químico);
- Caixa cirúrgica;
- Autoclave com bomba de vácuo.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Higienizar as mãos;
- Usar os equipamentos de proteção individual;
- Preparar as caixas cirúrgicas;
- Colocar um integrador químico em cada pacote cirúrgico, exceto nos que utilizem embalagem de papel grau cirúrgico;
 - Colocar a caixa cirúrgica na autoclave;
 - Conferir a presença do integrador químico, após abertura das caixas cirúrgicas no bloco cirúrgico e verificar a mudança de cor do integrador químico conforme orientado pela embalagem, e a partir da coloração será aceito ou rejeitado para a utilização no paciente;
 - Fixar o integrador químico das caixas cirúrgicas no prontuário do paciente que vai ser utilizado a caixa;
 - Informar, imediatamente, ao enfermeiro responsável pela CME e Bloco Cirúrgico se o teste for reprovado. A caixa cirúrgica não deverá ser utilizada.



| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO / ROTINA | POP.CME.017 - Página 2/3 | |
| Título do Documento | INTEGRADOR QUÍMICO OU EMULADOR | Emissão: 26/10/2020 | Próxima revisão: 26/10/2022 |
| | | Versão: 1 | |

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário oficial da união, Brasília, DF, 2012.

EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.

GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.

FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas: Centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização, 7 ed. São Paulo: SOBECC; 2017.


5. HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
|--------|------------|--------------------------|
| 1 | 26/10/2020 | Elaboração de Documento. |

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte



| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO / ROTINA | POP.CME.017 - Página 3/3 | |
| Título do Documento | INTEGRADOR QUÍMICO OU EMULADOR | Emissão: 26/10/2020 | Próxima revisão: 26/10/2022 |
| | | Versão: 1 | |

| | |
|---|----------------------------|
| Elaboração Bárbara Jeane P. Chaves - Enfermeira Bruna Raquel R. Araújo – Enfermeira Bruna Ferreira dos Santos – Enfermeira Carlos Cesar Silva Alves – Enfermeiro Diana Nunes da Silva – Enfermeira Emanuella A. da Silva Carvalho – Enfermeira Guedijany Henrique Pereira – Enfermeira Izaura Cleone F. dos Santos Cadete - Enfermeira Jacqueline Maria B. Pereira – Enfermeira Suzana Cristina Andrade Bezerra – Enfermeira Suzanna Valéria Oliveira de Souza – Enfermeira Vanessa Carreiro Paulino – Enfermeira Sandra Martins de França – Enfermeira Rosilene Silva de Andrade – Técnico de Enfermagem Aline de Brito Torres – Técnico de Enfermagem | Data: <u>26/10/2020</u> |
| Revisão Izaura Cleone Ferreira dos Santos Cadete - Enfermeira | Data: <u>30/10/2020</u> |
| Validação Isabel Gomes Nogueira Vieira | Data: <u>08/12/2020</u> |
| Aprovação Sandra Martins de França – Chefe da Unidade de Cirurgia/RPA e CME Sandra Martins de França Enfermeira COREN - PB 399.16615  | Data: <u>10/12/2020</u> |