

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.CME.019 - Página 1/4	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO MATERIAL VENTILATÓRIO EM TERMODESINFECTORA NO EXPURGO	Emissão: 26/10/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 26/10/2022

1. OBJETIVO(S)

- Padronizar condutas relacionadas a lavagem do material ventilatório em termodesinfectora;
- Relacionar os procedimentos necessários para a lavagem do material ventilatório em termodesinfectora;
- Melhorar a segurança do profissional minimizando erros;
- Diminuir a perda de material pelo mau uso do equipamento;
- Preservar o maquinário.

2. MATERIAL

- 01 Par de luva de borracha cano longo;
- 01 par de luva de procedimento;
- 01 Par de protetor auricular;
- 01 Face shield;
- 01 Máscara (N95);
- 01 Gorro/Touca;
- Sapatos fechados;
- 01 Avental impermeável de manga longa;
- Cestos para acondicionamento do instrumental;
- Livros para registro;
- Termodesinfectora.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Lavar as mãos;
- Paramentar-se com os equipamentos de proteção individual (luva de procedimento, luva de borracha cano longo, protetor auricular, face shield, máscara N95, gorro/touca, sapatos fechados, avental impermeável de manga longa);
- Realizar pré lavagem do material;
- Colocar os materiais recebidos no rack do equipamento e registrar em livro específico;
- Colocar o indicador de lavagem;
- Programar o ciclo conforme descrição do equipamento “ventilatório ou inalatório” a ser selecionado de acordo com a natureza do artigo e a recomendação do fabricante;



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.CME.019 - Página 2/4	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO MATERIAL VENTILATÓRIO EM TERMODESINFECTORA NO EXPURGO	Emissão: 26/10/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 26/10/2022

- Iniciar o ciclo;
- Atentar para alterações no equipamento durante o processo e comunicar ao enfermeiro;
- Reprocessar o material, caso apresente sujidade visível ao final do processo;
- Encaminhar o material para a etapa seguinte.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.CME.019 - Página 3/4	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO MATERIAL VENTILATÓRIO EM TERMODESINFECTORA NO EXPURGO	Emissão: 26/10/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 26/10/2022

REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário oficial da união, Brasília, DF, 2012.

BEZERRA, S. C. A. et al. Procedimento Operacional Padrão no Centro de Material e Esterilização. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. João Pessoa: 2016.

CHAVES, B. J. P. et al. Procedimento Operacional Padrão no Centro de Material e Esterilização. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. João Pessoa: 2018.

EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.

GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas: Centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização, 7 ed. São Paulo: SOBECC; 2017.

4. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	26/10/2020	Elaboração de Documento.

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.CME.019 - Página 4/4	
Título do Documento	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO MATERIAL VENTILATÓRIO EM TERMODESINFECTORA NO EXPURGO	Emissão: 26/10/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 26/10/2022

<p>Elaboração Bárbara Jeane P. Chaves - Enfermeira Bruna Raquel R. Araújo – Enfermeira Bruna Ferreira dos Santos – Enfermeira Carlos Cesar Silva Alves – Enfermeiro Diana Nunes da Silva – Enfermeira Emanuella A. da Silva Carvalho – Enfermeira Guedijany Henrique Pereira – Enfermeira Izaura Cleone F. dos Santos Cadete - Enfermeira Jacqueline Maria B. Pereira – Enfermeira Suzana Cristina Andrade Bezerra – Enfermeira Suzanna Valéria Oliveira de Souza – Enfermeira Vanessa Carreiro Paulino – Enfermeira Sandra Martins de França – Enfermeira Edmércia A. Guimarães Andrade – Técnico de Enfermagem Nadia Shirley C. S. Soares – Técnico de Enfermagem</p>	Data: <u>26/10/2020</u>
<p>Revisão Izaura Cleone Ferreira dos Santos Cadete - Enfermeira</p>	Data: <u>30/10/2020</u>
<p>Validação Isabel Gomes Nogueira Vieira</p>	Data: <u>08/12/2020</u>
<p>Aprovação Sandra Martins de França – Chefe da Unidade de Cirurgia/RPA e CME <i>Sandra Martins de França</i> Enfermeira COREN - PB 399.16618 <i>[Assinatura]</i></p>	Data: <i>10/12/2020</i>