

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.CME.023 - Página 1/3	
Título do Documento	<b>ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL DA UNIDADE DA VISÃO</b>	Emissão: 26/10/2020	Próxima revisão: 26/10/2022
		Versão: 1.0	

### 1. OBJETIVO(S)

- Padronizar condutas relacionadas a esterilização do material da unidade da visão;
- Relacionar os procedimentos necessários para a esterilização do material da unidade da visão;
- Melhorar a segurança do profissional minimizando erros;
- Diminuir a perda de material pelo manuseio incorreto.

### 2. MATERIAL

- 01 Gorro/Touca;
- 01 par de luvas de procedimento sem talco;
- 01 máscara simples;
- Roupa privativa do setor
- Integrador químico classe 05 ou 06;
- Caneta para anotações;
- Fita zebraada;
- Livro para registro específico.

### 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Esterilizar todos os materiais críticos termorresistentes em vapor sob pressão;
- Esterilizar os materiais termossensíveis com métodos de esterilização que agem em baixas temperaturas (STERRAD)
  - No carregamento da autoclave, pacotes ou caixas de instrumentos e materiais, devem ser dispostos por último devido ao tamanho e delicadeza, não ultrapassando 80% da capacidade da câmara ;
  - Identificar as caixas de instrumentos com o número da câmara e do ciclo;
  - Dispor em posição vertical, na câmara interna, os produtos côncavo-convexo (cubas);
  - Preparar os materiais pequenos, preparados avulso, devem estar em um pacote, todos juntos, para não cair no interior da câmara;
  - Colocar, na carga, em pacote desafio, o indicador químico (IQ) tipo V
  - Realizar registro em livro específico com número da autoclave, tipo e número de ciclo, materiais e instrumentais que compõe a carga, horário de início e assinatura.

**Observações:** Identificar todas as embalagens e pacotes com o número da carga e autoclave, data



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.CME.023 - Página 2/3	
Título do Documento	<b>ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL DA UNIDADE DA VISÃO</b>	Emissão: 26/10/2020	Próxima revisão: 26/10/2022
		Versão: 1.0	

e assinatura.

#### 4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário oficial da união, Brasília, DF, 2012.

EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.

FRANÇA. C. R. et al. Procedimento Operacional Padrão (POP). Central de Material e Esterilização do Hospital Universitário Lauro Wanderley. João Pessoa, PB: 2013.

GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). Práticas Recomendadas: Centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização, 7 ed. São Paulo: SOBECC; 2017.

#### 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	26/10/2020	Elaboração de Documento.

*Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte*



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.CME.023 - Página 3/3	
Título do Documento	<b>ESTERILIZAÇÃO DO MATERIAL DA UNIDADE DA VISÃO</b>	Emissão: 26/10/2020	Próxima revisão: 26/10/2022
		Versão: 1.0	

<b>Elaboração</b> Emanuella A. da Silva Carvalho Guedijany Henrique Pereira Suzanna Valéria Oliveira de Souza Vanessa Carreiro Paulino Sandra Martins de França Nadia Shirley Correia Sobral Soares Edmercia Alves Guimarães Ana Paula Santos Bezerra Francidalva De Lima Silva Adriano de Lima Furtado Fabrícia Gomes de Araújo	Data: 26/10/2020
<b>Revisão</b> Emanuella A. da Silva Carvalho - Enfermeira	Data: 27/11/2020
<b>Validação</b> Enfª Drª Larycia Vicente Rodrigues	Data: 28/12/2020
<b>Aprovação (Nome, Função, Assinatura)</b> Sandra Martins de França – chefe da unidade  Sandra Martins de França Enfermeira COREN - PB 399.16615	Data: 10/02/2021