

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UTIN.012 - Página 1/6	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DOS FREEZERS DO POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO</b>	Emissão: 08/06/2024	Próxima revisão: 08/06/2026
		Versão: 1.0	

## 1. OBJETIVO(S)

Padronizar a rotina de higienização dos freezers do Posto de Coleta de Leite Humano (PCLH) do Hospital Universitário Lauro Wanderley-Universidade Federal da Paraíba-Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HULW-UFPB-EBSERH).

## 2. MATERIAL

- Detergente neutro;
- Água;
- Pano multiuso;
- Esponja de limpeza leve branca;
- Pano de chão;
- Freezer principal;
- Freezer de apoio;
- Planilha de limpeza dos freezers (Apêndice A);
- Livro de Ocorrência;
- Caneta esferográfica.

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Antes de iniciar, preparar o ambiente e separar o material que será utilizado, mantendo a ordem e conservando os equipamentos.

### 3.1. Responsabilidades

#### 3.1.1. Técnico de enfermagem

- Providenciar o material necessário;

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UTIN.012 - Página 2/6	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DOS FREEZERS DO POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO</b>	Emissão: 08/06/2024	Próxima revisão: 08/06/2026
		Versão: 1.0	

- Solicitar a equipe de higienização do setor os panos de chão necessários;
- Realizar o descongelamento e higienização dos freezers conforme rotina estabelecida no setor;

### 3.1.2. Enfermeiro

- Supervisionar a processo de descongelamento e higienização dos freezers;
- Registrar em livro de ocorrência a realização do procedimento e possíveis intercorrências;

### 3.2. Etapas do procedimento

- Separar o material a ser utilizado;
- Anotar em planilha específica (Apêndice A) a temperatura do momento registrada no termômetro do freezer a ser higienizado;
- Retirar, cuidadosamente, todos os frascos contendo leite humano cru e os gelox do freezer que será higienizado e colocar no freezer de apoio;
- Desligar o equipamento da energia elétrica;
- Retirar o excesso de água após o degelo;
- Retirar todas as prateleiras e lavar com detergente neutro e esponja de limpeza leve branca;
- Higienizar os gelox com detergente neutro e esponja e enxaguar com água corrente;
- Lavar as partes internas e externas do freezer com detergente neutro e esponja;
- Enxaguar com água corrente;
- Secar com pano multiuso;
- Colocar todas as prateleiras;
- Posicionar o cabo extensor do termômetro adequadamente;
- Fechar a porta do freezer;
- Ligar o freezer na energia elétrica;

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UTIN.012 - Página 3/6	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DOS FREEZERS DO POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO</b>	Emissão: 08/06/2024 Versão: 1.0	Próxima revisão: 08/06/2026

- Organizar o posicionamento dos freezers e deixar afastados pelo menos 20 cm da parede;
- Aguardar o freezer higienizado atingir a temperatura adequada (-10°C);
- Voltar os frascos contendo leite humano cru e gelox;
- Finalizar o processo e guardar o material;
- Anotar procedimento na planilha de limpeza dos freezers (Apêndice A).

### 3.3. Observações

- Realizar a higienização dos freezers quinzenalmente, de preferência aos sábados;
- Deve ser realizado um freezer por vez para que o outro possa servir de apoio.

## 4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2010, 120p. Disponível em: <<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf/view>>. Acessado em: 17 ago. 2021.

BRASIL. Banco de Leite Humano: Funcionamento, Prevenção e Controle de Riscos. Brasília: Anvisa, 2008, 160p. Disponível em: <<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-para-bancos-de-leite-humano.pdf>>. Acessado em: 17 ago. 2021.

BRASIL. Resolução RDC nº 171 de 4 de setembro de 2006. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o funcionamento de Bancos de Leite Humano. Diário Oficial da União, de 05 set. 2006. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/banco-de-leite-humano/legislacao/resolucao-rdc-no-171.pdf/view>>. Acessado em: 17 ago. 2021.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. POP.UGQSP.011 - Elaboração de POP. v. 2, 02/05/2024. João Pessoa, 2024.



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UTIN.012 - Página 4/6	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DOS FREEZERS DO POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO</b>	Emissão: 08/06/2024	Próxima revisão: 08/06/2026
		Versão: 1.0	

## 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	08/06/2024	Elaboração do documento

CÓPIA CONTROLADA



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UTIN.012 - Página 5/6	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DOS FREEZERS DO POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO</b>	Emissão: 08/06/2024	Próxima revisão: 08/06/2026
		Versão: 1.0	

**Apêndice A**



**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY-HULW/EBSERH  
POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO - PCLH**

**PLANILHA DE HIGIENIZAÇÃO DOS FREEZERS**

MÊS/ANO: \_\_\_\_\_

**FREEZER MENOR**

DATA	Temperatura inicial	Temperatura final	RESPONSÁVEL



**FREEZER MAIOR**

DATA	Temperatura inicial	Temperatura final	RESPONSÁVEL

*(Poderão ser incluídas no quadro abaixo as identificações dos responsáveis pela elaboração/revisão e avaliação)*



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.UTIN.012 - Página 6/6	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DOS FREEZERS DO POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO</b>	Emissão: 08/06/2024	Próxima revisão: 08/06/2026
		Versão: 1.0	

<b>Elaboração</b> Janine Martins Cavalcante Ayres Renata Figueiredo Ramalho Costa de Souza Veronice Pessoa da Nóbrega	Data: 08/06/2024
<b>Revisão</b> Renata Figueiredo Ramalho Costa de Souza	Data: 17/06/2024
<b>Validação</b> Virginia de Araújo Pôrto – Enfermeira Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente   Documento assinado digitalmente <b>VIRGINIA DE ARAUJO PORTO</b> Data: 26/06/2024 09:00:04-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	Data: 26/06/2024
<b>Aprovação</b>   Documento assinado digitalmente <b>LARISSA RIBEIRO DO AMARAL</b> Data: 30/07/2024 17:54:35-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	Data:

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte