



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DENF.394 - Página 1/10	
Título do Documento	PROCEDIMENTO DE LIGAR A TERMODESINFECTADORA CISA	Emissão: 12/07/2024 Versão: 1.0	Próxima revisão: 12/07/2026

1. OBJETIVO

Padronizar o modo de ligar a Termodesinfetadora CISA a fim de garantir e agilizar o processo de limpeza efetivo através de termodesinfecção dos Produtos Para Saúde (PPS) que serão utilizados por pacientes atendidos no Hospital Professor Alberto Antunes (HUPAA).

Assegurar que todos os pacientes atendidos recebam a melhor assistência, garantindo o reprocessamento seguro e livre de infecção cruzada.

2. RESPONSÁVEL

Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Equipamento - Termodesinfetadora;
- Osmose reversa;
- Água;
- Detergente enzimático;
- Antioxidante para instrumentais;
- Lubrificante para instrumentais;
- EPI's: Óculos de proteção, avental impermeável manga longa, luvas emborrachadas de cano longo, protetor facial, máscara cirúrgica, gorro, sapato fechado de borracha e impermeável, protetor auricular.

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

4.1 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA AUTOLIMPEZA DA TERMO CISA

- 4.1.1 Realizar a higienização das mãos conforme protocolo institucional PRT.NSP.002 – Higienização das Mãos;
- 4.1.2 Paramentar-se com os EPI'S necessários (máscara cirúrgica, luvas de procedimento, gorro, sapato fechado);
- 4.1.3 Efetuar a reposição do detergente enzimático, antioxidante e lubrificante, quando necessário, observando mudanças na diluição das soluções;
- 4.1.4 Ligar a termodesinfetora no "Botão azul";
- 4.1.5 Esperar acender o display;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DENF.394 - Página 2/10	
Título do Documento	PROCEDIMENTO DE LIGAR A TERMODESINFECTADORA CISA	Emissão: 12/07/2024 Versão: 1.0	Próxima revisão: 12/07/2026

- 4.1.6 Tocar na tela para visualizar o menu principal;
- 4.1.7 Selecionar a opção “iniciar ciclo”;
- 4.1.8 Selecionar a opção “utensílios”;
- 4.1.9 Teclar no display os seguintes comandos: Utilizador: CPME; Senha: 1234; OK;
- 4.1.10 Selecionar P10 Autolimpeza;
- 4.1.11 Selecionar a opção iniciar;
- 4.1.12 Realizar o ciclo de autolimpeza diariamente no primeiro ciclo do dia.

4.2 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS

- 4.2.1 Realizar a higienização das mãos conforme protocolo institucional PRT.NSP.002 – Higienização das Mãos;
- 4.2.2 Paramentar-se com os EPI’S necessários (máscara cirúrgica, luvas de borracha de cano longo, avental impermeável, óculos de proteção ou protetor facial, gorro, sapato fechado);
- 4.2.3 Efetuar a reposição do detergente enzimático, antioxidante e lubrificante, quando necessário, observando mudanças na diluição das soluções;
- 4.2.4 Ligar a termodesinfectora no “Botão azul”;
- 4.2.5 Esperar acender o display;
- 4.2.6 Selecionar no display a opção “Abertura de porta”;
- 4.2.7 Organizar as pinças nas cestas (as pinças devem ficar abertas, não excedendo a capacidade das cestas);
- 4.2.8 Dispor as cestas nas prateleiras do rack da termodesinfectora;
- 4.2.9 Fechar a porta da termodesinfectora apertando, simultaneamente, o “Botão vermelho” e a opção na tela “ Fechamento da porta” pressionando os dois até o fechamento total da porta;
- 4.2.10 Tocar na tela para visualizar o menu principal;
- 4.2.11 Selecionar a opção “iniciar ciclo”;
- 4.2.12 Selecionar a opção “instrumentos”;
- 4.2.13 Teclar no display os seguintes comandos: Utilizador: CPME; Senha: 1234; OK;
- 4.2.14 Selecionar “P1 Instrumental”;
- 4.2.15 Verificar na tela seguinte se o modo “fase de secagem” está acionado e clicar em “iniciar”;
- 4.2.16 Após a finalização do ciclo, aguardar a abertura automática da porta do lado

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DENF.394 - Página 3/10	
Título do Documento	PROCEDIMENTO DE LIGAR A TERMODESINFECTADORA CISA	Emissão: 12/07/2024 Versão: 1.0	Próxima revisão: 12/07/2026

limpo;

4.2.17 Retirar os produtos para saúde e encaminhá-los para o setor de preparo e posteriormente esterilização.

4.3 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA LIMPEZA DE MATERIAL RESPIRATÓRIO

- 4.3.1 Realizar a higienização das mãos conforme protocolo institucional PRT.NSP.002 – Higienização das Mãos;
- 4.3.2 Paramentar-se com os EPI'S necessários (máscara cirúrgica, luvas de borracha de cano longo, avental impermeável, óculos de proteção ou protetor facial, gorro, sapato fechado);
- 4.3.3 Efetuar a reposição do detergente enzimático, antioxidante e lubrificante, quando necessário, observando a diluição das soluções;
- 4.3.4 Ligar a termodesinfectora no “Botão azul”;
- 4.3.5 Esperar acender o display;
- 4.3.6 Selecionar no display a opção “Abertura de porta”;
- 4.3.7 Dispor no rack específico os materiais respiratórios, observando as conexões dos canulados, traqueias e extensores;
- 4.3.8 Dispor as peças menores na cesta com tampa;
- 4.3.9 Fechar a porta da termodesinfectora apertando, simultaneamente, o “Botão vermelho” e a opção na tela “ Fechamento da porta” pressionando os dois até o fechamento total da porta;
- 4.3.10 Tocar na tela para visualizar o menu principal;
- 4.3.11 Selecionar a opção “iniciar ciclo”;
- 4.3.12 Selecionar a opção “anestesia”;
- 4.3.13 Teclar no display os seguintes comandos: Utilizador: CPME; Senha: 1234; OK;
- 4.3.14 Selecionar “P5 Ventilatório”;
- 4.3.15 Verificar na tela seguinte se o modo “fase de secagem” está acionado e clicar em “iniciar”;
- 4.3.16 Após a finalização do ciclo, aguardar a abertura automática da porta do lado limpo;
- 4.3.17 Retirar os produtos para saúde encaminhá-los, em recipiente com tampa, para embalagem e identificação.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DENF.394 - Página 4/10	
Título do Documento	PROCEDIMENTO DE LIGAR A TERMODESINFECTADORA CISA	Emissão: 12/07/2024 Versão: 1.0	Próxima revisão: 12/07/2026

5. RECOMENDAÇÃO

5.1 Comunicar ao enfermeiro do plantão quando houver mudança na diluição das soluções, o mesmo solicitará ao técnico da engenharia clínica a programação do equipamento para a nova diluição.

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

6.1 Em casos de não conformidade ou evento adverso, notificar no VIGHOSP de acordo com o item notificado;

6.2 Comunicar ao enfermeiro sobre a existência de materiais danificados, para providências.

7. FLUXOGRAMA

NA – NÃO APLICÁVEL.

8. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 15, de 15 de março de 2012. [cited 2020 Mar 17]. Available on: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.htm

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (SOBECC). **Práticas Recomendadas pela SOBECC**. 7ª edição. São Paulo, 2017.

LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE (PPS)/APECIH; coordenação de Eliane Molina Psaltikidis e Kazuko Uchikawa Graziano. 4ª edição. São Paulo: APECIH, 2021.


SANTOS, Leandro. CISABRASILE. Termodesinfectora Cisa. Manual de uso e Manutenção. Termo_V1.8_POR_S7-1200. Joinville SC.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DENF.394 - Página 5/10	
Título do Documento	PROCEDIMENTO DE LIGAR A TERMODESINFECTADORA CISA	Emissão: 12/07/2024 Versão: 1.0	Próxima revisão: 12/07/2026

9. APÊNDICE

APÊNDICE A – IMAGENS DO PASSO A PASSO PARA AUTOLIMPEZA DA TERMO CISA

1. Ligar a termodesinfectora no “Botão azul”
4. Teclar no display os seguintes comandos:
Utilizador: CPME; Senha: 1234; OK

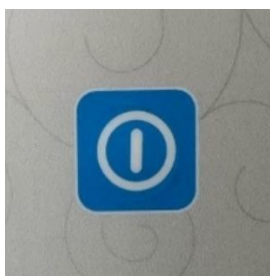

Fonte: Arquivo CPME/HUPAA



Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

2. Esperar acender o display, tocar na tela para visualizar o menu principal e selecionar a opção “iniciar ciclo”



Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

5. Selecionar P10 Autolimpeza




Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

3. Selecionar a opção “utensílios”



Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

6. Selecionar a opção iniciar

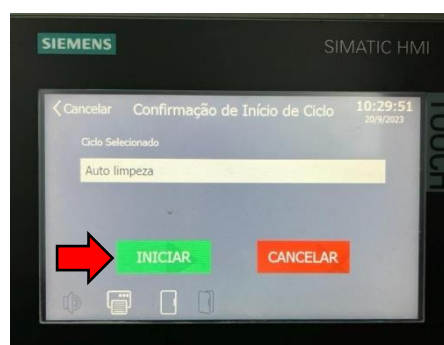


Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DENF.394 - Página 6/10	
Título do Documento	PROCEDIMENTO DE LIGAR A TERMODESINFECTADORA CISA	Emissão: 12/07/2024	Próxima revisão: 12/07/2026
		Versão: 1.0	


APÊNDICE B – IMAGENS DO PASSO A PASSO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS

1. Ligar a termodesinfectora no “Botão azul”

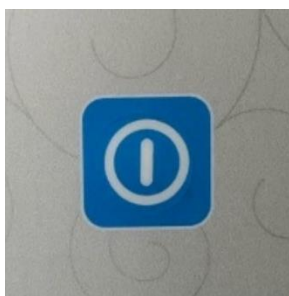

Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

2. Esperar acender o display, seleccionar no display a opção “Abertura de porta”

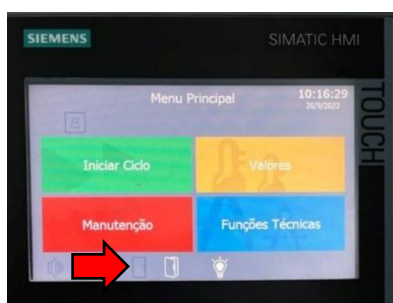

Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

3. Fechar a porta da termodesinfectora apertando, simultaneamente, o “Botão vermelho” e a opção na tela “Fechamento da porta” pressionando os dois até o fechamento total da porta



Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

4. Tocar na tela para visualizar o menu principal e seleccionar a opção “iniciar ciclo”



Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

5. Seleccionar a opção “instrumentos”



Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

6. Teclar no display os seguintes comandos:
Utilizador: CPME; Senha: 1234; OK



Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

7. Seleccionar “P1 Instrumental”




Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DENF.394 - Página 7/10	
Título do Documento	PROCEDIMENTO DE LIGAR A TERMODESINFECTADORA CISA	Emissão: 12/07/2024 Versão: 1.0	Próxima revisão: 12/07/2026

8. Verificar na tela seguinte se o modo “fase de secagem” está acionado e clicar em “iniciar”



Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

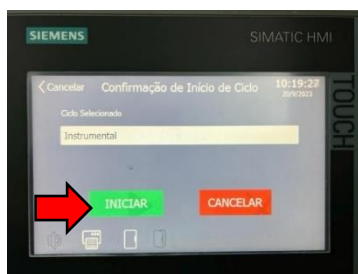

Fonte: Arquivo CPME/HUPAA


APÊNDICE C – IMAGENS DO PASSO A PASSO PARA LIMPEZA DE MATERIAL RESPIRATÓRIO

1. Ligar a termodesinfectora no “Botão azul”



Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

2. Esperar acender o display e selecionar no display a opção “Abertura de porta”

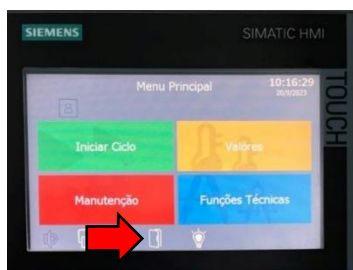

Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

3. Fechar a porta da termodesinfectora apertando, simultaneamente, o “Botão vermelho” e a opção na tela “ Fechamento da porta” pressionando os dois até o fechamento total da porta



Fonte: Arquivo CPME/HUPAA



- Tocar na tela para visualizar o menu principal e selecionar a opção “iniciar ciclo”



Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

4. Selecionar a opção “anestesia”



Fonte: Arquivo CPME/HUPAA


5. Teclar no display os seguintes comandos:
Utilizador: CPME; Senha: 1234; OK



Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DENF.394 - Página 8/10	
Título do Documento	PROCEDIMENTO DE LIGAR A TERMODESINFECTADORA CISA	Emissão: 12/07/2024 Versão: 1.0	Próxima revisão: 12/07/2026

6. Selecionar “P5 Ventilatório”

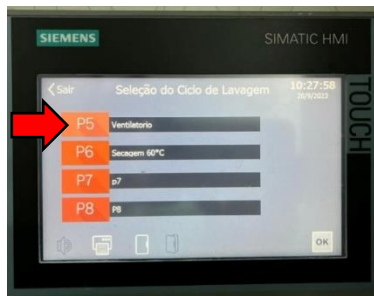

Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

7. Verificar na tela seguinte se o modo “fase de secagem” está acionado e clicar em “iniciar”;



Fonte: Arquivo CPME/HUPAA

10. ANEXO

NA - NÃO APLICÁVEL.

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	ELABORAÇÃO/REVISÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1.0	12/07/2024	Aurélia Jandira de Souza Melo Verçosa Amanda Rocha da Silva França Erica Cristina Santos Maria Cecília Cordeiro de Souza	Institui o Procedimento Operacional Padrão: Procedimento de ligar a termodesinfetadora CISA.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DENF.394 - Página 9/10	
Título do Documento	PROCEDIMENTO DE LIGAR A TERMODESINFECTADORA CISA	Emissão: 12/07/2024 Versão: 1.0	Próxima revisão: 12/07/2026

<p>Elaboração:</p> <p>Aurélia Jandira de Souza Melo Verçosa Enfermeira Responsável Técnico de Enfermagem da Central de Processamento de Materiais e Esterilização (CPME)</p> <p>Amanda Rocha da Silva França Enfermeira Assistencial da Central de Processamento de Materiais e Esterilização (CPME)</p> <p>Erica Cristina Santos Enfermeira Assistencial da Central de Processamento de Materiais e Esterilização (CPME)</p> <p>Maria Cecília Cordeiro de Souza Técnica de Enfermagem da Central de Processamento de Materiais e Esterilização (CPME)</p>	
<p>Análise:</p> <p>Danielle Coutinho De Souza Lins Machado Enfermeira da Comissão de Planejamento, elaboração, avaliação e implementação dos POP's de Enfermagem</p>	
<p>Validação:</p> <p>Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/ Unidade de Vigilância em Saúde.</p> <p>Setor de Gestão de Qualidade</p>	
<p>Aprovação:</p> <p>Claudia Sarmento Porto de Melo Chefe da Divisão de Enfermagem</p>	