
	PEC-033	PROCEDIMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES				
	Unidade: HUPAA	Setor: Eng. Clínica	Emissão: 14/07/2021	Revisão: 00	Página 1 de 1	
DOCUMENTO CONTROLADO						

➤ **Objetivo**

Padronizar a forma correta de desinfecção dos Equipamentos Médico-Hospitalares.

- a) O procedimento de desinfecção é apenas para garantir a ausência de agentes biológicos nos equipamentos. Não é da responsabilidade dos técnicos fazer a remoção de sujidades originadas pelos setores. Antes de recolher o equipamento, o responsável deve certificar que foram removidas do mesmo todas as sujidades biológicas;
- b) A desinfecção dos equipamentos é efetuada através do uso de estopa e detergente enzimático não abrasivo para equipamentos médico-hospitalares;
- c) A proporção da solução é de 5 ml de detergente para 1000 ml de água.
- d) É obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) durante a higienização dos equipamentos.

➤ **Diretrizes**

1. Direcionar o equipamento para a sala de higienização;
2. Vestir todos os equipamentos de proteção individual adequados para executar a higienização;
3. Borrifar a estopa com a solução de detergente enzimático e passar em toda a superfície do equipamento e seus acessórios;
4. Descartar os EPI's infectados no lixo adequado;
5. Higienizar as mãos;
6. Transferir o equipamento para a prateleira de aguardando análise.