

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.35- Página 1/5	
Título do Documento	COLETA DE FEZES PARA PESQUISA DE GORDURA FECAL	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

1. OBJETIVO(S)

Padronizar a técnica coleta de fezes para pesquisa de gordura fecal.

2. RESPONSÁVEL

Biólogos, Biomédicos, Farmacêuticos, Técnicos de Laboratório e Auxiliar de Laboratório.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 01 (um) coletor universal com espátula.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

4.1. Realizado pela Recepção do Laboratório do HUPAA:

- 4.1.1. Agendar o exame no Sistema com a solicitação médica;
- 4.1.2. Orientar ao paciente que será realizado o exame pesquisa de gordura nas fezes;
- 4.1.3. Gerar no Sistema uma etiqueta com os dados de identificação do paciente e colar no coletor;
- 4.1.4. Entregar o coletor ao paciente;
- 4.1.5. Orientar o paciente a seguir os passos para a coleta.

4.2. Realizado pelo Paciente:

- 4.2.1. Defecar em papel ou em urinol limpos evitando o contato com a urina;
- 4.2.2. Pegar com a espátula (já contida no coletor) mais ou menos 50g do material fecal e transferir para o coletor;
- 4.2.3. Guardar o frasco na geladeira até ser entregue no laboratório (não congelar);
- 4.2.4. Entregar para análise preferencialmente no mesmo dia da coleta.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.35- Página 2/5	
Título do Documento	COLETA DE FEZES PARA PESQUISA DE GORDURA FECAL	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

4.3. Realizado pela Recepção do Laboratório do HUPAA:

- 4.3.1.** Calçar luva de procedimento;
- 4.3.2.** Receber a amostra do paciente;
- 4.3.3.** Observar se a amostra está identificada;
- 4.3.4.** Colocar as amostras no carrinho de coleta e encaminhar para o Serviço de Parasitologia;
- 4.3.5.** Retirar as luvas;
- 4.3.6.** Higienizar as mãos conforme pop. SVSSP.SCIRAS.002, Fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica.

5. RECOMENDAÇÕES

5.1. Recomendações Referentes à Técnica da COLETA PARA PESQUISA DE GORDURA NAS FEZES:

- 5.1.1.** Adultos: Coletar a amostra de fezes diretamente em coletor universal;
- 5.1.2.** Crianças: Em uso de fralda, realizar a coleta das fezes em saquinho coletor de urina para impedir a absorção pela fralda da gordura fecal;

5.2. Recomendações quanto à segurança do trabalho:

- 5.2.1.** Para atividades envolvendo Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, devem ser utilizados os equipamentos de proteção individual disponibilizados pela empresa, como: luvas, toucas, máscaras descartáveis, máscara N95/carvão ativado, e outros que se fizerem necessário. Caso dúvidas procurar a segurança do trabalho da empresa prestadora do serviço;
- 5.2.2.** Participar de todos os treinamentos em matéria de Saúde e Segurança do Trabalho;
- 5.2.3.** Comunicar ao SOST qualquer alteração de atividades que a exponha a riscos diferentes dos habituais;
- 5.2.4.** Atender as recomendações do SOST e da Comissão Adorno zero quanto a não utilização de adornos em ambiente hospitalar;
- 5.2.5.** Atender as recomendações do SOST e da comissão gestora multidisciplinar de materiais perfuro cortantes.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.35- Página 3/5	
Título do Documento	COLETA DE FEZES PARA PESQUISA DE GORDURA FECAL	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

6.1. Caso o paciente não entregue a amostra de fezes no dia da coleta de sangue, o mesmo terá 05 (cinco) dias uteis para entregá-la, a contar da data da coleta sanguínea.

7. FLUXOGRAMA

NA - Não Aplicável

8. REFERÊNCIAS

DI DIO, R.; PRADAL, M.G.; FERNANDES, S.M.; JUNIOR, A.P.; LAZARINE, D.F.: CRIESP. Manual de procedimentos, ed. Lemos, São Paulo.

LABORATÓRIO HERMES PARDINI. Help de exames: gordura fecal. Disponível em: <<http://www.labhpardini.com.br/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=HPHOSTBS&App=HELPE&EXAME=F%7C%7CGF-D>>. Acesso em: 17 jul. 2018.

9. APÊNDICE

NA - Não Aplicável

10. ANEXO

NA - Não Aplicável

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.35- Página 4/5	
Título do Documento	COLETA DE FEZES PARA PESQUISA DE GORDURA FECAL	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	14/08/2018	Cícero Robeval Sena Costa Flávio dos Santos Teixeira	Estabelece o Manual com procedimentos de coleta para exames Laboratorial da UACAP-HUPAA-Ufal/Ebserh.
2	30/03/2022	Cícero Robeval Sena Costa Ligy Santos Lima Lamenha Vitor Hugo de Jesus	Revisão textual e adequação ao novo formulário do POP de acordo a norma de elaboração e controle de documentos – versão 2 de 01/08/2019 da Ebserh.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.35- Página 5/5	
Título do Documento	COLETA DE FEZES PARA PESQUISA DE GORDURA FECAL	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

<p>Elaboração:</p> <p>Cícero Robeval Sena Costa Técnico de Laboratório em Análises Clínicas/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p> <p>Ligy Santos Lima Lamenha Biomédico/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p> <p>Vitor Hugo de Jesus Técnico de Laboratório em Análises Clínicas/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p>	Data: 01/09/2022
<p>Análise:</p> <p>Ednaldo Almeida Gomes Chefe da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p>	Data: ___/___/_____
<p>Validação:</p> <p>Felipe Maciel Soares Pinheiro Engenheiro de Segurança do Trabalho/Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho</p> <p>Joyce Letice Barros Gomes Chefe da Unidade de Vigilância em Saúde</p> <p>Celina de Azevedo Dias Chefe do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente</p>	Data: ___/___/_____ Data: ___/___/_____ Data: ___/___/_____
<p>Aprovação:</p> <p>Valtuir Barbosa Felix Chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico</p>	Data: ___/___/_____

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte