

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.37- Página 1/5	
Título do Documento	COLETA DE FEZES PARA COPROCULTURA	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

1. OBJETIVO(S)

Padronizar a técnica coleta de fezes para coprocultura.

2. RESPONSÁVEL

Biólogos, Biomédicos, Farmacêuticos ,Técnicos de Laboratório e Auxiliar de Laboratório.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Coletor universal de tampa vermelha com espátula.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

4.1. Realizado pela Recepção do Laboratório do HUPAA:

- 4.1.1. Agendar o exame no Sistema com a solicitação médica;
- 4.1.2. Orientar ao paciente que será realizado o exame de coprocultura;
- 4.1.3. Gerar no Sistema uma etiqueta com identificação do paciente e colar na alateral do coletor;
- 4.1.4. Entregar o coletor ao paciente;
- 4.1.5. Orientar o paciente a seguir os passos para coleta.

4.2. Realizado pelo Paciente:

- 4.2.1. Defecar em urinol limpo evitando o contato com a urina;
- 4.2.2. Transferir parte das fezes diarreicas para o coletor;
- 4.2.3. Entregar na recepção do Laboratório o mais rápido possível.

4.3. Realizado pela Recepção do Laboratório do HUPAA:

- 4.3.1. Calçar as luvas de procedimento
- 4.3.2. Receber a amostra do paciente;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.37- Página 2/5	
Título do Documento	COLETA DE FEZES PARA COPROCULTURA	Emissão:01/09/2022	Próxima revisão: 01/09/2024
		Versão: 2	

4.3.3. Observar se a amostra está identificada;

4.3.4. Colocar as amostras no carrinho de coleta e encaminhar para o Serviço de Parasitologia;

4.3.5. Higienizar as mãos conforme pop. SVSSP.SCIRAS.002, Fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica.

5. RECOMENDAÇÕES

5.1. Recomendações Referente a Técnica da COLETA PARA COPROCULTURA:

5.1.1. Devem ser coletadas as fezes no início ou fase aguda da doença, quando os patógenos estão usualmente presentes em maior número e preferencialmente, antes do uso de antibióticos;

5.1.2. A amostra poderá ser conservada em geladeira no período máximo de 12 horas.

5.2. Recomendações quanto à segurança do trabalho:

5.2.1. Para atividades envolvendo Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, devem ser utilizados os equipamentos de proteção individual disponibilizados pela empresa, como: luvas, toucas, máscaras descartáveis, máscara N95/carvão ativado, e outros que se fizerem necessário. Caso dúvidas procurar a segurança do trabalho da empresa prestadora do serviço;

5.2.2. Participar de todos os treinamentos em matéria de Saúde e Segurança do Trabalho;

5.2.3. Comunicar ao SOST qualquer alteração de atividades que a exponha a riscos diferentes dos habituais;

5.2.4. Atender as recomendações do SOST e da Comissão Adorno zero quanto a não utilização de adornos em ambiente hospitalar;

5.2.5. Atender as recomendações do SOST e da comissão gestora multidisciplinar de materiais perfuro cortantes.

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

NA - Não Aplicável



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.37- Página 3/5	
Título do Documento	COLETA DE FEZES PARA COPROCULTURA	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

7. FLUXOGRAMA

NA - Não Aplicável

8. REFERÊNCIAS

DI DIO, R.; PRADAL, M.G.; FERNANDES, S.M.; JUNIOR, A.P.; LAZARINE, D.F.: CRIESP. Manual de procedimentos, ed. Lemos, São Paulo.

LABCLIM. Manual de Coleta. Cultura de Fezes 86p. 2016.

9. APÊNDICE

NA - Não Aplicável

10. ANEXO

NA - Não Aplicável



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.37- Página 4/5	
Título do Documento	COLETA DE FEZES PARA COPROCULTURA	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	14/08/2018	Cícero Robeval Sena Costa Flávio dos Santos Teixeira	Estabelece o Manual com procedimentos de coleta para exames Laboratorial da UACAP-HUPAA-UFAL/EBSERH.
2	30/03/2022	Cícero Robeval Sena Costa Ligya Santos Lima Lamenha Miriam Estela Galvão Lobo Sirlene dos Santos Lopes	Revisão textual e adequação ao novo formulário do POP de acordo a norma de elaboração e controle de documentos – versão 2 de 01/08/2019 da EBSERH.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.37- Página 5/5	
Título do Documento	COLETA DE FEZES PARA COPROCULTURA	Emissão:01/09/2022	Próxima revisão: 01/09/2024
		Versão: 2	

<p>Elaboração:</p> <p>Cícero Robeval Sena Costa Técnico de Laboratório em Análises Clínicas/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p> <p>Ligyta Santos Lima Lamenha Biomédica/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p> <p>Miriam Estela Galvão Lobo Biomédica/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p> <p>Sirlene dos Santos Lopes Técnico de Laboratório em Análises Clínicas/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p>	<p>Data: 01/09/2022</p>
<p>Análise:</p> <p>Ednaldo Almeida Gomes Chefe da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p>	<p>Data: ___/___/_____</p>
<p>Validação:</p> <p>Felipe Maciel Soares Pinheiro Engenheiro de Segurança do Trabalho/Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho</p> <p>Tereza Carolina Santos Cavalcante Enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/ Unidade de Vigilância em Saúde</p> <p>Celina de Azevedo Dias Chefe do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente</p>	<p>Data: ___/___/_____</p> <p>Data: ___/___/_____</p> <p>Data: ___/___/_____</p>
<p>Aprovação:</p> <p>Valtuir Barbosa Felix Chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico</p>	<p>Data: ___/___/_____</p>

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte