

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.31- Página 1/4	
Título do Documento	COLETA PARA PARASITOLÓGICO DE FEZES (AMOSTRA ÚNICA)	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

1. OBJETIVO(S)

Padronizar a técnica coleta para parasitológico de fezes (amostra única).

2. RESPONSÁVEL

Biólogos, Biomédicos, Farmacêuticos ,Técnicos de Laboratório e Auxiliar de Laboratório.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Coletor universal com espátula (Amostra Única).

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

4.1. Realizado pela Recepção do Laboratório do HUPAA:

- 4.1.1. Agendar o exame no Sistema com a solicitação médica;
- 4.1.2. Orientar ao paciente que será realizado o exame parasitológico de fezes;
- 4.1.3. Gerar uma etiqueta com a identificação do paciente e colcar no corpo do coletor;
- 4.1.4. Entregar o coletor ao paciente;
- 4.1.5. Orientar o paciente a seguir os passos para coleta;

4.2. Realizado pelo Paciente:

- 4.2.1. Defecar em papel ou em urinol limpo evitando o contato com a urina;
- 4.2.2. Pegar com a espátula (já contida no coletor) mais ou menos 50g do material fecal de preferência a parte central do bolo fecal e transferir para o coletor;
- 4.2.3. Guardar o frasco na geladeira até ser entregue no laboratório (não congelar);
- 4.2.4. Entregar para análise preferencialmente no mesmo dia da coleta;
- 4.2.5. Lavar as mãos após a coleta.

4.3. Realizado pela Recepção do Laboratório do HUPAA:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.31- Página 2/4	
Título do Documento	COLETA PARA PARASITOLÓGICO DE FEZES (AMOSTRA ÚNICA)	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

- 4.3.1. Calçar luvas de procedimento;
- 4.3.2. Receber a amostra do paciente;
- 4.3.3. Observar se a amostra está identificada;
- 4.3.4. Colocar a amostra em caixa térmica com gelo e encaminhar para o Serviço de Parasitologia;
- 4.3.5. Retirar as luvas;
- 4.3.6. Higienizar as mãos conforme pop. SVSSP.SCIRAS.002, Fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica.

5. RECOMENDAÇÕES

5.1. Recomendações Referente a Técnica da COLETA PARA PARASITOLÓGICO DE FEZES (AMOSTRA ÚNICA):

5.1.1. No caso da amostra única, esta poderá ser entregue no dia seguinte desde que mantida sob refrigeração entre +2 a +8°C;

5.2. Recomendações quanto à segurança do trabalho:

5.2.1. Para atividades envolvendo Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, devem ser utilizados os equipamentos de proteção individual disponibilizados pela empresa, como: luvas, toucas, máscaras descartáveis, máscara N95/carvão ativado, e outros que se fizerem necessário. Caso dúvidas procurar a segurança do trabalho da empresa prestadora do serviço;

5.2.2. Participar de todos os treinamentos em matéria de Saúde e Segurança do Trabalho;

5.2.3. Comunicar ao SOST qualquer alteração de atividades que a exponha a riscos diferentes dos habituais;

5.2.4. Atender as recomendações do SOST e da Comissão Adorno zero quanto a não utilização de adornos em ambiente hospitalar;

5.2.5. Atender as recomendações do SOST e da comissão gestora multidisciplinar de materiais perfuro cortantes.

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

6.1. Caso o paciente não entregue a amostra de fezes no dia da coleta de sangue, o mesmo terá 05 (cinco) dias uteis para entregá-la, a contar da data da coleta sanguínea.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.31- Página 3/4	
Título do Documento	COLETA PARA PARASITOLÓGICO DE FEZES (AMOSTRA ÚNICA)	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

7. FLUXOGRAMA

NA - Não Aplicável

8. REFERÊNCIAS

DI DIO, R.; PRADAL, M.G.; FERNANDES, S.M.; JUNIOR, A.P.; LAZARINE, D.F.: CRIESP. Manual de procedimentos, ed. Lemos, São Paulo.

LABCLIM. Manual de Coleta. Fezes Parasitológico 85p. 2016.

9. APÊNDICE

NA - Não Aplicável

10. ANEXO

NA - Não Aplicável

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	14/08/2018	Cícero Robeval Sena Costa Flávio dos Santos Teixeira	Estabelece o Manual com procedimentos de coleta para exames Laboratorial da UACAP-HUPAA-Ufal/Ebserh.
2	07/02/2022	Cícero Robeval Sena Costa Fabiana Santos de Moraes Ligya Santos Lima Lamenha Sirlene dos Santos Lopes	Revisão textual e adequação ao novo formulário do POP de acordo a norma de elaboração e controle de documentos – versão 2 de 01/08/2019 da Ebserh.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.31- Página 4/4	
Título do Documento	COLETA PARA PARASITOLÓGICO DE FEZES (AMOSTRA ÚNICA)	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

<p>Elaboração:</p> <p>Cícero Robeval Sena Costa Técnico de Laboratório em Análises Clínicas/Unidade de Laboratório de Análise Clínicas e Anatomia Patológica</p> <p>Fabiana Santos de Moraes Técnico de Laboratório em Análises Clínicas/ Unidade de Laboratório de Análise Clínicas e Anatomia Patológica</p> <p>Ligyta Santos Lima Lamenha Biomédica/ Unidade de Laboratório de Análise Clínicas e Anatomia Patológica</p> <p>Sirlene dos Santos Lopes Técnico de Laboratório em Análises Clínicas/ Unidade de Laboratório de Análise Clínicas e Anatomia Patológica</p>	<p>Data: 01/09/2022</p>
<p>Análise:</p> <p>Ednaldo Almeida Gomes Chefe da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p>	<p>Data: ___/___/_____</p>
<p>Validação:</p> <p>Felipe Maciel Soares Pinheiro Engenheiro de Segurança do Trabalho/Chefe da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho</p> <p>Tereza Carolina Santos Cavalcante Enfermeira/Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Unidade de Vigilância em Saúde</p> <p>Celina de Azevedo Dias Chefe do Setor de Gestão da Qualidade</p>	<p>Data: ___/___/_____</p> <p>Data: ___/___/_____</p> <p>Data: ___/___/_____</p>
<p>Aprovação:</p> <p>Valtuir Barbosa Felix Chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico</p>	<p>Data: ___/___/_____</p>

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte