

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACAP.IMU.002 - Página 1/4	
Título do Documento	TESTES RÁPIDO PARA HIV	Emissão: 25/10/2023 Versão: 4	Próxima revisão: 25/10/2025

1. OBJETIVO

Detectar de forma qualitativa anticorpos de todos os isotipos (IgG, IgM, IgA) específicos para HIV- 1 incluindo o grupo O e HIV-2 simultaneamente em soro plasma e sangue total humano.

2. RESPONSÁVEL

Biomédicos, Biólogos, Farmacêuticos e Técnicos de Laboratório.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Kit HIV teste rápido ABON;
- EPIs (jaleco, luvas de procedimento, máscaras, óculos, sapato fechado, touca);
- Amostra.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 4.1.** Lavar as mãos antes e após o procedimento;
- 4.2.** Remover o dispositivo da embalagem de alumínio, colocá-lo sobre uma superfície limpa, seca e plana;
- 4.3.** Preencher todo o volume do tubo capilar fornecido no kit com sangue total , soro ou plasma(aproximadamente 50µL);
- 4.4.** Encostar o tubo capilar na cavidade da amostra (S) até que o volume aspirado seja transferido naturalmente para o dispositivo do teste;
- 4.5.** Imediatamente após a colocação da amostra adicionar 02 (quatro) gotas do diluente de ensaio na mesma cavidade (S) onde foi colocada a amostra e aguardar 10 minutos;
- 4.6.** Resultado da Leitura:

Uma linha colorida aparecerá do lado esquerdo da janela de resultados indicando que o teste está funcionando corretamente (linha controle – C). Caso a amostra seja positiva para a pesquisa de anticorpos anti HIV I e II uma ou duas linhas coloridas aparecerão do lado direito da janela de resultados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACAP.IMU.002 - Página 2/4	
Título do Documento	TESTES RÁPIDO PARA HIV	Emissão: 25/10/2023 Versão: 4	Próxima revisão: 25/10/2025

5. RECOMENDAÇÕES

5.1. Recomendações Referente a Técnica do POP: Teste Rápido para HIV

- 5.1.1. Desprezar as amostras que não estejam em conformidade tais como: soro hemolisados, lipêmicos, ou com contaminação bacteriana visível;
- 5.1.2. Interpretar o resultado entre 10 a 20 minutos. Não interpretar antes ou depois de 20 minutos;
- 5.1.3. Em caso de resultado positivo o teste deverá ser realizado por outro kit (fabricante) pela mesma metodologia, confirmada a reação é realizada uma nova coleta e feito o teste confirmatório pela metodologia westblot.

5.2. Recomendações quanto à Segurança do Trabalho:

- 5.2.1. Para atividades envolvendo Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, devem ser utilizados os equipamentos de proteção individual disponibilizados pela empresa, como: luvas, toucas, máscaras descartáveis, máscara N95/carvão ativado, e outros que se fizerem necessário. Caso dúvidas procurar a segurança do trabalho da empresa prestadora do serviço;
- 5.2.2. Participar de todos os treinamentos em matéria de Saúde e Segurança do Trabalho;
- 5.2.3. Comunicar ao SOST qualquer alteração de atividades que a exponha a riscos diferentes dos habituais;
- 5.2.4. Atender as recomendações do SOST e da Comissão Adorno zero quanto a não utilização de adornos em ambiente hospitalar;
- 5.2.5. Atender as recomendações do SOST e da comissão gestora multidisciplinar de materiais perfuro cortantes.

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

- 6.1. As amostras não conforme devem ser rejeitadas pelo laboratório;
- 6.2. O setor de imunologia deverá informar a secretaria quanto as amostras não conforme para que seja solicitado nova amostra.

7. FLUXOGRAMA

NA – Não Aplicável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACAP.IMU.002 - Página 3/4	
Título do Documento	TESTES RÁPIDO PARA HIV	Emissão: 25/10/2023	Próxima revisão: 25/10/2025
		Versão: 4	

8. REFERÊNCIAS

ABON. Bula HIV Teste ABON HIV 1 / 2 / 0: Kit para detectar de forma qualitativa anticorpos de todos os isotipos (IgG, IgM, IgA) específicos para HIV- 1 incluindo o grupo O e HIV-2 simultaneamente em soro plasma e sangue total humano.

9. APÊNDICE

NA – Não Aplicável.

10. ANEXO

NA – Não Aplicável.

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	26/08/2022	Ligya Santos Lima Lamenha Cícero Robeval Sena Costa	Estabelece o procedimento operacioanl padrão para Teste Rápido para HIV.
2	26/08/2022	Ligya Santos Lima Lamenha Cícero Robeval Sena Costa	Revisão textual e adequação ao novo formulário do POP de acordo com o Manual de Padronização de POPs 1a edição – 2014 – Ebserh.
3	17/08/2020	Cícero Robeval Sena Costa Arliete Ramos Sales	Revisão textual e adequação ao novo formulário do POP de acordo com o Manual de Padronização de POP's 1ª edição - 2019 Ebserh
4	25/10/2023	Cícero Robeval Sena Costa Eliege Maria dos Santos Ligya Santos Lima Lamenha	Revisão textual e adequação ao novo formulário do POP de acordo com a Norma De Elaboração e Controle de Documentos – versão 2 de 01/08/2019 da Ebserh.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACAP.IMU.002 - Página 4/4	
Título do Documento	TESTES RÁPIDO PARA HIV	Emissão: 25/10/2023 Versão: 4	Próxima revisão: 25/10/2025

Elaboração: Cícero Robeval Sena Costa Técnico de Laboratório em Análises Clínicas/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica Eliege Maria dos Santos Técnica de Laboratório em Análises Clínicas/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ligya Santos Lima Lamenha Biomédica/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica	Data: ___/___/_____
Análise: Ednaldo Almeida Gomes Chefe da Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica	Data: ___/___/_____
Validação: Felipe Maciel Soares Pinheiro Engenheiro de Segurança do Trabalho/Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/ Unidade de Vigilância em Saúde Setor de Gestão da Qualidade	Data: ___/___/_____ Data: ___/___/_____
Aprovação: Valtuir Barbosa Felix Chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	Data: ___/___/_____

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte