



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF. 005 - Página 1/5	
Título do Documento	TESTE DO CARDIOVERSOR – CMOS DRAKE	Emissão: 25/04/2022	Próxima revisão: 25/04/2024
		Versão: 02	

1. CONCEITO

Trata-se de checar diariamente a funcionalidade e efetividade do cardioversor.

2. RESPONSÁVEL

- Enfermeiros.

3. OBJETIVO

- Confirmar o funcionamento adequado do cardioversor.

4. MATERIAIS

- Caneta;
- Impresso para anotação;
- Luvas de procedimento.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 1) Higienizar às mãos;
- 2) Paramentar-se com EPIs (luvas de procedimento);
- 3) Verificar se o cabo de energia está ligado na tomada;
- 4) Desligue o cabo de energia e verifique o acionamento da bateria;
- 5) Conecte novamente o cabo a fonte de energia;
- 6) Ligue o aparelho, nessa tecla:



- 7) Selecione a carga de 20 joules, girando o botão de seleção;



- 8) Carregue o aparelho, apertando o botão:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO
TOCANTINS
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF. 005 - Página 2/5	
Título do Documento	TESTE DO CARDIOVERSOR – CMOS DRAKE	Emissão: 25/04/2022	Próxima revisão: 25/04/2024
		Versão: 02	



- 9) Perceba o sinal sonoro e visual indicando o disparo da carga;
- 10) Pressione as pás exercendo uma pressão equivalente ao peso de 10Kg sobre os bornes, em seguida pressione simultaneamente os botões presentes nas pás e dispare o choque no borne de teste de disparo:



- 11) Retorne as pás ao encaixe;
- 12) Desligue o cardioversor;
- 13) Manter o cardioversor ligado na corrente elétrica;
- 14) Registrar no formulário assinalando sim ou não na coluna “Teste Diário – funcionando” e assinar e carimbar;

OBSERVAÇÕES

Testar o cardioversor a cada início de plantão, deixando o mesmo ligado diretamente à corrente elétrica, registrando em formulário próprio, o responsável pelo teste e o estado de funcionamento do equipamento.

Caso o cardioversor não esteja funcionando deverá ser preenchido o formulário de não conformidade e enviado a Divisão de Enfermagem;

O registro em formulário de não conformidade deve ser realizado com letra legível, e assinado por extenso ou nos casos em que for utilizado rubrica deve conter o carimbo do responsável;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO
TOCANTINS
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF. 005 - Página 3/5	
Título do Documento	TESTE DO CARDIOVERSOR – CMOS DRAKE	Emissão: 25/04/2022	Próxima revisão: 25/04/2024
		Versão: 02	

6. REFERÊNCIAS

MATO GROSSO DO SUL. Secretaria de Estado da Saude/Cordenadoria de Urgência. **POP – Teste docardioversor.** Disponível em: <http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/wp-content/uploads/sites/30/2017/12/POP-ENF-URG-N%C2%BA-28-TESTE-DE-CARDIOVERSOR.pdf>. Acesso em: 19 dez. de 2019.

CMOS DRAKE. **Manual do usuário - Cardioversor Bifásico Vivo.** Versão 01. Disponível em: <https://cmosdrake.com.br/produto/cardioversor-bifasico-vivo/>. Acesso em: 19 dez. De 2019.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO
TOCANTINS
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF. 005 - Página 5/5	
Título do Documento	TESTE DO CARDIOVERSOR – CMOS DRAKE	Emissão: 25/04/2022	Próxima revisão: 25/04/2024
		Versão: 02	

7. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	31/12/2019	Elaboração da Versão Inicial.
02	25/04/2022	Incluído item em materiais e conceito.

Elaboração: Tallyta Barros Ribeiro - Enfermeira; Mayra deAlmeida Xavier Alencar – Enfermeira	Data: 31/12/2019
Revisão: Elzivania de Carvalho silva – Técnica em Enfermagem Clayra Rodrigues de Sousa Monte Araújo – Enfermeira	Data: 25/04/2024
Validação: Setor de Gestão da Qualidade	Data: 01/07/2022
Aprovação: Áurea Maria Casagrande da Luz – Enfermeira RT Gestão assistencial Nadja de Paula Barros de Sousa - Enfermeira RT Gestão técnica Raimunda Maria Ferreira de Almeida - Enfermeira RT Gestão de ensino	Data: 11/08/2022