



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UCA/CME.040 - Página 1/2	
Título do Documento	Técnica para a desinfecção de protetor facial no Plantão / Ala COVID-19	Emissão: 14/05/2020 Versão:001	Próxima revisão: 14/05/2022

1. OBJETIVO(S)

- ✓ Adotar a técnica de limpeza e desinfecção do protetor facial;
- ✓ Reduzir ao máximo a carga microbiana;
- ✓ Proporcionar artigos limpos e desinfetados para o uso seguro.

2. MATERIAL

- Protetor Facial;
- Frasco com solução de Cloreto de Didecildimetilamônio;
- Papel Toalha;
- Luvas de Procedimento;
- Máscara N95;
- Gorros;
- Saco Plástico.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- ✓ Inicie com a higienização simples das mãos conforme o POP do HDT-UFT;
- ✓ Paramente-se com os EPI's requeridos para a técnica;
- ✓ Prepare previamente todo o material necessário ao procedimento;
- ✓ Borrife a espuma (Cloreto de Didecildimetilamônio) diretamente sobre a viseira e hastes do protetor facial;
- ✓ Com o auxílio de um papel toalha espalhe a espuma sobre toda a superfície do protetor facial;
- ✓ Deixe agir por três minutos, tempo recomendado pelo fabricante;
- ✓ Realize o enxague da viseira ou use o papel toalha umedecido com água para retirar o residual de solução desinfetante;
- ✓ Seque com um papel toalha;
- ✓ Acondicione em sacos plásticos identificados com o nome do profissional;
- ✓ Despreze o papel toalha no local apropriado, infectante;
- ✓ Mantenha a área limpa e organizada;
- ✓ Retire as luvas de procedimento e faça a higienização das mãos.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UCA/CME.040 - Página 2/2	
Título do Documento	Técnica para a desinfecção de protetor facial no Plantão / Ala COVID-19	Emissão: 14/05/2020 Versão:001	Próxima revisão: 14/05/2022

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA. **Resolução nº 15, de 15 de março de 2012.** Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União; 2012.

Ficha técnica Surfa Safe Premium, espuma detergente para superfícies e dispositivos médicos. Laboratório Anios.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Elaboração Marcos Antônio Silva Batista – Chefe da UCA/CME	Data: 04/05/2020
Validação Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente	Data: 08/05/2020
Aprovação TRR COVID-19 do HDT-UFT	Data: 08/05/2020

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte