

|                     |   |                                |                           |
|---------------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| Tipo do Documento   | <b>ROTINA OPERACIONAL PADRÃO</b>  | ROP.UMULTI.009 - Página 1/2    |                           |
| Título do Documento | <b>PREPARO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA ENVIO À ESTERILIZAÇÃO</b> | Emissão: 9/9/2024<br>Versão: 2 | Próxima revisão: 9/9/2026 |

### 1. OBJETIVO

- Implantar normas e rotinas que minimizem os riscos ocupacionais a que estão expostos os profissionais de saúde;
- Estabelecer as medidas preventivas para evitar a contaminação do paciente;
- Garantir processos de desinfecção e esterilização adequados e eficazes.

|   |   |
|---|---|
| <b>Conceito:</b> Processo pelo qual se elimina sujidades e reduz carga microbiana de artigos semicríticos   |   |
| <b>Responsável:</b> Fisioterapeuta  | <b>Responsáveis pela execução:</b> Técnico de enfermagem do setor, fisioterapeuta.  |
| <b>Finalidades:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remover sujidades;</li> <li>• Reduzir carga microbiana;</li> <li>• Prevenir infecções relacionadas à assistência;</li> <li>• Testar funcionalidade.</li> </ul> | <b>Indicações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpeza e desinfecção dos equipamentos de fisioterapia respiratória.</li> </ul> |
|   | <b>Contra-indicações/Restrições:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não há.</li> </ul>  |

### 2. MATERIAL

- EPIs (Equipamentos de Proteção Individual): máscara, luva para procedimentos não cirúrgicos, jaleco;
- Bandeja com os equipamentos contaminados;
- Compressas limpas;
- Álcool 70%;
- Material de papelaria (fita adesiva, caneta, papel) saco plástico;
- Bloco de papel de encaminhamento de materiais esterilizados.

### 3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Serviço de Fisioterapia Respiratória do Centro de Reabilitação da Unidade Multiprofissional do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

### 4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

| Descrição dos Procedimentos   |   |
|---|---|
| Procedimentos   | Justificativas                            |
| 1. Higienizar mãos  | 1. Evitar a transmissão de microrganismos |
| 2. Reunir os materiais necessários  | 2. Economizar tempo                       |
| 3. Colocar os materiais sobre a bancada limpa da pia do expurgo                       | 3. Facilitar a execução do procedimento   |
| 4. Colocar EPIs   | 4. Proteção do profissional               |
| 5. Desconectar as partes dos equipamentos da fisioterapia respiratória                | 5. Facilitar limpeza                      |
| 6. Embeber outra compressa limpa com álcool 70% e imergir peças menores no álcool 70% | 6. Facilitar a execução do procedimento   |
| 7. Friccionar a compressa embebida de álcool nos                                      | 7. Remoção/redução de microrganismos pelo |

Cópia Eletrônica não Controlada

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins lucrativos.

© 2024, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados

www.Ebserh.gov.br

|                     |   |                                |                           |
|---------------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| Tipo do Documento   | <b>ROTINA OPERACIONAL PADRÃO</b>  | ROP.UMULTI.009 - Página 2/2    |                           |
| Título do Documento | <b>PREPARO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA ENVIO À ESTERILIZAÇÃO</b> | Emissão: 9/9/2024<br>Versão: 2 | Próxima revisão: 9/9/2026 |

|   |  |
|---|--|
| equipamentos  | processo de desinfecção de baixo nível                               |
| 8. Reconectar as partes dos equipamentos e verificar a existência de danos              | 8. Recompôr material   |
| 9. Retirar EPIS   | 9. Promover ambiente favorável                                       |
| 10. Dar destino adequado aos materiais, devidamente identificados, embalados e com data | 10. Promover ambiente favorável e dar destino adequado aos materiais |
| 11. Higienizar as mãos  | 11. Evitar a transmissão de microrganismos                           |

#### 4.1 Limpeza do Instrumental

- Higienizar as mãos, conforme Procedimento Operacional “Higienização das Mãos, *link*: [https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-ufmt/documentos/procedimentos-e-rotinas-operacionais-padrao/pops/POP.DENF.002Higienizacao\\_das\\_maos\\_versao6.pdf](https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-ufmt/documentos/procedimentos-e-rotinas-operacionais-padrao/pops/POP.DENF.002Higienizacao_das_maos_versao6.pdf)

#### 5. REFERÊNCIAS

EBSERH. Hospital de Clínicas da Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). Divisão de Enfermagem. Procedimento Operacional Padrão “Higienização das Mãos”, disponível em: [https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-ufmt/documentos/procedimentos-e-rotinas-operacionais-padrao/pops/POP.DENF.002Higienizacao\\_das\\_maos\\_versao6.pdf](https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-ufmt/documentos/procedimentos-e-rotinas-operacionais-padrao/pops/POP.DENF.002Higienizacao_das_maos_versao6.pdf) Acesso em 9/9/2024.

#### 6. HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA      | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO                     |
|--------|-----------|--|
| 2      | 21/7/2023 | Revisão da Rotina Operacional Padrão (ROP) |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p><b>Elaboração – versão 1</b><br/>Maria de Lourdes Borges, Maria de Lourdes da Silva, Renata de Melo Batista</p> <p><b>Validação</b><br/>Priscila Salge Mauad Rodrigues, chefe da Unidade de Reabilitação substituta<br/>Rodrigo Juliano Molina, chefe do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente substituto</p> <p><b>Registro, análise e revisão</b><br/>Ana Paula Corrêa Gomes, chefe da Unidade de Planejamento</p> <p><b>Aprovação</b><br/>Marina Casteli Rodrigues Monteiro, chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico</p> | Data: 28/12/2020 |
| <p><b>Revisão e atualização – versão 2</b><br/>Maria de Lourdes da Silva, Renata de Melo Batista</p> <p><b>Validação</b><br/>Luana Pereira Cunha Barbosa, chefe da UMULTI substituta<br/>Raquel Bessa Ribeiro Rosalino, chefe da Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente</p> <p><b>Registro, análise e revisão</b><br/>Ana Paula Corrêa Gomes, chefe da Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos, em 9/9/2024</p> <p><b>Aprovação</b><br/>Fernando de Freitas Neves, chefe da Divisão de Gestão do Cuidado</p>       | Data: 9/9/2024   |