

PROTOCOLO  
NÚCLEO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE  
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 06/2018

**LIMPEZA E DESINFECÇÃO  
DE BOMBA DE INFUSÃO**

Versão 1.0

NÚCLEO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS  
DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 06/2018

**LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE BOMBA DE IN-  
FUSÃO**

**Versão 1.0**

© 2018 Ebserh. Todos os direitos reservados  
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh  
www.Ebserh.gov.br

Material produzido por **Paula Bruno de Martin** em parceria com Setor de Pediatria HU-UFJF.  
Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.

Hospital Universitário da Universidade Federal De Juiz de Fora (HU-UFJF),  
administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) – Mi-  
nistério da Educação

PROTOCOLO ASSISTENCIAL. Limpeza e desinfecção de bomba de infu-  
são. Juiz de Fora- MG: HU-UFJF/Ebserh, 2018.

Descritores: 1. Pop                    2. Limpeza e Desinfecção de bomba de infusão  
3. Pediatria

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA**  
**ADMINISTRADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

Rua Catulo Breviglieri, s/n  
Bairro Santa Catarina | CEP: 36036-110 | Juiz de Fora-MG  
Telefone: (32) 4009-5159 | huufjf.ebserh.gov.br

**ROSSIELI SOARES DA SILVA**

Ministro de Estado da Educação

**KLEBER DE MELO MORAIS**

Presidente da Ebserh

**DIMAS AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO**

Superintendente do HU-UFJF

**LUDMILLA RODRIGUES COSTA GONÇALVES**

Gerente Administrativo do HU-UFJF

**SERGIO PAULO DOS SANTOS PINTO**

Gerente de Atenção à Saúde do HU-UFJF

**ANGELA MARIA GOLNER**

Gerente de Ensino e Pesquisa do HU-UFJF


**EXPEDIENTE**  
**DIVISÃO DE ENFERMAGEM**  
**GERÊNCIA DE ENFERMAGEM PEDIATRIA**

**Elaborado por :****(06/2018)****Paula Bruno de Martin  
Tatiana Siqueira Saraiva  
Bianca Naiara Pio Pereira Morais  
Maria Ligia da Silva Marta****Gerente de Enfermagem da pediatria do HU/UFJF  
Enfermeira Assistencial  
Técnica de Enfermagem  
Técnica de Enfermagem**

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Coordenador do protocolo</b>	<b>Validação por especialistas</b>
06/2018	1.0	Paula Bruno de Martin Gerente de Enfermagem da Pediatria HU/UFJF	Maria Auxiliadora Vieira Mendes- Chefe Divisão de enfermagem Lucio Henrique de Oliveira- Chefe da unidade de saúde da criança e adolescente Aline Landim Farani Faria – Enfermeira de Saúde da Criança e Adolescente Ana Paula Rocha Gomes – Enfermeira Oncologista Luciana Cunha Piva- Enfermeira Assistencial Tamires Rodrigues Gonçalves- Enfermeira Assistencial Nara Gonçalves da Rocha Vianna- Enfermeira Assistencial Juliana Laurentino Rosas- Enfermeira Assistencial

## SUMÁRIO

1. DEFINIÇÃO.....	6
2. OBJETIVO.....	6
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.....	6
4. PROCEDIMENTO.....	7
4.1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.....	7
4.2 RESPONSÁVEIS.....	7
4.3 DESCRIÇÃO.....	7
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	8

	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Hospital Universitário	Data: 06/18 Versão: 1.0
<b>Protocolo Assistencial de Enfermagem pediátrica</b> <b>LIMPEZA DE DESINFECÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO</b>		

### 1. DEFINIÇÃO

Processo que visa padronizar a limpeza e desinfecção de bomba de infusão, promovendo a melhoria da qualidade da assistência prestada aos clientes.

### 2. OBJETIVO

Padronizar a limpeza e desinfecção de bomba de infusão para promover a qualidade e eficiência do procedimento para os clientes internados no setor de pediatria.

### 3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Na unidade de internação do Hospital Universitário de Juiz de fora, setor de pediatria do HU UFJF unidade Santa Catarina.

## 4. PROCEDIMENTO

### 4.1 Equipamentos e materiais necessários

Compressas ou panos limpos, água, detergente neutro, luva de procedimentos, álcool 70%

### 4.2 Responsável: Enfermeiro, técnico e auxiliares de enfermagem

### 4.3 Descrição

- Reunir o material necessário;
- Calçar luva de procedimento;
- Desligar o aparelho, desconectando da tomada de energia antes de iniciar a desinfecção;
- Limpar a superfície externa com pano limpo e umedecido com água e detergente neutro;
- Enxaguar a bomba com pano limpo e seco;
- Na bomba de infusão, abrir a porta e limpar a superfície interna da mesma forma;
- Secar com pano limpo e seco;
- Fazer desinfecção com álcool a 70%;
- Retirar as luvas e descartar o material em lugar adequado;

## 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Manual de limpeza, desinfecção, esterilização e antissepsia SCIH/HCC, Outubro de 2008.  
Manual do fabricante.

