

PROTOCOLO
NÚCLEO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 06/2018

**LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DE INCUBADORA**

Versão 1.0

NÚCLEO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS
DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA 06/2018

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE INCUBADORA

Versão 1.0

© 2018 Ebserh. Todos os direitos reservados
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh
www.Ebserh.gov.br

Material produzido por **Paula Bruno de Martin** em parceria com Setor de Pediatria HU-UFJF.
Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins comerciais.

Hospital Universitário da Universidade Federal De Juiz de Fora (HU-UFJF),
administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) – Mi-
nistério da Educação

PROTOCOLO ASSISTENCIAL. Limpeza e desinfecção de incubadora. Juiz
de Fora- MG: HU-UFJF/Ebserh, 2018.

Descritores: 1. Pop 2. Limpeza e Desinfecção de Incubadora 3.
Pediatria

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
ADMINISTRADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

Rua Catulo Breviglieri, s/n
Bairro Santa Catarina | CEP: 36036-110 | Juiz de Fora-MG
Telefone: (32) 4009-5159 | huufjf.ebserh.gov.br

ROSSIELI SOARES DA SILVA

Ministro de Estado da Educação

KLEBER DE MELO MORAIS

Presidente da Ebserh

DIMAS AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO

Superintendente do HU-UFJF

LUDMILLA RODRIGUES COSTA GONÇALVEZ

Gerente Administrativo do HU-UFJF

SERGIO PAULO DOS SANTOS PINTO

Gerente de Atenção à Saúde do HU-UFJF

ANGELA MARIA GOLNER

Gerente de Ensino e Pesquisa do HU-UFJF

**EXPEDIENTE
DIVISÃO DE ENFERMAGEM
GERÊNCIA DE ENFERMAGEM PEDIATRIA**

Elaborado por:**(06/2018)****Paula Bruno de Martin
Tatiana Siqueira Saraiva
Bianca Naiara Pio Pereira Moraes
Maria Ligia da Silva Marta****Gerente de Enfermagem da pediatria do HU/UFJF
Enfermeira Assistencial
Técnica de Enfermagem
Técnica de Enfermagem**

Data	Versão	Coordenador do protocolo	Validação por especialistas
06/2018	1.0	Paula Bruno de Martin Gerente de Enfermagem da Pediatria HU/UFJF	Maria Auxiliadora Viera Mendes- Chefe Divisão de enfermagem Lucio Henrique de Oliveira- Chefe da unidade de saúde da criança e adolescente Aline Landim Farani Faria – Enfermeira de Saúde da Criança e Adolescente Ana Paula Rocha Gomes – Enfermeira Oncologista Luciana Cunha Piva- Enfermeira Assistencial Tamires Rodrigues Gonçalves- Enfermeira Assistencial Nara Gonçalves da Rocha Vianna- Enfermeira Assistencial Juliana Laurentino Rosas- Enfermeira Assistencial

SUMÁRIO

1. DEFINIÇÃO.....	6
2. OBJETIVO.....	6
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.....	6
4. PROCEDIMENTO.....	7
4.1 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS.....	7
4.2 RESPONSÁVEIS.....	7
4.3 DESCRIÇÃO.....	7
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	8

	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA Hospital Universitário	Data: 06/18 Versão: 1.0
Protocolo Assistencial de Enfermagem pediátrica LIMPEZA DE DESINFECÇÃO DE INCUBADORA		

1. DEFINIÇÃO

Processo que visa padronizar a limpeza e desinfecção de incubadora, promovendo a melhoria da qualidade da assistência prestada aos clientes.

2. OBJETIVO

Padronizar a limpeza e desinfecção de incubadora para promover a qualidade e eficiência do procedimento para os clientes internados no setor de pediatria.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Na unidade de internação do Hospital Universitário de Juiz de fora, setor de pediatria do HU UFJF unidade Santa Catarina.

4. PROCEDIMENTO

4.1 Equipamentos e materiais necessários

Compressas ou panos limpos, água, detergente neutro, luva de procedimentos, álcool 70%

4.2 Responsável: Enfermeiro, técnico e auxiliares de enfermagem

4.3 Descrição

- Reunir o material necessário;
- Calçar luva de procedimento;
- Desligar o aparelho, desconectando da tomada de energia antes de iniciar a desinfecção;
- Limpar a superfície externa com pano limpo e umedecido com água e detergente neutro;
- Lavar as demais peças (peças laváveis) com detergente neutro;
- Não utilizar produtos abrasivos ou hipoclorito de sódio porque danificam o acrílico da cúpula e as demais peças utilizadas na incubadora;
- Enxaguar a incubadora com pano umedecido com água limpa;
- Secar com pano limpo e seco;
- Fazer desinfecção com álcool à 70%;
- Retirar as luvas e descartar o material em lugar adequado;

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Manual de limpeza, desinfecção, esterilização e antissepsia SCIH/HCC, Outubro de 2008.
Manual do fabricante.

