

# MANUAL

EBSERH

## MANUAL DO USUÁRIO PERFIL VISUALIZADOR STT

Versão: 1.0 | 2025



**EBSERH**  
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 1 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

	Data	Status	Autor	Revisor
1.0	30/07/2025	Elaboração do documento	Fabiana Maronez Peçanha Ribeiro	Marcio Fontinele Viana

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 2 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

## SUMÁRIO

<b>1. APRESENTAÇÃO</b> .....	4
<b>2. OBJETIVO</b> .....	4
<b>3. ACESSO AO SISTEMA</b> .....	4
<b>4. MÓDULO EXAMES</b> .....	6
5.1 Tela de Pesquisa .....	7
5.2 Painel de Exames .....	8
5.2.1 Ação Ver .....	11
5.2.2 Ação Imprimir e Ação Protocolo .....	15
<b>5. MÓDULO ECG (ELETROCARDIOGRAMA)</b> .....	15
5.1 Tela de Pesquisa .....	16
5.2 Ação Ver .....	17

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 3 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Tela de Acesso ao Sistema STT.....	5
Figura 2 - Tela Perfil Visualizador. ....	5
Figura 3 - Tela Módulos STT. ....	6
Figura 4 - Tela Módulo Exames. ....	7
Figura 5 - Módulo Exames - Tela de Pesquisas de Exames.....	8
Figura 6 - Módulo Exames - Tela de Pesquisa e Dados do Paciente.....	8
Figura 7 - Módulo Exames - Tela Painel de Exames.....	8
Figura 8 - Módulo Exames - Tela de Legenda. ....	9
Figura 9 - Módulo Exames - Botão Gerar Protocolos. ....	10
Figura 10 - Módulo Exames - Tela Impressão em Lotes. ....	10
Figura 11 - Módulo Exames - Tela Opções de Ações. ....	10
Figura 12 - Módulo Exames - Tela Ação Ver.....	11
Figura 13 - Módulo Exames - Tela Opções de Botões.....	12
Figura 14 - Módulo Exames - Botão Imprimir.....	13
Figura 15 - Módulo Exames - Tela Botão Protocolo.....	13
Figura 16 - Módulo Exames – Tela de Download Weasis. ....	14
Figura 17 - Módulo Exames - Tela Weasis. ....	14
Figura 18 - Módulo Exames - Tela Ações Imprimir e Protocolo.....	15
Figura 19 - Módulo ECG - Tela Início.....	16
Figura 20 - Módulo ECG - Tela de Exames. ....	16
Figura 21 - Módulo ECG -Tela Pesquisa de Exames. ....	17
Figura 22 - Módulo ECG - Tela Opções de ações. ....	17
Figura 23 - Módulo ECG - Tela Ação Ver.....	18
Figura 24 - Módulo ECG - Tela Botão Imprimir. ....	19
Figura 25 - Módulo ECG - Botão Protocolo.....	19
Figura 26 - Módulo ECG - Tela Botão Termo de Autorização.....	20
Figura 27 - Módulo Exames - Tela Opções.....	20

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 4 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

## 1. APRESENTAÇÃO

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) apresenta a Coleção de Manuais do Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), composta de manuais elaborados pela equipe de Serviços de Desenvolvimento de Sistemas (SDS) da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas de Informações (CDSI) da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI). A coleção conta com manuais voltados para o preenchimento dos diversos módulos do Sistema de Telemedicina e Telessaúde (STT).

A elaboração dos diversos manuais objetiva auxiliar os colaboradores na usabilidade do STT com instruções gerais. Com tal ação, visamos trazer mais uma ferramenta de apoio aos Hospitais Universitários, bem como melhorar a qualidade do atendimento prestado aos usuários.

O Manual do Usuário foi elaborado com uma linguagem simples, contendo a descrição passo-a-passo do sistema e respostas a questionamentos frequentes. Esperamos que os usuários do STT tenham maior autonomia no esclarecimento de eventuais dúvidas por meio do conteúdo dos manuais.

## 2. OBJETIVO

Este manual apresenta inicialmente as funcionalidades gerais do Perfil Visualizador, oferecendo uma visão detalhada de seu comportamento padrão, formas de acesso para uma visualização completa das imagens e laudos dos exames.

Cada funcionalidade existente no sistema é apresentada por meio de explicações, acompanhada das ilustrações de telas.

## 3. ACESSO AO SISTEMA

Para realizar o acesso ao Sistema STT utilize o link: <https://login-stt.ebserh.gov.br/>.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 5 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	



Figura 1 - Tela de Acesso ao Sistema STT.

É necessário utilizar as credenciais, usuário e senha, da Rede EBSERH e em seguida pressionar o botão “Entrar no sistema”.

**IMPORTANTE:** Para o correto acesso, é obrigatório que o colaborador possua cadastro no Sistema de Telemedicina e Telessaúde e tenha o perfil de VISUALIZADOR atribuído para que o acesso ocorra e sejam apresentadas todas as funcionalidades.

Referente ao perfil VISUALIZADOR, o colaborador possuirá os seguintes acessos:

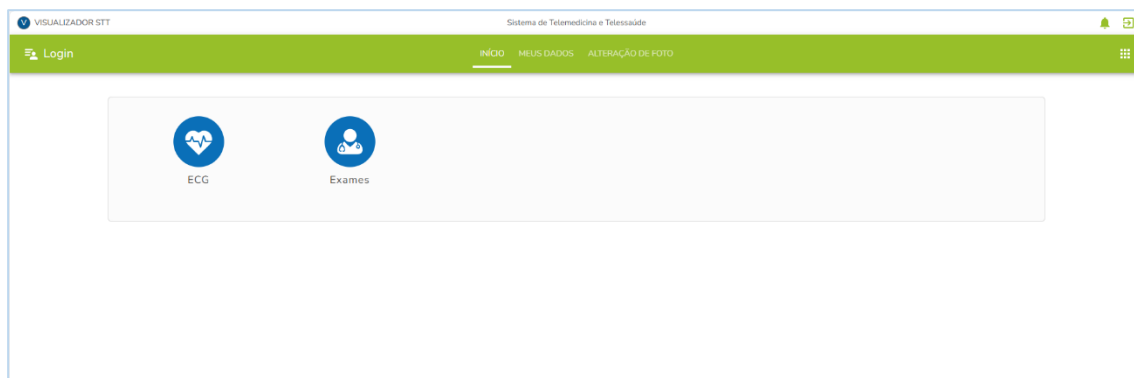






Figura 2 - Tela Perfil Visualizador.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 6 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

- No canto superior esquerdo é possível visualizar seu usuário da rede EBSERH que está acessando o sistema (  VISUALIZADOR STT );
- No meio da tela este usuário possui o acesso as abas: “INÍCIO” e ‘MEUS DADOS” e “ALTERAÇÃO DE FOTO”;
- No canto superior direito:

 Ícone de Opções: Notas de atualização e Materiais de Apoio;

 Ícone de Logout: para desconectar do sistema (sair);

 Ícone dos Módulos: informa os módulos que este perfil possui acesso - ECG e EXAMES.

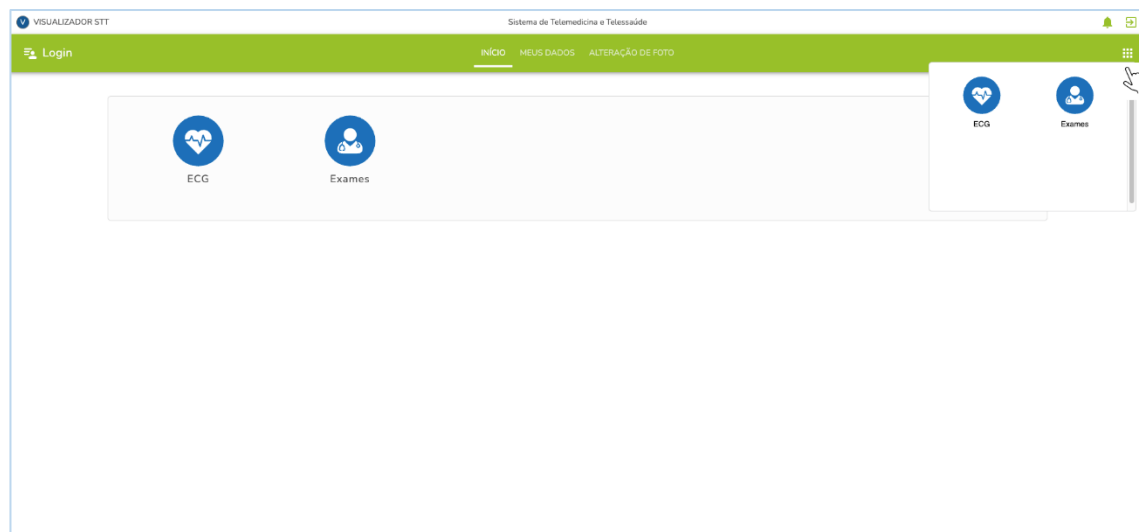


Figura 3 - Tela Módulos STT.

#### 4. MÓDULO EXAMES

Após selecionar o módulo “Exames” o sistema irá apresentar a tela de pesquisa, contendo informações com: Instituição, Requisição, Descrição do Exame, dentre outras.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 7 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025 Versão: 1.0	Próxima revisão: 30/07/2027

**EXAMES**

**Pesquisa**

Data

Data inicial do exame: 26/06/2025

Situação

Com laudo  
  Sem laudo  
  Emissão  
  Complemento  
  Válido  
  Atrasado  
  Inválido

Origem

Agendados  
  PACS  
  Telediagnóstico

Localização

UF: [dropdown]   Município: [dropdown]   Instituição: [dropdown]

Exame

Requisição  
  Protocolo  
  Número do laudo  
  Modalidade  
  Com imagem

Requisição	Protocolo	Número do laudo	Modalidade	Status
15/05/2025 05:44	Nucleo De Saude Digital Ufsc	5478-11	Sabrina Charao Santiago	Raio X Panoramica Teste 14 05 - Agendado
16/12/2024 09:55	Hospital Universitario Joao De Barros Barreto	[redacted]	[redacted]	Radiologia Digital - Emissão
16/12/2024 09:51	Hospital Universitario Joao De Barros Barreto	[redacted]	[redacted]	Radiologia Digital - Atrasado
16/12/2024 09:41	Hospital Universitario Polydoro Ermani De Sao Thiago	[redacted]	[redacted]	Torax Mural - Com laudo
16/12/2024 09:38	Hospital Universitario Polydoro Ermani De Sao Thiago	[redacted]	[redacted]	Ultrassom - Com laudo
16/12/2024 09:37	Hospital Universitario Polydoro Ermani De Sao Thiago	[redacted]	[redacted]	Eletrocardiograma - Priorizado
16/12/2024 09:36	Hospital Universitario Polydoro Ermani De Sao Thiago	[redacted]	[redacted]	Torax Mural - Com laudo
16/12/2024 09:35	Hospital Universitario Polydoro Ermani De Sao Thiago	[redacted]	[redacted]	Eletrocardiograma - Com laudo
16/12/2024 09:30	Hospital Universitario Joao De Barros Barreto	[redacted]	[redacted]	Radiologia Digital - Atrasado
16/12/2024 09:25	Hospital Universitario Polydoro Ermani De Sao Thiago	[redacted]	[redacted]	Tc Torax - Com laudo

Direcionado  
  Validado

Linhas por página: 10 | 1-10 de 67841

Figura 4 - Tela Módulo Exames.

### 5.1 Tela de Pesquisa

É possível realizar pesquisas referente aos exames, preenchendo os campos necessários.

- Insira as datas inicial/final do exame e/ou inicial/final do laudo;

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 8 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

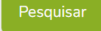
- Marque a “Situação” e “Origem” dos exames a serem pesquisados;

Figura 5 - Módulo Exames - Tela de Pesquisas de Exames.

- Preencha os campos de “Localização”, “Exame” e “Paciente”;

Figura 6 - Módulo Exames - Tela de Pesquisa e Dados do Paciente.

## 5.2 Painel de Exames

Ao pressionar o botão “Pesquisar” , o sistema retorna com os exames referente aos dados preenchidos nos campos acima citados.

<input type="checkbox"/>	Data	Instituição	Requisição	Paciente	Descrição	Situação	Imagem	Opções
<input type="checkbox"/>	15/05/2025 05:44	Núcleo De Saude Digital Ufsc	[Redacted]	[Redacted]	Raio X Panorâmica Teste 14 05	Agendado		⋮
<input type="checkbox"/>	16/12/2024 09:55	Hospital Universitario Joao De Barros Barreto	[Redacted]	[Redacted]	Radiologia Digital.	Emissão		⋮
<input type="checkbox"/>	16/12/2024 09:51	Hospital Universitario Joao De Barros Barreto	[Redacted]	[Redacted]	Radiologia Digital.	Atrasado		⋮
<input type="checkbox"/>	16/12/2024 09:41	Hospital Universitario Polydoro Ernani De Sao Thiago	[Redacted]	[Redacted]	Torax Mural	Com laudo		⋮

Figura 7 - Módulo Exames - Tela Painel de Exames.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 9 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

É possível limpar todos os campos preenchidos ao pressionar o botão “Limpar” .



- **Legenda:** para cada exame o sistema disponibiliza uma “Situação”.

Agendado

Aguardando o envio dos estudos do exame agendado;

Emissão

O profissional responsável está analisando os exames para emissão do laudo;

Atrasado

O exame segue aguardando laudo após o prazo estabelecido;

Com laudo

O laudo está disponível para visualização;

Priorizado

O exame foi priorizado para a emissão do laudo;

Complemento

O laudo necessita de um complemento de outro especialista;

Laudo temporário

Laudo emitido pelo médico residente, necessita de validação por um médico executor.

No final da tela o sistema disponibiliza uma legenda, diferenciando a cor que destaca as opções, por tanto, o exame destacado em vermelho, é um exame validado.

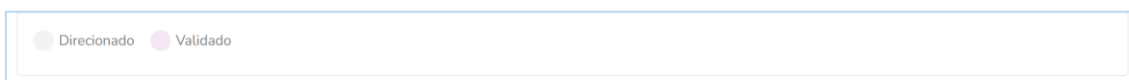


Figura 8 - Módulo Exames - Tela de Legenda.

- **Exame Validado:** O exame é considerado validado quando foi conferido pelo técnico responsável, com inclusão de indicação clínica, e/ou anexando um documento.
- **Exame Direcionado:** O exame pode ser direcionado para um profissional específico da instituição redigir o laudo.

**IMPORTANTE:** Ao realizar a seleção de um ou mais exames, o sistema disponibilizará automaticamente o botão “Gerar protocolos”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 10 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

<input checked="" type="checkbox"/>	16/12/2024 09:35	Hospital Universitario Polydoro Ernani De Sao Thiago	1	Carveditol 649 112	Eletrocardiograma	Com laudo		
<input checked="" type="checkbox"/>	16/12/2024 09:30	Hospital Universitario Joao De Barros Barreto	12345241216035 59	Dos Santos Edivanildo	Radiologia Digital	Atrasado		
<input checked="" type="checkbox"/>	16/12/2024 09:25	Hospital Universitario Polydoro Ernani De Sao Thiago	498	Enzo Royter Mafi	Tc Torax	Com laudo		

Direcionado  Validado  
 3 Exames selecionados Gerar protocolos

Figura 9 - Módulo Exames - Botão Gerar Protocolos.

Pressione o botão “Gerar protocolos” para realizar a impressão “PROTOCOLO DE EXAME” do(s) selecionado(s).



Figura 10 - Módulo Exames - Tela Impressão em Lotes.


Ao acessar o ícone o sistema disponibilizará outras possíveis ações: “Ver”, “Imprimir” e “Protocolo”.

<input type="checkbox"/>	Data	Instituição	Requisição	Paciente	Descrição	Situação	Imagem	Opções
<input type="checkbox"/>	15/05/2025 05:44	Nucleo De Saude Digital Ufsc	5478-11	Sabrina Charao Santiago	Raio X Panoramica Teste 14 05	Agendado		
<input type="checkbox"/>	16/12/2024 09:55	Hospital Universitario Joao De Barros Barreto	3429	Nilo Travassos Maciel	Radiologia Digital	Emissão		
<input type="checkbox"/>	16/12/2024 09:51	Hospital Universitario Joao De Barros Barreto	12345241216035 60	Eduarda Da Maria	Radiologia Digital	Atrasado		
<input type="checkbox"/>	16/12/2024 09:41	Hospital Universitario Polydoro Ernani De Sao Thiago	16122024000010 1	Hilda Soares Da Silva	Torax Murat	Com laudo		

Figura 11 - Módulo Exames - Tela Opções de Ações.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 11 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

### 5.2.1 Ação Ver

Possibilita ao operador do sistema visualizar os exames. Na tela de exames em aberto, o colaborador poderá visualizar as informações do exame selecionado. Ao pressionar o ícone  no campo “Protocolo” o colaborador conseguirá copiar o número do protocolo deste paciente.

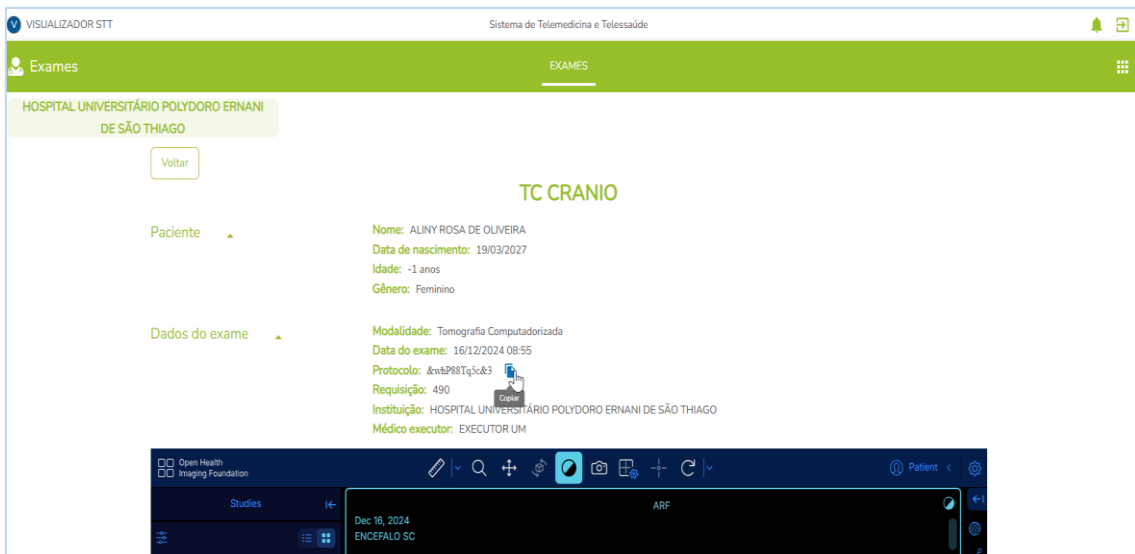


Figura 12 - Módulo Exames - Tela Ação Ver.

O sistema irá disponibilizará botões de ações.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 12 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

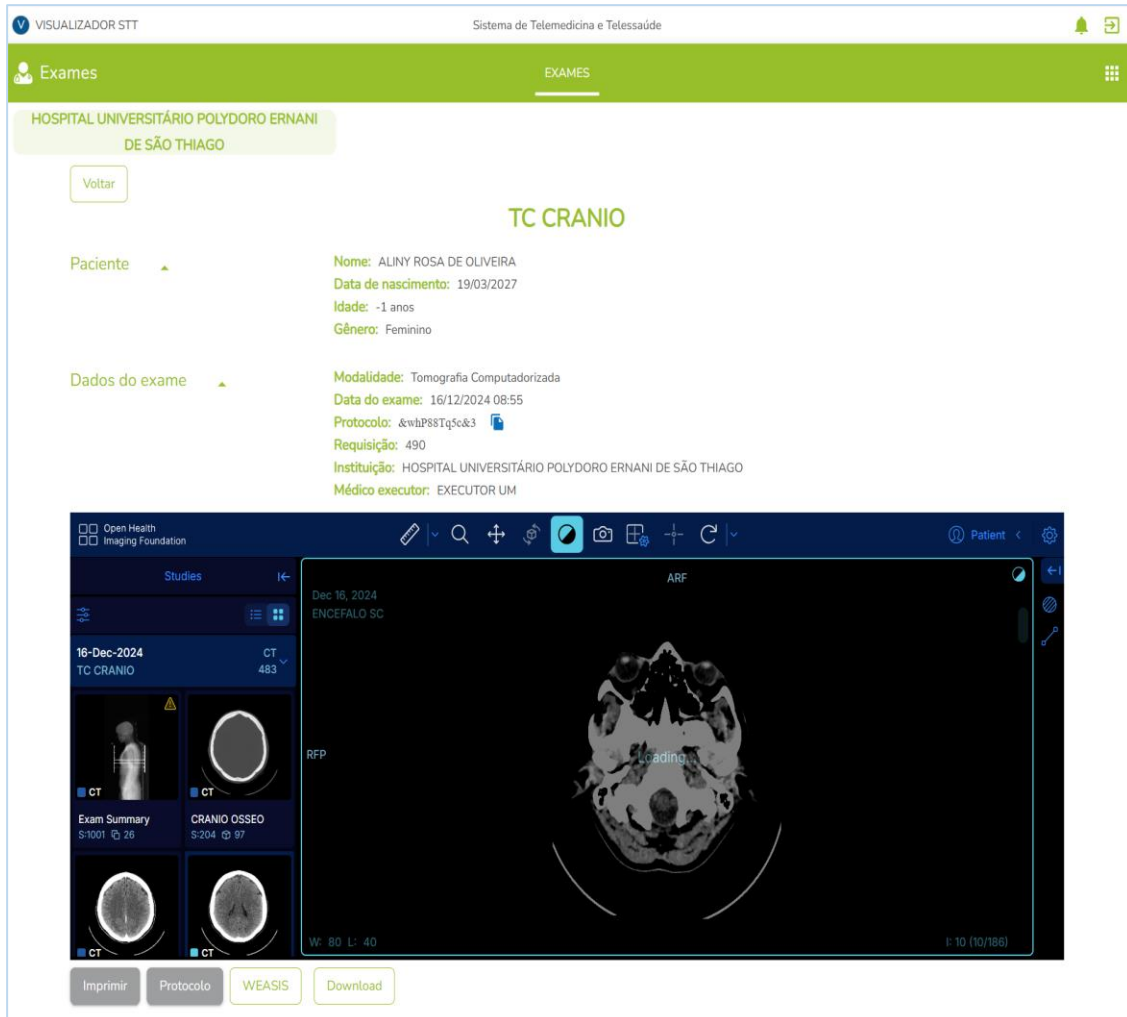


Figura 13 - Módulo Exames - Tela Opções de Botões.

- **Botão Imprimir:** Disponibiliza a visualização das informações para acesso ao exame, antes de enviá-lo para impressão.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 13 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	



Figura 14 - Módulo Exames - Botão Imprimir.

- **Botão Protocolo:** Disponibiliza a visualização do protocolo de exame, antes de enviá-lo para impressão.



Figura 15 - Módulo Exames - Tela Botão Protocolo.

- **Botão WEASIS:** Ao selecionar o botão WEASIS, uma tela será aberta para que seja realizado o download do visualizador.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 14 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

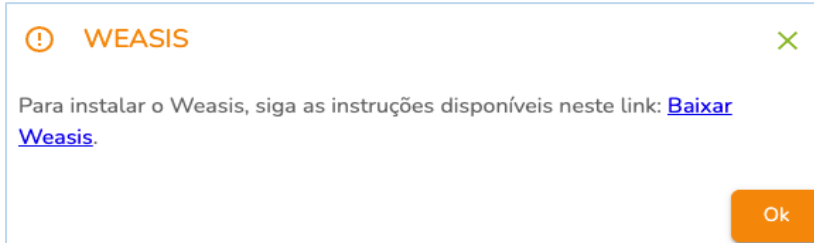


Figura 16 - Módulo Exames – Tela de Download Weasis.

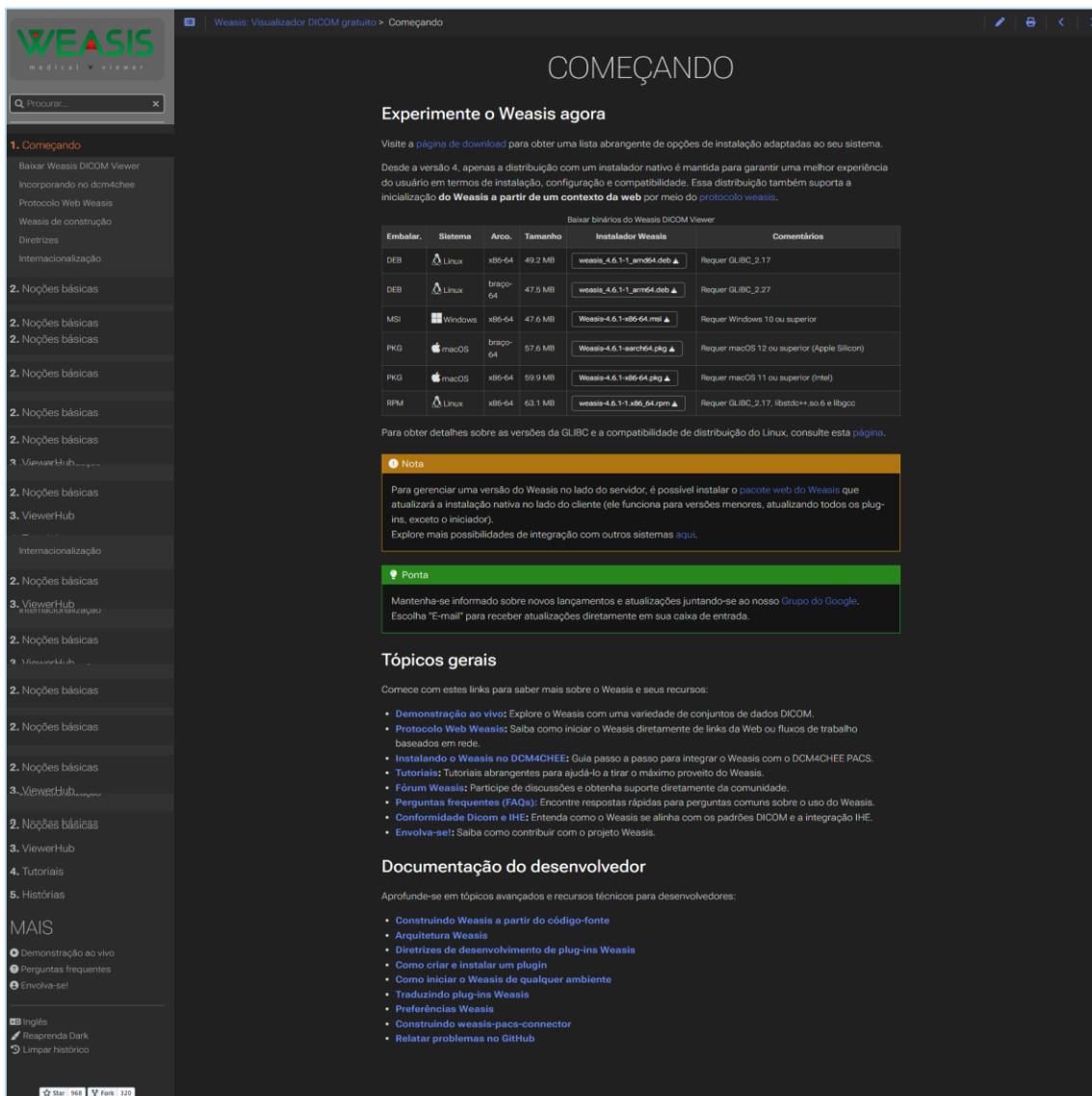

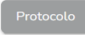


Figura 17 - Módulo Exames - Tela Weasis.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 15 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

- **Botão Download:** Ao selecionar a opção “Download”, o estudo completo será baixado de forma compactada (ZIP) no seu computador conforme o diretório de sua preferência.

### 5.2.2 Ação Imprimir e Ação Protocolo

Ao acessar as ações “Imprimir” e “Protocolo” no Painel de Exames, o sistema realizará as ações de forma idêntica mencionadas nos botões “Imprimir”  e “Protocolo”  mencionados acima (Ação Ver).


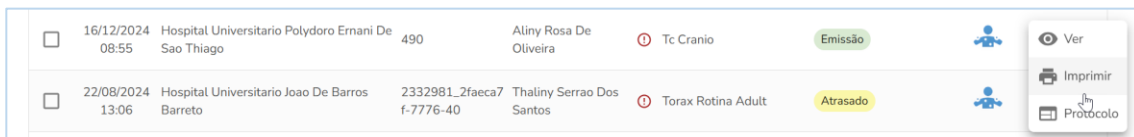


Figura 18 - Módulo Exames - Tela Ações Imprimir e Protocolo.

## 5. MÓDULO ECG (ELETROCARDIOGRAMA)

Para acessar o Módulo de Eletrocardiograma selecione o ícone  .

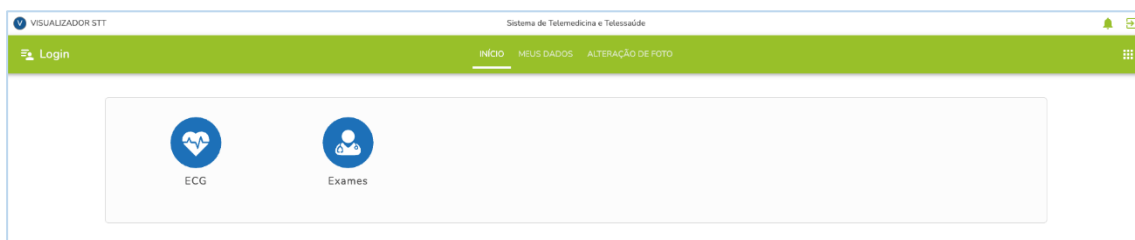

Uma vez que, o Módulo ECG tenha sido aberto, serão apresentadas as abas “Início” e “Exames”.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 16 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	



Figura 19 - Módulo ECG - Tela Início.

Na aba “Início” é possível verificar a quantidade de “Exames laudados” e “Inválidos”.

Na aba “Exames” encontramos:

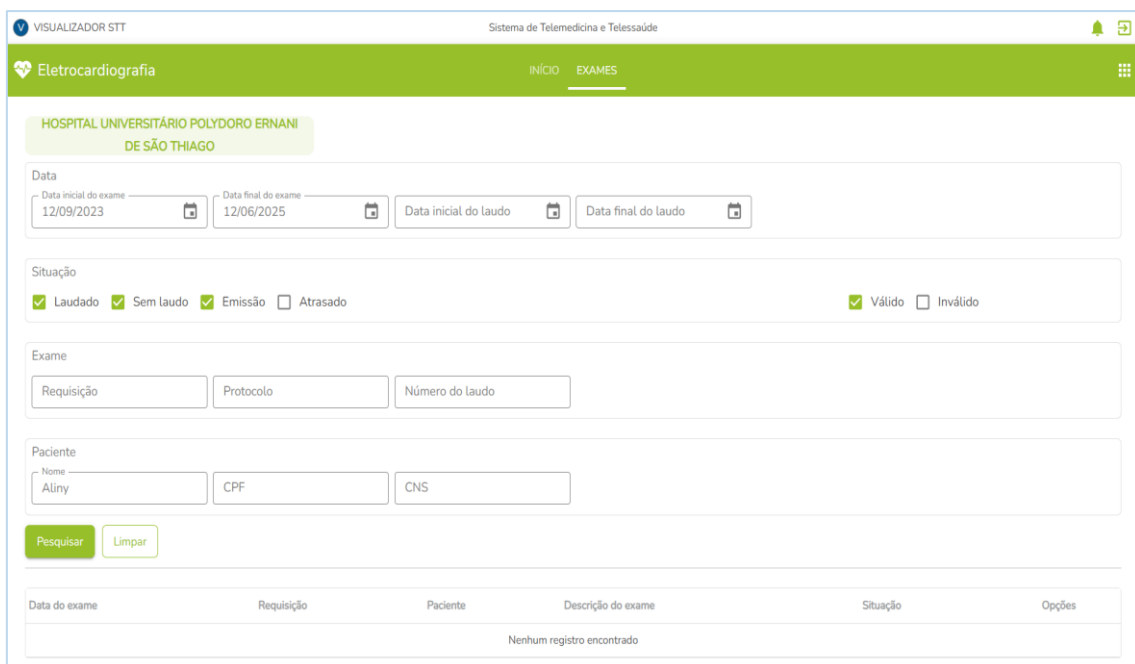


Figura 20 - Módulo ECG - Tela de Exames.

### 5.1 Tela de Pesquisa

É possível realizar pesquisas referente aos pacientes/exames, preenchendo os campos necessários:

- Insira as datas inicial/final do exame e/ou inicial/final do laudo;

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 17 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

- Marque a “Situação” dos exames a seres pesquisados;
- Insira os dados do Exame: Requisição, Protocolo Número do laudo;
- Insira os dados do Paciente: Nome, CPF, CNS;
- Pressione o botão “Pesquisar”.

O sistema retorna com os resultados da pesquisa realizada. Além disso, disponibiliza o ícone

de opções

**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO**

Data: Data inicial do exame: 09/04/2024, Data final do exame: 12/06/2025, Data inicial do laudo, Data final do laudo

Situação:  Laudado  Sem laudo  Emissão  Atrasado  Válido  Inválido

Exame: Requisição, Protocolo, Número do laudo

Paciente: Nome: Aliny, CPF, CNS

Data do exame	Requisição	Paciente	Descrição do exame	Situação	Opções
16/12/2024 09:37	1	ALINY ROSA DE OLIVEI	Eletrocardiograma	Priorizado	

Figura 21 - Módulo ECG - Tela Pesquisa de Exames.

Ações disponíveis no ícone de Opções:

Data do exame	Requisição	Paciente	Descrição do exame	Situação	Opções
16/12/2024 09:37	1	ALINY ROSA DE OLIVEI	Eletrocardiograma	Priorizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ver</li> <li>Imprimir</li> <li>Protocolo</li> <li>Termo de autorização</li> </ul>


Linhas por página: 10 | 1-1 de 1

Figura 22 - Módulo ECG - Tela Opções de ações.

## 5.2 Ação Ver

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 18 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

Possibilita ao operador do sistema visualizar informações como: dados do paciente, dados do exame, indicação clínica, dentre outras.

Ao pressionar no ícone  no campo “Protocolo” o colaborador conseguirá copiar o número do protocolo deste paciente.

Os botões “Imprimir”, “Protocolo” e “Termo de autorização” estarão disponíveis no final da tela.

**Medicção:**

Sintomas:	
Histórico:	
Vent. Taxa	71 bpm
PR int	134 ms
Dur. QRS	80 ms
QT/QTc (E) int	388/409 ms
P/QRS/T eixo	39/ 82/ 39 °
RV5/SV1 amo	0.63/ 0.43 aV
RV5+SV1 amo	1.06 aV

Relatório não confirmado  
Analisado por:

2250K 02-01 04-05 Dept.: Examinar la veronica

**Dica**  
Use as setas laterais ou a ação de arrastar para navegar entre as imagens.  
Use o scroll do mouse para aplicar zoom.  
Com zoom aplicado, você pode usar o botão esquerdo do mouse para movimentar a imagem para uma região de interesse.

Imprimir Protocolo Termo de autorização

Figura 23 - Módulo ECG - Tela Ação Ver.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 19 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

- **Botão Imprimir:** Disponibiliza a visualização do documento, antes de enviá-lo para impressão.

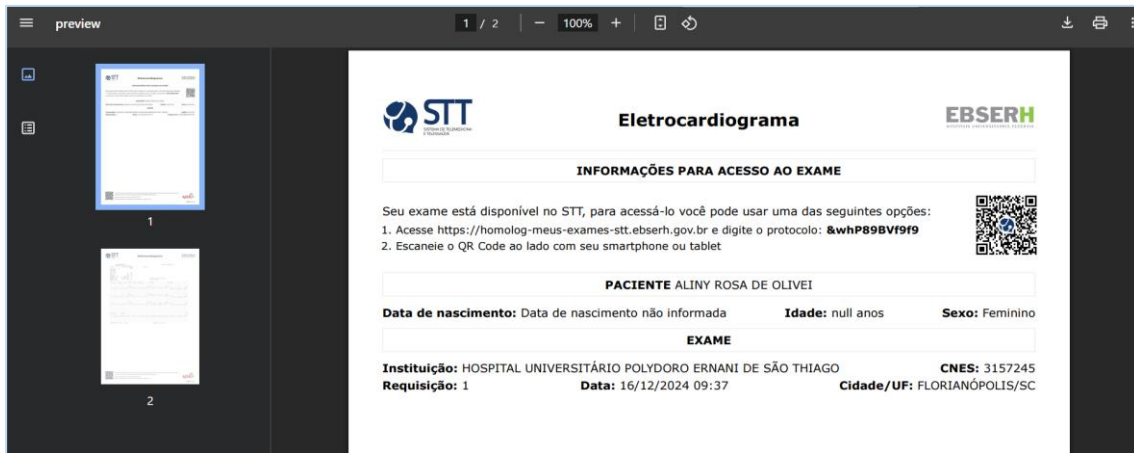


Figura 24 - Módulo ECG - Tela Botão Imprimir.

- **Botão Protocolo:** Este botão gera um documento “Protocolo de Exame” em formato pdf.



Figura 25 - Módulo ECG - Botão Protocolo.

- **Botão Termo de autorização:** disponibiliza uma preview do documento “Termo de Concordância e de Autorização para Serviços de Telemedicina” para visualização antes da impressão.

Tipo do Documento:	MANUAL	MA. CDSI.001 – Página 20 de 20	
Título do Documento:	PERFIL VISUALIZADOR	Emissão: 30/07/2025	Próxima revisão: 30/07/2027
		Versão: 1.0	

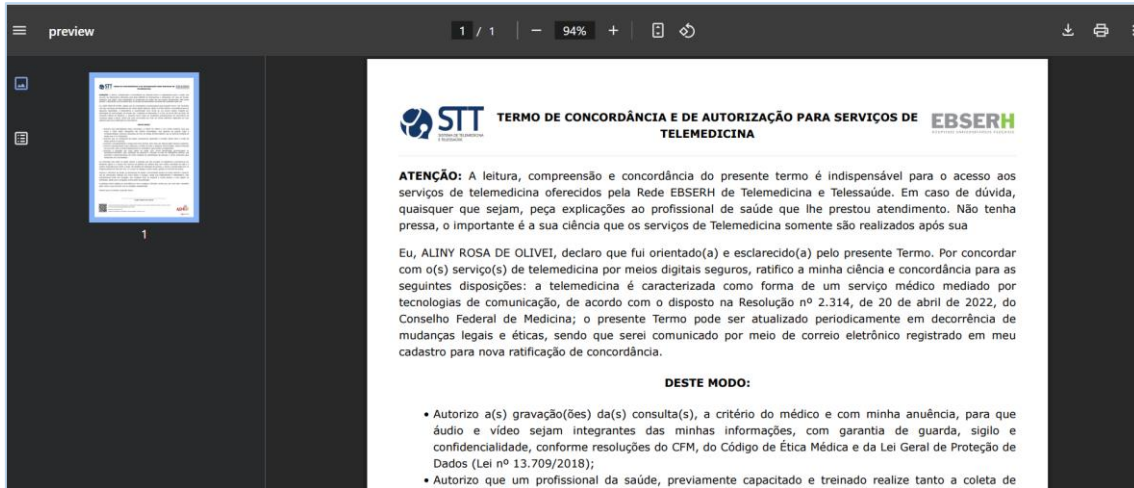


Figura 26 - Módulo ECG - Tela Botão Termo de Autorização.

Outras funcionalidades encontradas no ícone Opções  são:

- Imprimir;
- Protocolo;
- Termo de Autorização.

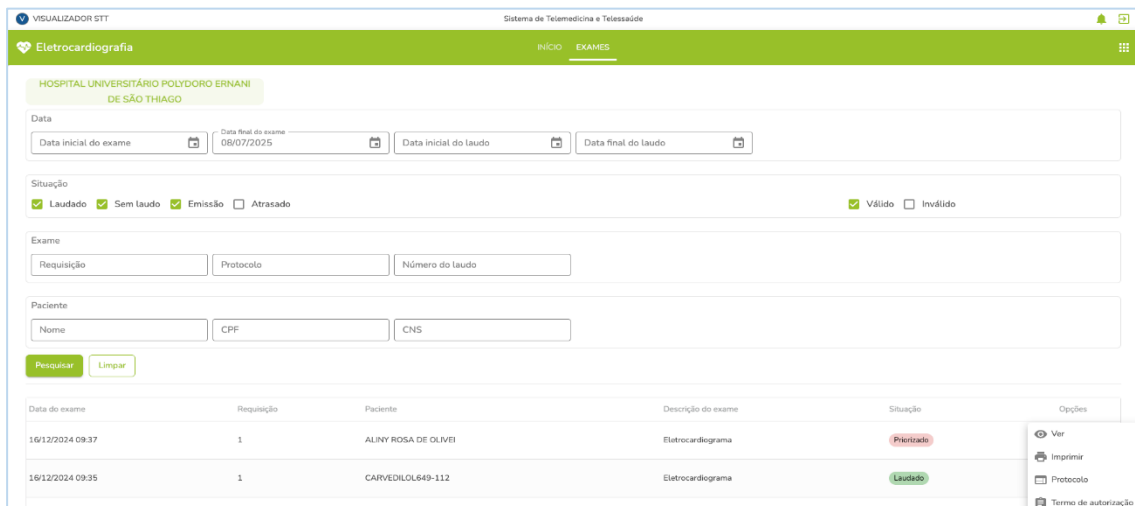


Figura 27 - Módulo Exames - Tela Opções.

Quando selecionadas uma das opções citadas acima, o sistema realizará ações de forma idêntica às mencionadas no item 5.2 Ação Ver.